


# Leitfaden für den Verbandwechsel



Nutzen Sie **Mepitel®** für die Behandlung Ihrer Wunde.

## Anwendung:

1. Wunde gemäß geltender Richtlinien reinigen und vorbereiten. Wundumgebende Haut gründlich trocknen.
2. Entnehmen Sie den Verband der Verpackung.
3. Wenn Sie Handschuhe tragen, befeuchten Sie diese vor dem Anlegen des Verbands an den Fingern, damit der Verband nicht an Ihren Handschuhen haften bleibt. Halten Sie die größere Schutzfolie fest und entfernen Sie die kleinere.

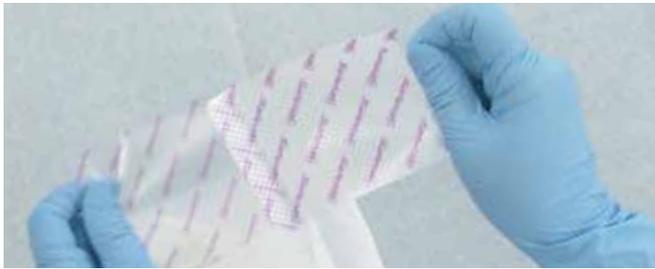

4. Legen Sie den Verband auf die Wunde und entfernen Sie die verbleibende Schutzfolie.



5. Streichen Sie den Verband auf der wundumgebenden Haut glatt, um eine gute Abdichtung zu erzielen.



6. Decken Sie Mepitel® mit einem äußeren Verband ab.



7. Legen Sie einen Schlauchverband an, um den Verband zu fixieren.

## Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?  
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

### Bitte beachten Sie:

- ✓ Mepitel ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

Mepitel® Wundverbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mepitel®, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0. Mölnlycke®, Mepilex® Border Flex sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0110

Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie den Verband anlegen können. Scannen Sie hierfür einfach den Code mit Ihrem Handy oder besuchen Sie uns auf:



[www.molnlycke.de/produkte-losungen/mepitel](http://www.molnlycke.de/produkte-losungen/mepitel)

  
**Mölnlycke®**