

Monopolare L-Haken Elektrode



Die monopolare L-Haken Elektrode ist ein steriles Einweginstrument mit einem isolierten Schaft mit 5 mm Durchmesser. Sie kann während minimal-invasiven Eingriffen für die Mobilisierung und Transsektion von Gewebe verwendet werden. Zudem besteht die Möglichkeit des monopolaren elektrischen Kauterisierens zum Präparieren und Koagulieren von Gewebe.

- Die monopolare L-Haken Elektrode ermöglicht die präzise, kontrollierte Dissektion und Koagulation von Gefäßen und Gewebe
- Komfortables Einweginstrument bietet Sterilität und eine effektive monopolare Stromaktivierung, um eine Verbrennung des angrenzenden Gewebe zu verhindern
- Die monopolare L-Haken Elektrode ist mit allen elektrochirurgischen Generatoren kompatibel. Unser Instrument hat einen 4 mm-Anschluss und ist mit monopolaren Instrumentenkabeln kompatibel, welche über einen 4 mm Anschluss verfügen


Die Instrumente können nur mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren in Übereinstimmung mit den Normen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 und IEC 60601-2-2, einschließlich der geltenden nationalen/regionalen Bestimmungen, verwendet werden. Die Instrumente sind mit monopolaren elektrochirurgischen Generatoren von 2000 V & 390 kHz im schneidenden Modus; 3500 V & 390 kHz im Koagulationsmodus kompatibel. Empfohlene maximale Diathermieeinstellung zum Schneiden sind 50 W und zum Koagulieren 70 W. Die Höchstspannung beträgt 5,5 kVp.



Monopolare L-Haken-Elektrode ohne Kabel



Haken

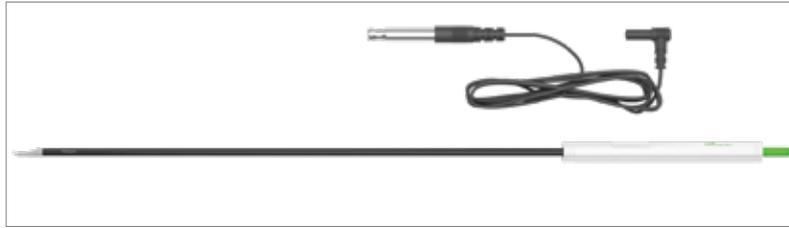

Monopolare L-Haken-Elektrode mit Kabel

Art.-Nr.	Beschreibung	Ø	Länge	IV / VSK
899100	Monopolare L-Haken-Elektrode	5 mm	33 cm	10 / 100
899101	Monopolare L-Haken-Elektrode mit Kabel	5 mm	33 cm	10 / 100

IV / VSK = Innenverpackung / Versandkarton

Allgemeine Informationen

Sterilisation: Ethylenoxid

Haltbarkeit: Fünf (5) Jahre ab Herstellungsdatum.

Verpackung: Das Produkt ist innen in einen Polyethylen-Beutel und außen in einen Tyvek-Beutel verpackt. Die Innenverpackung ist aus weißem Karton und der Versandkarton aus braunem Karton (keine Chlorbleiche verwendet).

Material: DEHP- und Latexfrei.

Entsorgung: Befolgen Sie die örtlichen Richtlinien für kontaminierte Produkte.

Hersteller: Unimax Medical Systems Inc.;
Import und Vertrieb durch Mölnlycke Health Care AB.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com