

# Guía de aplicación - Mepilex® Border Heel



**Preparar la zona:** Limpie la piel. Seque la piel perilesional. Asegúrese de que la piel está libre de dimeticona, sellantes y emolientes. No es necesario el uso de una crema barrera bajo el apósito.



1. Retire el papel protector central y deslice el apósito debajo del talón hasta la ubicación deseada.



2. Aplicar la parte adherente marcada con una 'A' en la parte del talón posterior / tendón de Aquiles, colocando la parte más estrecha del apósito en la base del talón. No estire.



3. Retire los papeles protectores laterales marcados con la 'A' (laterales del tobillo). Aplicar y alisar. Repetir con el otro lado. No estire.



4. Aplique suavemente la parte adherente del apósito marcado con la 'B' (vea la ilustración superior) debajo de la superficie de la planta del pie. No estire.



5. Retire uno de los papeles protectores marcados con la "B" (laterales con pestañas). Aplicar y alisar. Repetir con el otro lado. No estire.



6. Presione y alise el apósito para garantizar que el apósito está en contacto total con la piel.

Más información en [www.molnlycke.es](http://www.molnlycke.es)

Mölnlycke, Calle Quintanavides 17, Edif. 3 - Planta 4. Tel: 914841320  
Los nombres, logos y marcas de Mölnlycke Health Care, Mepilex® y Safetac® están registradas globalmente por una o más empresas del grupo Mölnlycke Health Care.  
© 2023 Mölnlycke Health Care. Todos los derechos reservados. ESWC0102