

Tubifast® Garments

Gebrauchsfertige Kleidung – elastische Fertigverbände

SoftSeam™ Technologie

- Weiche, flache Nähte helfen, Irritationen bei sensibler Haut zu minimieren.

2-Way-Stretch®-Technologie

- Verleiht Tubifast Garments eine sehr gute Elastizität und ermöglicht den Patienten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Kindgerechte Applikationen auf dem Bündchen

- Für jüngere Kinder (bis Größe „2-5 Jahre“)
- Erhöht die Patientencompliance¹



- Können wie Kleidungsstücke angezogen und getragen werden
- Längs- und querelastisch für die komplikationslose Sicherung von Primärverbänden und optimalen Tragekomfort
- Einsatz bei Hauterkrankungen innerhalb der Fett-Feucht-Therapie als Feucht- und Trockenverbände möglich^{1,2}
- Bequeme, schnelle und einfache Art der Anwendung ohne zusätzliche Fixierhilfen¹

So funktionieren Tubifast® Garments

Die gebrauchsfertige Tubifast-Kleidung mit 2-Way Stretch Technologie ist in Form von langärmeligen Shirts, langärmeligen Shirts mit integrierten Fäustlingen (für die Größe „6-24 Monate“), Leggings, Socken und Handschuhen für Kinder ab 6 Monaten und älter erhältlich.

Tubifast Garments mit 2-Way Stretch Technologie sind schnell und einfach in der Anwendung – denn sie können einfach wie ein Kleidungsstück übergezogen werden, ohne Sicherheitsnadeln oder Klebebänder verwenden zu müssen. Die Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Tragekomfort. Tubifast Garments können unter normaler Kleidung und Nachtwäsche getragen werden und gewährleisten damit aktive Tage und erholsame Nächte.

Vorteile von Tubifast® Garments mit 2-Way Stretch® Technologie

- Weiche, flache Nähte minimieren Irritationen bei sensibler Haut
- Bequeme, schnelle und einfache Art der Anwendung
- Angenehm unter normaler Kleidung und Nachtwäsche zu tragen
- Vollständige Bewegungsfreiheit
- In vielen verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich
- Verbesserte Passform für den Hals

Fasergehalt

Viskose, Elastan, Polyamid

Waschanleitung



Anwendungsgebiete

Tubifast Garments mit 2-Way Stretch Technologie eignen sich für die schnelle und komplikationslose Sicherung von Primärverbänden und den Einsatz innerhalb der Fett-Feucht-Therapie. Dabei handelt es sich um ein Therapiekonzept, das beispielsweise bei der Behandlung des atopischen Ekzems seine Anwendung findet. Zunächst wird eine rückfettende Substanz / Creme auf die betroffene Haut aufgebracht, die mit einer Lage feuchter Tubifast-Kleidung abgedeckt wird. Diese erhält gemeinsam mit der fetthaltigen Substanz den Feuchtigkeitsgehalt der Haut aufrecht und hilft dabei, Entzündungen zu reduzieren.¹ Weiterhin sorgt die erste, feuchte Lage Tubifast Garments für einen kühlenden Effekt und dafür, dass die fetthaltige Substanz mit der Haut in Kontakt bleibt. Der Juckreiz wird gelindert und die Haut kann sich beruhigen.²

Eine zweite trockene Schicht Tubifast Garments hält die Patientenkleidung trocken und verhindert, dass weiteres Kratzen Verletzungen der Haut verursacht.

Die Fett-Feucht-Therapie mit Trockenverband ist in der Anwendung ähnlich. Hier wird das therapeutische Mittel auf die betroffene Haut aufgetragen, die dann mit einer Lage, hier Tubifast Garments, bedeckt wird.

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Produkt/Größe	PZN/ Stück	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
59 20	Handschuhe Erwachsene M/L	10 05 79 81	10 06 45 96	6	42
59 21	Handschuhe Erw. S/M, Kind M/L (ab 10 Jahre)	10 05 79 98	10 06 46 10	6	42
59 23	Handschuhe Kind S (ca. 5-9 Jahre)	10 05 80 12	10 06 46 56	6	42
59 22	Handschuhe Kind XS (bis ca. 4 Jahre)	10 05 80 06	10 06 46 33	6	42
99 20 07	Langärmeliges Shirt mit integrierten Fäustlingen 6-24 Monate	10 05 80 29	10 06 46 62	6	30
99 20 08	Langärmeliges Shirt 2-5 Jahre	10 05 80 35	10 06 46 79	6	30
99 20 09	Langärmeliges Shirt 5-8 Jahre	10 05 80 41	10 06 47 16	6	30
99 20 10	Langärmeliges Shirt 8-11 Jahre	10 05 80 58	10 06 47 22	6	30
99 20 11	Langärmeliges Shirt 11-14 Jahre	10 05 80 64	10 06 47 39	6	30
99 20 12	Strumpfhose 6-24 Monate	10 05 80 70	10 06 47 45	6	30
99 20 13	Leggings 2-5 Jahre	10 05 80 87	10 06 47 51	6	30
99 20 14	Leggings 5-8 Jahre	10 05 80 93	10 06 47 74	6	30
99 20 15	Leggings 8-11 Jahre	10 05 81 01	10 06 47 80	6	30
99 20 16	Leggings 11-14 Jahre	10 05 81 18	10 06 48 05	6	30
99 20 17	Socken Einheitsgrößen 2-14 Jahre	10 05 81 24	10 06 48 28	6	42



Größentabelle

Alter	Körper- größe cm	Innenbein- länge cm	Armlänge cm
6-24 Monate	74 - 86	38 - 34	25-29,5
2-5 Jahre	86 - 110	34 - 47	29,5-35,5
5-8 Jahre	110 - 128	47 - 58	35,5-42
8-11 Jahre	128 - 146	58 - 68	42-49
11-14 Jahre	146 - 164	68 - 77	49-57,5

REFERENZEN: 1. Page B (2005) The Benefits of Tubifast Garments in the management of atopic eczema. British Journal of Nursing 14 (5); 289-92. 2. Cork MJ, Complete Emollient Therapy. The National Association of Fundholding Practices Official Yearbook. BPC Waterlow, Dunstable 1998: 159-168

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Die Namen Mölnlycke Health Care, Tubifast® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2019 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DWC0050

