



Pukemisohje: kasvonsuoja korvalenkeillä

- A. Työnnä sormesi korvalenkkien läpi. Nenävahvike tulee ylöspäin. Aseta kasvonsuoja nenän ja suun päälle.
- B. Aseta korvalenkit korvien ympärille. Vedä kasvonsuojaa ylhäältä ja alhaalta avataksesi sen kokonaan. Näin peität kasvot maksimaalisesti ja minimoit kerrokset, joiden läpi hengität.
- C. Muotoile nenävahvike nenän muotoiseksi.
- D. Korvat ja hiukset on peitettävä sopivalla päähineellä hiusten ja

muiden hiukkasten leviämisen estämiseksi. Jos on olemassa riski altistua nesteroiskeille, varmista, että valitset roiskekestävän kirurgisen kasvonsuojan. Vaihda kasvonsuoja kun se on kontaminoitunut, sekä leikkausten välissä.

- E. Hävitä kasvonsuoja käytön jälkeen.

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.
Mölnlycke ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1112005


Mölnlycke®