


Gelující absorpční krytí z hydrovlákna

- Vysoká retence zabraňuje úniku tekutiny a maceraci
- Vysoká pevnost v tahu pro snadné odstranění krytí v jednom kuse
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krev a bakterie
- Vysoce savé krytí i pod kompresí
- Měkké a přizpůsobivé krytí pro snadné použití

Vysoká retenční schopnost


- Zabraňuje úniku tekutiny
- Zabraňuje maceraci
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krev a bakterie

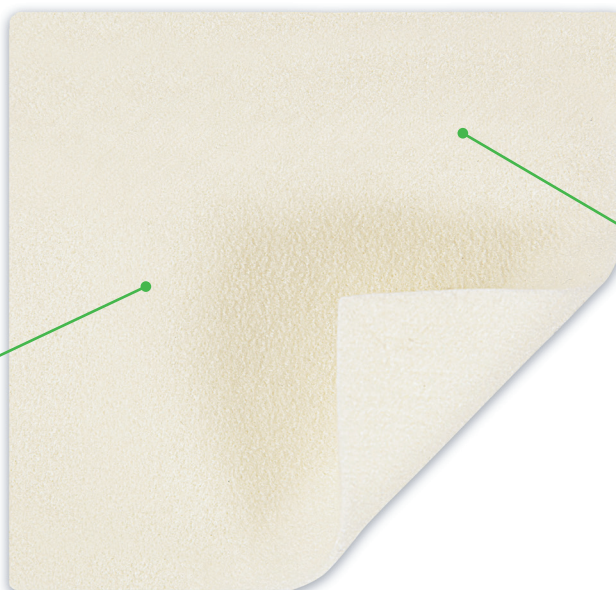


Hydrovlákno

- Vysoká pevnost vláken v tahu
- Možnost odstranění v jednom kuse
- Šetří čas ošetrovatelskému personálu a zvyšuje komfort pacienta

Jak používat Exufiber

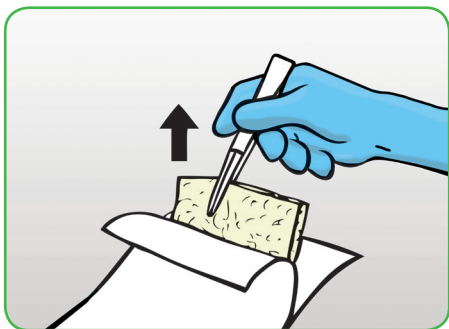


1. Očistěte ránu fyziologickým roztokem nebo vodou. Důkladně osušte okolní kůži.

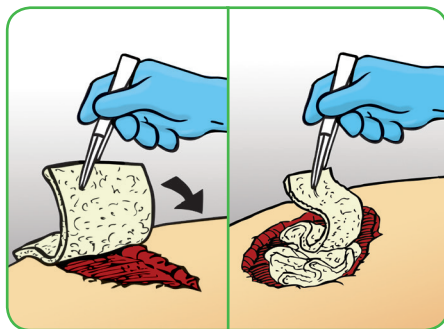

2. Aplikujte Exufiber na ránu.

2. Tamponádu vložte volně do rány, aby měla prostor k absorpci exsudátu

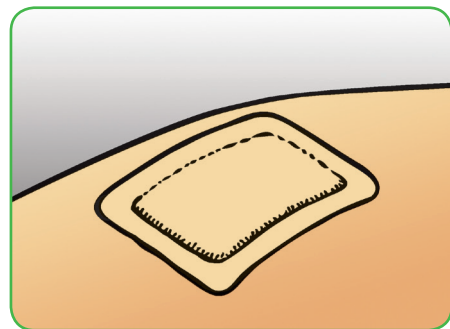

3. Zafixujte nebo překryjte vhodným sekundárním krytím. Může být použito i adhezivní krytí. Exufiber je možné použít i v kombinaci s kompresní terapií.

Jak Exufiber funguje

Exufiber je sterilní netkané krytí vyrobené z vysoce savých vláken polyvinylalkoholu. Při styku s exsudátem z rány se Exufiber mění v gel, který přispívá k vytváření vlhkého prostředí v ráně a snadnému odstranění při převazech. Exufiber absorbuje a a uzamkne exsudát z rány. je k dispozici jak v plošném provedení tak ve formě provazců do dutin.

Výhody Exufiber

- Vysoká pevnost v tahu pro snadné odstranění v jednom kuse při převazech
- Vysoká retenční kapacita jako prevence prosáknutí exsudátu a následné macerace
- Absorbuje a uzamkne exsudát, krev a bakterie
- Vysoce absorpční i pod kompresní terapií
- Měkké a přizpůsobivé krytí pro snadné použití
- Může být ponechán na místě po dobu až 7 dnů a až 14 dnů v případě odběrových ploch

UPOZORNĚNÍ

Všechny rány je třeba kontrolovat. V případě klinických známek infekce se poraďte se svým ošetřujícím lékařem o nejvhodnějším postupu.

Exufiber není vhodný pro suché rány či hluboké popáleniny.

V případě, že krytí vyschne a je obtížné jej při převazu odstranit, navlhčete jej v souladu s místními postupy (např. fyziologický roztok, sterilní voda) a nechte odmočit dokud se nedá snadno nadzvednout. Přeměna Exufiberu v gel může trvat několik minut. Krytí pak jemně odstraňte.

Použití

Exufiber je určen na širokou škálu exsudujících ran:

- Bércové vředy a vředy spojené s diabetickou nohou
- Dekubity
- Popáleniny II.stupně
- Chirurgické rány
- Odběrové plochy
- Maligní rány
- Kožní léze a jiné traumatické rány

Platí pro plošné krytí i krytí určené do dutin.



Přehled velikostí Exufiber (sterilní balení)

Číslo výrobku	Velikost v cm	ks v balení	ks v kartónu
603300	5x5	10	40
603301	10x10	10	60
603302	15x15	10	60
603303	20x30	5	20
603304	2x50	5	20

Více naleznete na www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 13000 Praha 3, telefon +420 221 890 517

Loga a názvy Mölnlycke Health Care a Exufiber® jsou registrované známky jedné nebo více společností Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2014 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena.