


Melgisorb® Plus

Absorpční alginátové krytí

Melgisorb® Plus je vysoce absorpční krytí pro široké spektrum středně až silně secernujících ran.

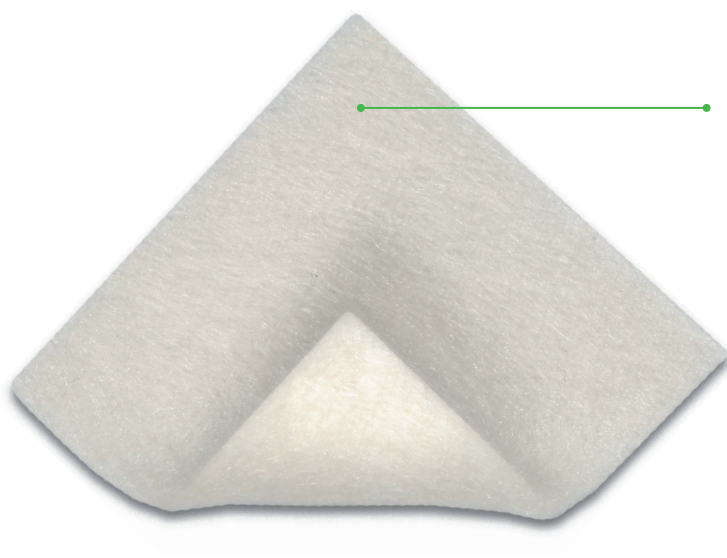


Hydrofilní alginátová vlákna


Měkké sterilní krytí vyrobené z alginátových vláken

- Vynikající absorpce - pro silně secernující rány
- Vysoká pevnost za vlhka - umožňuje odstranění v jednom kuse
- Vysoká schopnost retence tekutin - minimalizuje riziko macerace

Jak používat Melgisorb® Plus:

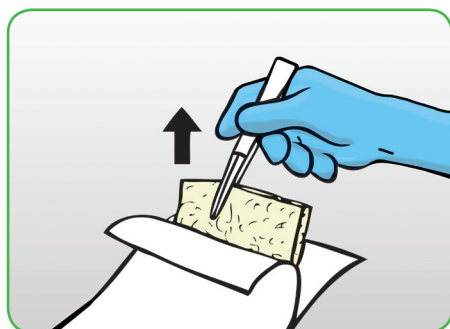


1. Vyberte vhodnou velikost Melgisorb® Plus (mírně větší než je velikost rány)

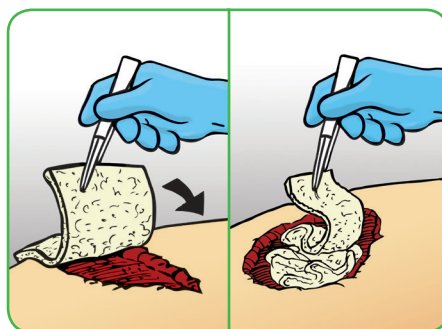

2. Přiložte suchý Melgisorb® Plus na vlhkou spodinu rány.

Povrchové rány: Vyberte správnou velikost krytí abyste mohli pokrýt celou plochu rány.

Hluboké rány a dutiny: Odstříhnete vhodný kus krytí určeného do dutin a volně ránu vyplňte.

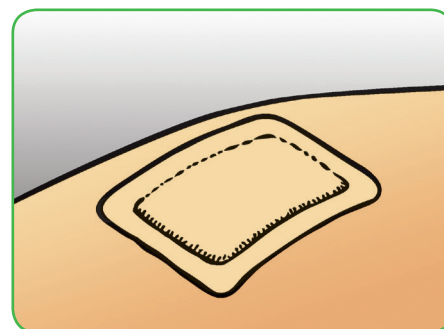

3. Zakryjte a zajistěte Melgisorb® Plus vhodným sekundárním krytím, např. Mepilex® Border.

Možno použít i kompresní terapii.

Jak Melgisorb® Plus funguje

Melgisorb® Plus absorbuje velké množství exsudátu. Po jeho absorbování se alginátová vlákna změni v měkký gel, který v ráně zajistí vlhké prostředí. Gel lze poté snadno vypláchnout fyziologickým roztokem.

Výhody Melgisorb® Plus

- Vysoká absorpce
- Po zgelovatění nepřilne do lůžka
- Vhodný i do hlubokých ran a píštělí
- Při styku s exsudátem vytváří gel
- Měkký/ohebný/komfortní
- Může být zastřižen do požadovaného tvaru
- Nedráždí

Upozornění

Melgisorb® Plus není určen pro suché rány, popáleniny III. stupně či chirurgické implantáty.

V případě známek infekce postupujte v souladu s místními doporučeními.

V případě opakovaného použití mohou být vlastnosti výrobku zhoršeny, případně hrozí riziko kontaminace.

Doporučené použití

Melgisorb® Plus je doporučen pro široké spektrum středně až silně secernujících ran jako jsou:

- Dekubity
- Bércové vředy
- Diabetické ulcerace
- Odběrové plochy
- Pooperační rány
- Kožní léze a další traumatické rány

K dispozici jak pro povrchové tak hluboké rány.

Přehled velikostí Melgisorb® Plus

Číslo výrobku	Velikost v cm	Ks v balení	Ks v kartonu
252000	5 x 5	10	100
252200	10 x 10	10	100
252500	10 x 20	10	100
253500	3 x 45	5	50



Více na www.molnycke.com

Molnycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3, Tel: +420 221 890 517.

The Molnycke Health Care, Mepilex® Border symbol a název jsou registrované obchodní značky společnosti Molnycke Health Care.

