


# Melgisorb® Ag

## VYSOCE ABSORPČNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ ALGINÁTOVÉ KRYTÍ

- Absorbuje až o 45% více než nejpoužívanější krytí se stříbrem vyrobené z hydrovlákna
- Vysoká síla vláken dovoluje jeho odstranění bez zanechání zbytků v ráně
- Rychlý a trvalý antimikrobiální efekt

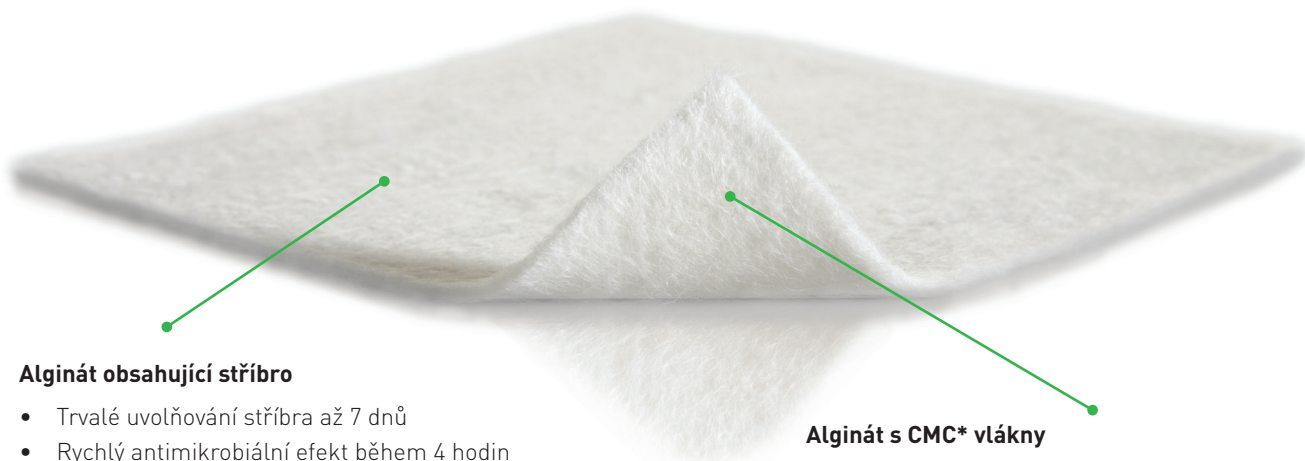

### Alginát obsahující stříbro


- Trvalé uvolňování stříbra až 7 dnů
- Rychlý antimikrobiální efekt během 4 hodin
- Trvalý antimikrobiální efekt až po dobu 4 dnů

### Alginát s CMC\* vlákny


- Vynikající absorpce – pro velmi exsudující rány
- Velká pevnost za vlhka – umožňuje odstranění v jednom kuse
- Nasává ze stran – zamezuje vzniku macerace

\*carboxymethylcellulose


## Jak Melgisorb Ag použít

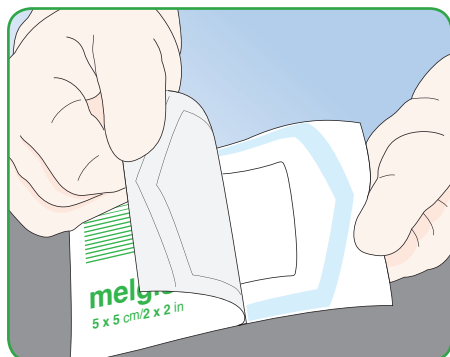

Vyčistěte a propláchněte ránu podle standardních postupů. Vyberte velikost Melgisorbu Ag, která je o něco méně větší než velikost rány. Vystříhnete nebo složte krytí tak, aby vyplnilo ránu.

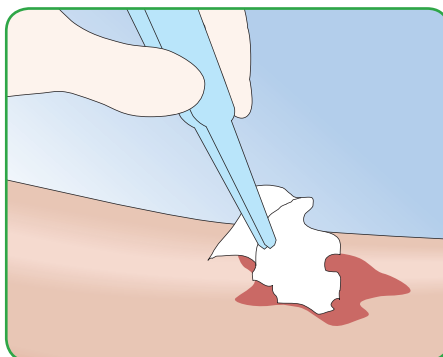

Volně vyplňte hluboké rány, ujistěte se, že krytí nepřekrývá okraje rány. Aplikujte přímo do lůžka rány.

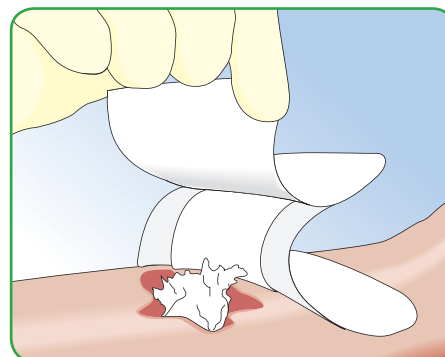

Překryjte a zajistěte Melgisorb Ag sekundárním krytím.

## Oblasti použití

Melgisorb Ag je indikován pro středně až vysoce exsudující povrchové a hluboké rány jako např.:

- po-operační rány
- traumatické rány (kožní léze, traumatické poranění, řezné rány)
- bércové vředy
- dekubity
- diabetické vředy
- štěpy a odběrové plochy

Produkt může být také použit pod kompresní bandáží. Protože výrobek obsahuje algináty, může být použit pro kontrolu krvácení u povrchových ran. Melgisorb Ag je vhodný na rány kriticky kolonizované, pod lékařským dohledem. Melgisorb Ag je určen pouze pro zevní použití.



## Poznámka

Frekvence výměny krytí závisí na stavu rány a úrovni exsudátu. Z počátku může být nutné měnit krytí každých 24 hodin. Pokud je rána příliš suchá, navlhčete krytí fyziologickým roztokem před odstraněním alginátu z rány. Jemně odstraňte krytí z lůžka rány. Před aplikací nového krytí, propláchněte oblast rány podle standardních postupů.

## Kontraindikace

Melgisorb Ag není indikován pro použití v následujících případech:

- osoby s přecitlivostí na algináty nebo stříbra
- chirurgické implantace
- kontrola těžkého krvácení
- přímé použití na suché nebo málo exsudující rány

## Upozornění

- Systémová antimikrobiální terapie musí být brána v úvahu v případě infekce v ráně. Melgisorb Ag může být pod lékařským dohledem použit společně se systémovými antibiotiky.
- Krytí se může přilepit do rány, jestliže je použito na suché nebo velmi lehce exsudující rány. V případě, že krytí nelze z rány lehce odstranit, navlhčete je fyziologickým roztokem před jeho odstraněním.
- Účinek krytí může být ovlivněn nadměrným použitím mastí obsahující vazelínu.

## PŘEHLED VELIKOSTÍ VÝROBKU MELGISORB AG

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost cm	Ks v balení	Ks v kartonu
0081959	256055	5 x 5	10	100
0081960	256105	10 x 10	10	100
0081961	256155	15 x 15	10	100
	256205	20 x 30	5	50
0081962	256605	3 x 44	10	100

Mölnlycke Health Care, s.r.o.  
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3  
Tel. +420 221 890 517  
Fax +420 224 817 582  
www.molnlycke.com

Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care nebo značky, o jejichž registraci již firma zažádala.

