


Mepitel® Film

Filmové krytí k ochraně kůže


- Mepitel® Film je jemné transparentní prodyšné krytí určené pro ochranu pokožky. Může být použito samostatně či v kombinaci s jinými výrobky.
- Mepitel® Film minimalizuje bolest a trauma při převazech^{1,2,3,4,5,6}
- Aplikací systém Mepitelu Film je navržen pro maximálně snadné použití.

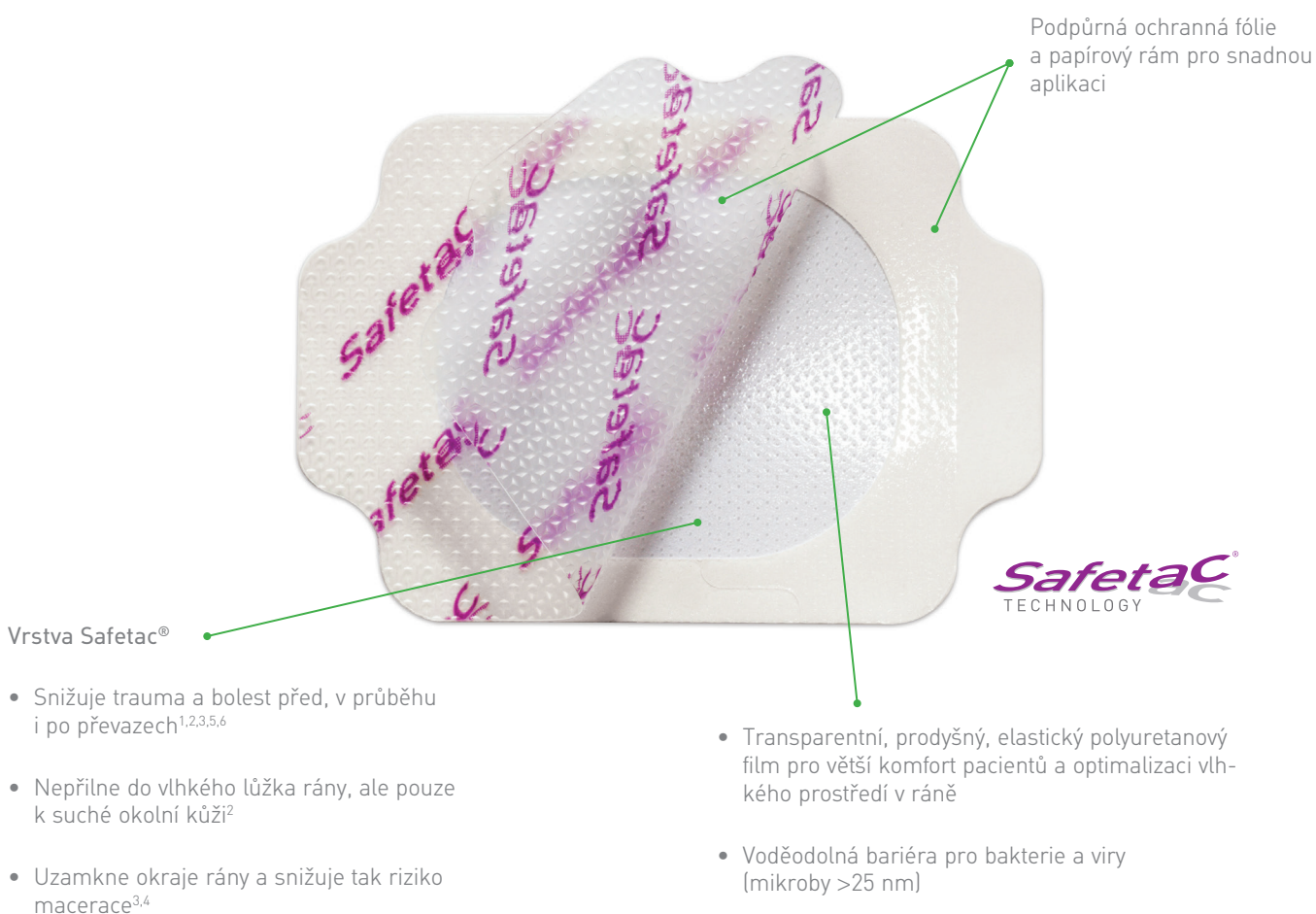


Safetac® technologie

Safetac® unikátní patentovaná adhezivní technologie, která minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně. Technologie Safetac je dostupná výhradně u krytí společnosti Mölnlycke Health Care, včetně Mepilex Border, Mepilex, Mepitel a Mepiform.

Pro více informací navštivte www.safetac.com

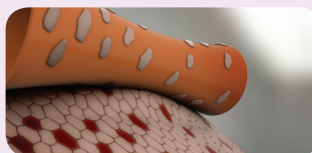

Tradiční lepidlo - dochází k bolestivému strhávání kožních buněk.

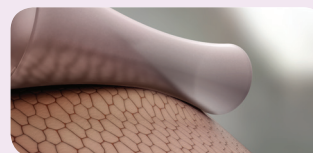

Safetac jemně přilne k pokožce a uzamkne okraje rány.

Jak používat Mepitel® Film:



Důkladně osušte kůži.
Odstraňte ochrannou fólii (s potiskem Safetac®) aby se odkryla adhezivní strana.



Umístěte krytí na zvolené místo. Mepitel® Film je možné upravovat/přemisťovat tak dlouho, dokud je papírový rám neporušený. Poté odstraňte papírový rám. Krytí při aplikaci nenapínejte.

Pro lepší výsledky a bezpečnou fixaci aplikujte Mepitel® Film s přesahem alespoň 1-2 cm na okolní kůži pro velikosti do 10x12 cm a s přesahem 5 cm pro větší velikosti.



Krytí na kůži důkladně vyhladďte. Mepitel® Film může být odstraněn aniž by docházelo k bolestivému strhávání kožních buněk.

Jak Mepitel® Film funguje

Mepitel® Film poskytuje flexibilní, transparentní krytí kůže a rány a poskytuje ochranu před bakteriální či jinou kontaminací, průnikem tekutin a zároveň se přizpůsobuje všem tvarům a nepravidelnostem těla. Mepitel® Film udržuje vlhké prostředí v ráně. Přesto umožňuje odvod vodních par a nadbytečné vlhkosti z pokožky. Díky vrstvě Safetac® umožňuje Mepitel® Film okamžitou adhezi a výbornou fixaci bez vyvíjení zbytečného tlaku na pokožku. Vrstva Safetac® také zajišťuje atraumatické a bezbolestné převazy. Mepitel® Film při odstraňování nezanechává zbytky a úroveň adheze zůstává v průběhu času stejná a nezvyšuje se.

Výhody

- Minimalizuje bolest a trauma rány
- Zmenšuje riziko poškození nově vytvořené pokožky
- Transparentní pro snadnou kontrolu
- Velmi dobře se přizpůsobí tvarům těla a zajišťuje pacientům komfort během nošení
- Bariéra pro viry a bakterie (větší než 25 nm)
- Vemí nízký potenciál pro podráždění pokožky a alergie
- Nezanechává zbytky
- Voděodolný

Oblasti použití

Mepitel® Film je určen pro širokou škálu povrchových ran jako jsou dekubity I. a II. stupně, povrchové popáleniny a odřeniny. Chrání křehkou a citlivou pokožku. Mepitel® Film může být též použit jako ochranný krytí u otevřených břišních operací. Fixuje primární krytí jako sekundární fixace a může být použit v kombinaci s gely či emoliencii.

Přehled velikostí Mepitel® Film

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost v cm	Ks v balení	Ks v kartonu
0169917	296170	6 × 7	10	50
0169918	296270	10 × 12	10	70
0169897	296470	10 × 25	10	50
0169898	296670	15 × 20	10	70

REFERENCE: **1.** White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. **2.** White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005. **3.** Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003. **4.** Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. WJWHS congress, Canada 2008. **5.** Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001. **6.** Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.

www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel: +420 221 890 517. Název a logo Mölnlycke Health Care, Safetac® a Mepitel® Film jsou registrované ochranné známky Mölnlycke Health Care AB.

Frekvence výměny

Mepitel® Film může být ponechán na ráně několik dnů v závislosti na stavu kůže či rány.

Upozornění

- Mepitel® Film není kontaktní vrstva na ránu a neumožňuje odvod exsudátu do sekundárního krytí
- V případě použití více kusů a jejich překrytí přes sebe, se snižuje schopnost odvodu par a může dojít ke zvýšení vlhkosti, která nemůže být odváděna.

Varování

Mepitel® Film nemůže být používán k primární fixaci kanyl, i.v. vstupů, infuzí a jiných přístrojů zajišťujících životní funkce.

