


Mextra® Superabsorbent

Superabsorpční krytí s tekutinu odpuzujícím podkladem

Unikátní 4 vrstvy krytí Mextra Superabsorbent jsou sestaveny přesně tak, aby poskytovaly optimální zvládnutí exsudátu. Právě schopnost zvládnout exsudát, která podporuje úspěšné hojení, je tou klíčovou výhodou pro vás a vaše pacienty.

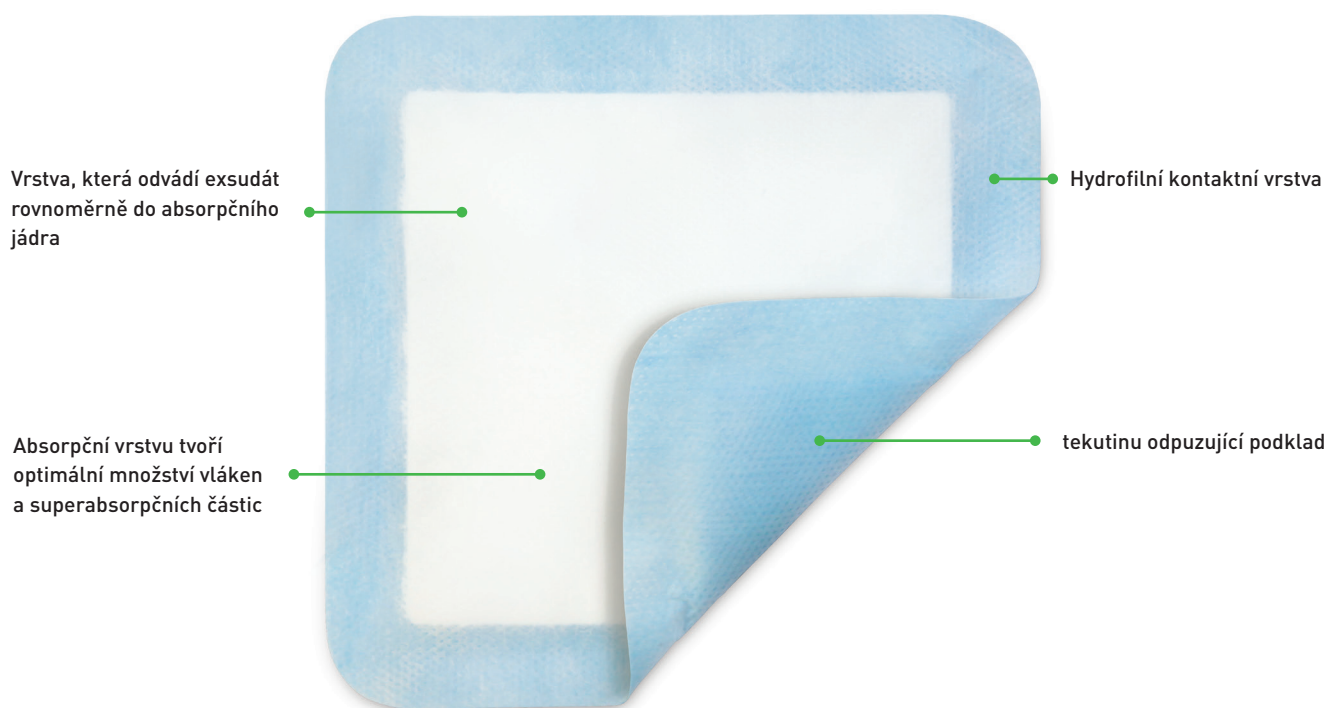


Oblasti použití

Krytí Mextra Superabsorbent je určeno pro použití na středně až silně exsudující rány. Absorbuje exsudát přes kontaktní vrstvu, zadrží jej uvnitř v jádře ve formě gelu a minimalizuje tak riziko macerace. Tekutinu odpuzující svrchní vrstva z netkané textilie působí jako bariéra a zabraňuje prosáknutí exsudátu.


Četnost výměny

Krytí Mextra Superabsorbent může být ponecháno na místě několik dní. Mělo by být měněno podle klinického stavu rány nebo pokud je naplněna jeho kapacita.


Jak používat Mextra Superabsorbent

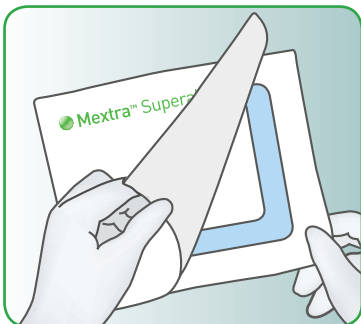

Očistěte ránu a vyberte odpovídající velikost krytí Mextra Superabsorbent.

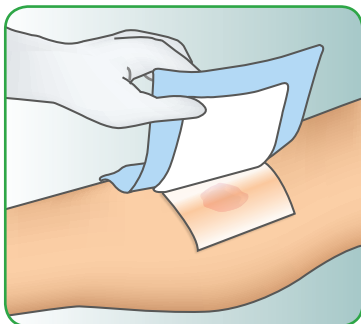

Přiložte Mextra Superabsorbent bílou stranou krytí přímo na ránu. Pro lepší výsledek by měl okraj absorpčního polštářku přesovat minimálně 2 cm okraje rány. Mextra Superabsorbent je možné použít také ve spojení se silikonovým krytím Mepitel nebo Mepitel One.

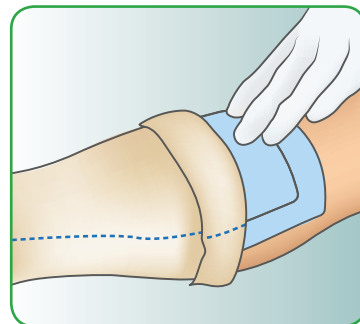

Zajistěte krytí Mextra Superabsorbent vhodnou fixací, např. hadicovým obinadlem Tubifast. V případě potřeby může být také použito pod kompresní bandáž.

Hlavní výhody Mextra Superabsorbent

- Skvělé absorpční a retenční vlastnosti
- Minimalizace rizika macerace a prosáku exsudátu
- Zachovává celistvost a po absorbování exsudátu se nezvětšuje
- Chrání před únikem exsudátu
- Svrchní vrstva zůstává suchá
- Komfortní pro pacienty
- Použitelné pod kompresní bandáže



Přehled sortimentu

Číslo výrobku	Article	Kód VZP	Velikost cm	Počet kusů v balení/kartonu
610000	Mextra Superabsorbent	0169435	10 x 10	10/50
610100	Mextra Superabsorbent		10 x 15	10/40
610200	Mextra Superabsorbent		10 x 20	10/90
610300	Mextra Superabsorbent		15 x 20	10/40
610400	Mextra Superabsorbent		20 x 25	10/40

Mölnlycke Health Care s.r.o.
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3
Tel. +420 221 890 517
Fax +420 224 817 582
www.molnlycke.com



Název a logo Mextra Superabsorbent jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care.