

BARRIER®

Kardiovaskulært sæt



- Ugennemtrængeligt materiale for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion
- Slidslagen med perineal afdækning
- Procedurespecifik afdækning til thoraxkirurgi med integreret incisionsfilm
- Integrerede instrumentposer/ væskeopsamlingsposer og høj absorption skaber et tørt arbejdsområde
- Komfortlag mod patienten

Draperingsvejledning



1. Du kan starte draperingen med en bordafdækning under patientens ben. Placér den nedre, vaskulære afdækning under patientens ben. Fold den ud og afdæk patienten.



2. Fiksér den integrerede genitalafdækning.



3. Dæk patientens ben med fodafdækningerne.



4. Afdækning med klæb, 75x75 cm, kan bruges som ekstra beskyttelse for halsområdet. Fjern beskyttelsespapiret fra den kardiovaskulære afdækning.



5. Placér afdækningen centreret på patientens bryst. Fold afdækningens sider ud.




6. Fold KUN den første fold af den nedre del af thoraxafdækningen ud. Fold den øverste del af afdækningen ud over anæstesiøjlen. Tapen kan fikses på anæstesisiden.



7. Efter kirurgisk udvidelse af venegraften, foldes den resterende nedre del af thoraxafdækningen ud.



8. Fiksér de separate slangeholdere og defibrillator posen for at afslutte draperingen.

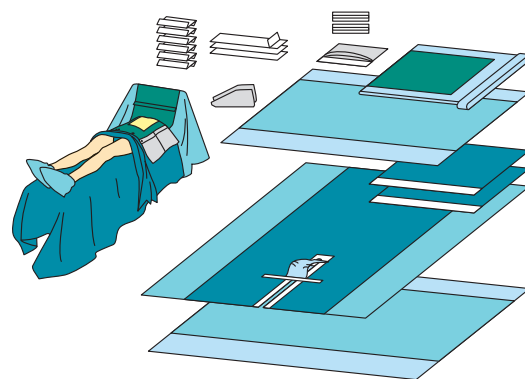

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
694640	Kardiovaskulært sæt:		3/6
	1 Forstærket assistancebordspose	79 x 145	
	6 Papirhåndklæder	18 x 25	
	1 Bordafdækning	150 x 190	
	1 Defibrillator pose	33 x 38	
	2 Slangeholder, velcro	2,5 x 30	
	3 OP-tape	9 x 49	
	2 Fodafdækning, grøn	36 x 28	
	2 Fodafdækning, transparent	36 x 28	
	2 Afdækninger m. klæb	75 x 75	
	1 Slidslagen med perineal afdækning 20 x 102 cm	200 x 260	
	1 Thoraxafdækning, incisionsfilm 32 x 40 cm	200/300 x 330	
	1 Bordafdækning	150 x 240	

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str (cm)
988795	Slidslagen med perineal afdækning 20 x 102 cm	200 x 260
966946	Thoraxafdækning, incisionsfilm 32 x 40 cm	200/300 x 330

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0922007

Mölnlycke®