


BARRIER® Laparoskopifaldækning abdo-perineal

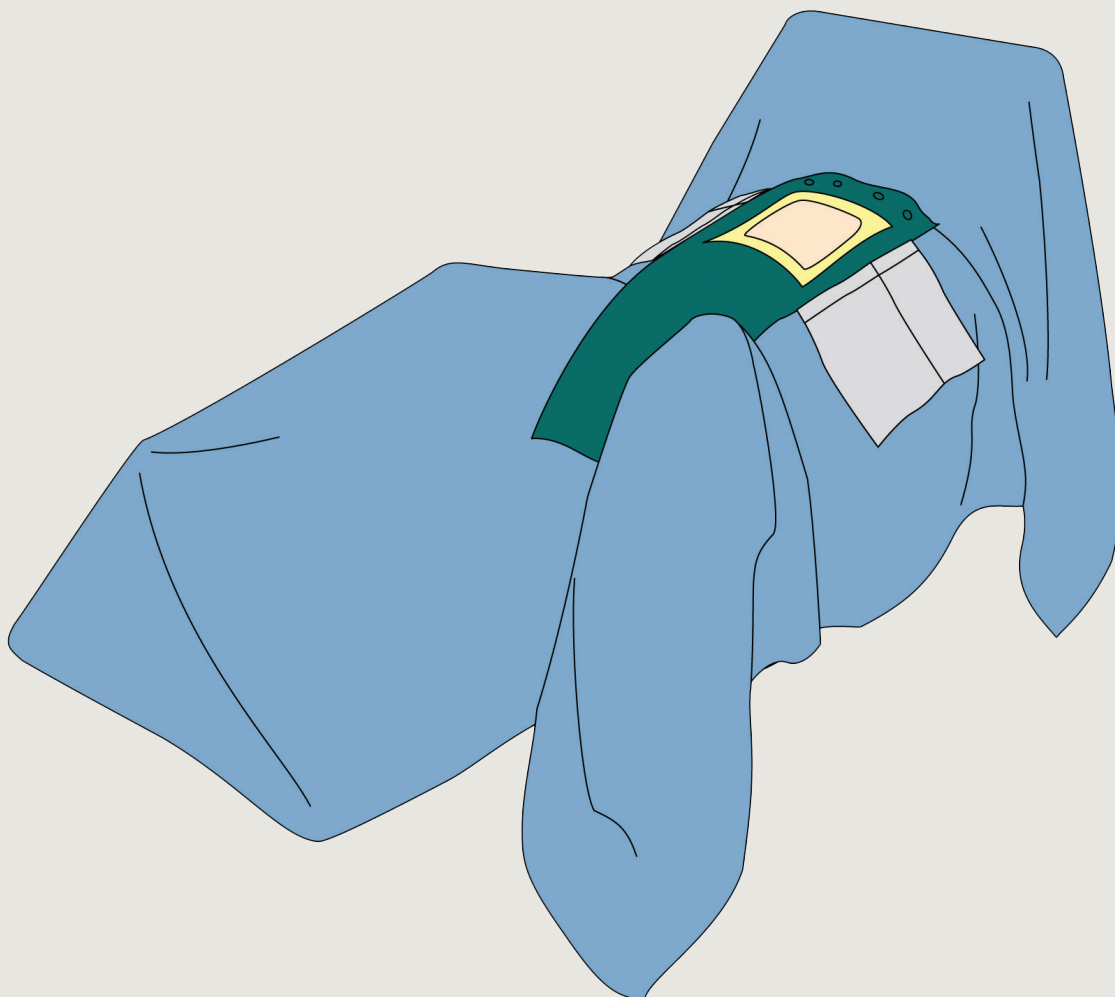

- Alt-i-en design med relevante, integrerede egenskaber
 - enkel og effektiv drapering for én person
 - sparer tid
 - reducerer risikoen for kontaminering
- BARRIER® Flex fleksible klæbekanter opretholder en sikker forsegling når abdomen inflateres
- Integrerede instrumentposer og slangeholdere for at skabe et organiseret arbejdsområde
- Dybe poser specifikt designet til laparoskopiske instrumenter
- Integreret tape gør det muligt at tilpasse benposernes længde
- Perinealt hul med integreret afdækning
- Uigennemtrængelig for at forebygge væskegennemtrængning og hjælpe med at beskytte mod infektion

Draperingsvejledning



1. For at starte drapering, kan du bruge afdækningen med klæb under patientens bagdel.



2. Bemærk piktogrammets retning på laparoskopiafdækningen. Fjern beskyttelsespapiret.



3. Placér afdækningen centreret på patienten. Fold ud mod dig selv og derefter væk fra dig selv.



4. Bemærk piktogrammet på foden. Tag benposens hjørne og fold den ud over benet. Gentag for det andet ben.



5. Fold afdækningen helt ud over anæstesiøjlen.





6. Placér perineal afdækningen over genitalområdet. Vær opmærksom på at fastgøre klæben helt på patienten og fjern papiret.



7. Draperingen er nu afsluttet.

Varenr.	Beskrivelse	Str. (cm)	Pakning
694240	4 Papirhåndklæder 1 OP-tape 1 Slangeholder, klæb/velcro 1 Afdækning med klæb 1 Laparoskopiafdækning, hul med kæb 25 x 30 cm og hul 13 x 24 cm 1 Bordafdækning, abs. område 75 x 190 cm	18 x 25 9 x 49 2,5 x 30 75 x 75 250/175/270 x 260 150 x 190	5/10
694241	1 Assistancebordspose, abs. område 65 x 85 cm 4 Papirhåndklæder 1 OP-tape 1 Slangeholder, klæb/velcro 1 Afdækning med klæb 1 Laparoskopiafdækning, hul med kæb 25 x 30 cm og hul 13 x 24 cm 1 Bordafdækning, abs. område 75 x 190 cm	79 x 145 18 x 25 9 x 49 2,5 x 30 75 x 75 250/175/270 x 260 150 x 190	5/10

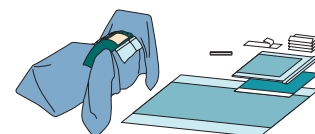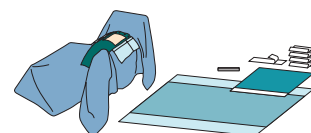

Alt specificeret sætindhold kan også inkluderes i Mölnlycke® procedurepakker.

Varenr.	Mölnlycke® procedurepakke komponent	Str. (cm)
944200	Laparoskopiafdækning, hul med kæb 25 x 30 cm og hul 13 x 24 cm	250/175/270 x 260
944210	Laparoskopiafdækning, hul med kæb 25 x 30 cm og hul 13 x 24 cm	300/200/270 x 295

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0862006


Mölnlycke®