

Udpakning af Biogel® handskepakninger

'Lægge teknik'

Der findes forskellige, grundlæggende teknikker til udpakning af sterile operationshandsker. Der er flere grunde til, at udpakningsteknikkerne varierer:

- enkelt- eller dobbeltpakkede handsker
- pakningens udformning og foldning
- de forskellige materialer, der anvendes til både inder- og yderpakning
- den teknik, der bruges ved påtagning af handskerne (åben eller lukket påtagning, med manchetten i hænderne eller fremme)¹.

Sørg for at yderemballagens kanter ikke kommer i kontakt med inderemballagen, samt at inderemballagen ikke rører den svejste kant på yderemballagens indre kanter. Dette gøres for at sikre inderemballagens/-emballagernes sterilitet.

Åbning af pakken (udført af en usteril person)



1. Tag fat i pakningens øverste, korte side. Undersøg pakningen, og ryst den om nødvendigt let for at sikre, at inderemballagen ligger midt i pakningen for at undgå, at inderemballagen falder ud på den svejste kant, når yderemballagen åbnes.



2. Træk inder-embalagens sider fra hinanden. Start med det øvre hjørne længst væk fra dig selv. Fortsæt med det øvre hjørne tættest på dig.



3. Tag godt fat med begge hænder på hver side af pakningen, så yderemballagens lange sider kan trækkes lidt fra hinanden.



4. Nu kan pakningen med handskerne enten lægges på et bord og åbnes der, eller åbnes, mens man holder den frem for sig som på billede 3.



5. Tag fat i både handskepakning 1 og 2 i Indicator-handskesystemet i den nederste ende for at sikre, at hænderne ikke bliver kontaminerede, da den sterile kant i pakningens top er ret kort.



6. Adskil de to pakninger og læg dem ned hver for sig på et rent og tørt sted. Sørg for, at ca. 5 cm. af pakningens nederste ende er fri af bordet, så der kan tages fat i den, og inderemballagen kan pakkes op uden risiko for kontaminering af de desinficerede hænder.



7. Åbn de to inderemballager helt, så det ikke bliver nødvendigt at røre papirembalagen igen. Sørg for, at dine desinficerede hænder ikke kontamineres. Tag handskerne på som anbefalet¹.

Reference: 1 Folin A. Påtagning af indicator dobbelthandske systemer. En Sikker Hånd 1/2010. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf: 48 168 268. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Biogel varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0051901


Mölnlycke®