



Sådan bæres en
BARRIER® filtrerende
halvmaske

Påtagning af Barrier® filtrerende halvmaske



1. Adskil maskens øverste og nederste kanter.



2. Sæt masken over dine kinder og træk hovedbåndene over hovedet.



3. Placér det øverste bånd over ørerne og det nederste bånd under ørerne og den nederste del af nakken.




4. Tilpas næseklemmen over næsen med begge hænder og sørg for at skabe en sikker forsegling mod ansigtet. Tilpas begge maskepaneler for en komfortabel og sikker pasform. Udfør bruger forseglingskontrol (se nedenfor) og tilpas masken om nødvendigt.

Aftagning af Barrier® filtrerende halvmaske



1. Tag fat om hovedbåndene og træk dem over dit hoved.

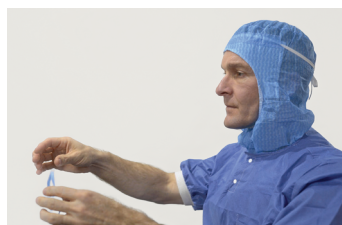

2. Smid masken væk med det samme mens du holder masken væk fra kroppen og kun holder i hovedbåndene. Desinficér dine hænder.

Bruger forseglingskontrol

Forseglingskontrollen bør gennemføres hver gang en ny filtrerende halvmaske tages på. Ånd hårdt ud mens du har masken på. Hvis du føler luft komme ud rundt om næsen eller langs kinden, skal næseklemmen justeres, så den passer til ansigtets form. Hvis der kommer luft ud nær maskens kanter, kan du prøve at trække båndene tilbage eller tilpasse masken for bedre pasform. Hvis ikke masken sidder korrekt, BØR DU IKKE gå ind i arbejdsområdet.

Hvis luft kommer ud rundt om næsen

Brug begge hænder for at tilpasse næsestykket ved at placere dine fingerspidser på toppen af metalnæseklemmen. Træk dine fingerspidser ned langs begge sider af metalbåndet for at forme næseområdet mere effektivt efter din næse.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og BARRIER varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKSU0852006


Mölnlycke®