


En guide til egenomsorg ved bandageskift

Din sygeplejerske har valgt en Mepilex® Lite bandage til dit sår

Sådan påsætter du Mepilex® Lite bandagen:

1. Vask dine hænder med sæbe og varmt vand i 20 sekunder.
2. Rens såret, som din sygeplejerske har vist dig, og tør den omkringliggende hud grundigt.
3. Bandagen skal overlappe den omkringliggende hud. Hvis sygeplejersken råder dig til det, skal du klippe bandagen til, så den passer til sårets form og placering.


4. Fjern det første beskyttelsespapir.

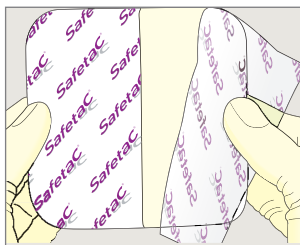

5. Påsæt den klæbende side ind mod såret. Fjern det resterende beskyttelsespapir, og glat bandagen ud på huden. Bandagen må ikke strækkes.



6. Fiksér Mepilex Lite-bandagen f.eks. med en passende forbinding eller tape som anbefalet af din sygeplejerske.

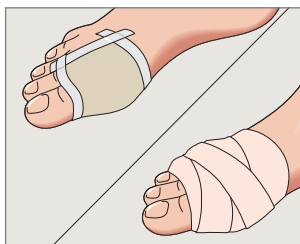

Hvornår skal du skifte bandage:

Din sygeplejerskes råd er at skifte bandagen:

Du kan få yderligere hjælp og vejledning, hvis du kontakter din sygeplejerske:

Husk:

- ✓ Mepilex Lite bandagen er kun til engangsbrug og bør ikke genanvendes.

Mepilex Lite bandagen bør håndteres og påsættes af sundhedspersonale, men hvis der ikke er sundhedspersonale til rådighed, kan du selv eller et familiemedlem være nødt til at klare bandageskiftet. Producenten påtager sig intet ansvar eller forpligtelse i forbindelse med sådanne personers anvendelse af bandagen. Det betyder, at hvis Mepilex Lite påsættes af en person, der ikke er en sundhedsperson, så er det alene på brugerens egen risiko.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. E-mail: info.dk@molnlycke.com. Molnlycke og Mepilex varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Molnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0412007