

En guide til egenomsorg ved bandageskift

Din sygeplejerske har valgt en Mextra® Superabsorbent bandage til dit sår.

Sådan påsætter du Mextra® Superabsorbent bandagen:

1. Vask dine hænder med sæbe og varmt vand i 20 sekunder.
2. Hold bandagen på plads som anbefalet af din sygeplejerske.
3. Sæt Mextra Superabsorbent direkte på sårområdet med den hvide side af bandagen på såret. Blå side op!



4. Sårpuden skal overlape den tørre, omkringliggende hud.
5. Fiksér Mextra Superabsorbent bandagen f.eks. med en egnet forbindelse eller tape, som du har fået af sygeplejersken.



Husk:

- ✓ Du må ikke klippe i Mextra Superabsorbent bandagen
- ✓ Mextra bandagen er kun til engangsbrug og bør ikke genanvendes.



Hvornår skal du skifte bandage:

Din sygeplejerskes råd er at skifte bandagen, når:

Du kan få yderligere hjælp og vejledning, hvis du kontakter din sygeplejerske:

Hvis du har adgang til internettet, kan du se en video om, hvordan du påsætter bandagen, ved hjælp af dette link:

<https://www.molnlycke.dk/produkter-loesninger/mextra-superabsorbent/>

Mextra Superabsorbent bandagen bør håndteres og påsættes af sundhedspersonale, men hvis der ikke er sundhedspersonale til rådighed, kan du selv eller et familiemedlem være nødt til at klare bandageskiftet. Mölnlycke Health Care påtager sig intet ansvar eller forpligtelse i forbindelse med sådanne personers anvendelse af bandagen. Det betyder, at hvis Mextra Superabsorbent påsættes af en person, der ikke er en sundhedsperson, så er det alene på brugerens egen risiko.

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: 80 88 68 10. E-mail: info.dk@molnlycke.com.
Mölnlycke og Mextra varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Mölnlycke Health Care-gruppen. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0442007


Mölnlycke®