


Mepore® Film & Pad

Åndbar, transparent selvklæbende og absorberende filmbandage

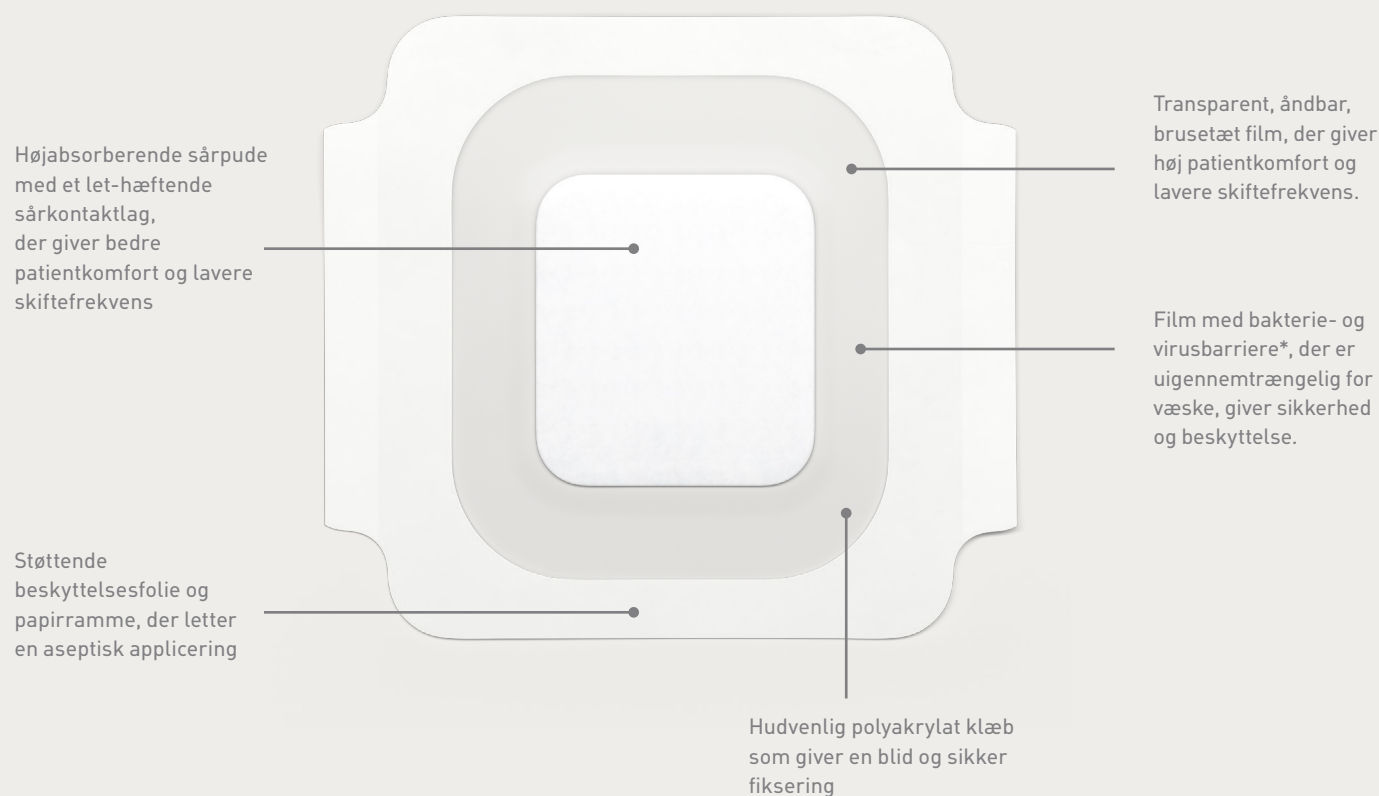

Mepore® Film & Pad er en transparent, selvklæbende og absorberende filmbandage. Appliceringssystemet er designet, så det er enkelt at anvende. Det diskrete design tiltrækker mindre opmærksomhed omkring såret, hvilket får patienten til at føle sig mere bekvem ved at anvende det.

Sådan anvendes Mepore® Film & Pad



1. Fjern beskyttelsesfilmen. Placer bandagen på huden uden at strække den.



2. Fjern papirrammen og de to hvide papirsiderflapper.



3. For at sikre optimal klæb til huden, anbring hånden over bandagen i et par sekunder.

Sådan virker Mepore Film & Pad

Bandagen har en højabsorberende pude og åndbar film, som sikrer en meget god væskehåndtering. Mepore Film & Pad giver en transparent beskyttelse af såret, er fleksibelt og former sig efter overfladiske ujævnheder og kroppens konturer. Den hudvenlige polyakrylat klæb er blid mod huden og sikrer samtidig en sikker fiksering. Mepore Film & Pad bandager er lette at anvende og skifte aseptisk, også ved brug af handsker.

Fordele ved Mepore Film & Pad

- Lethæftende sårkontaktlag
- Høj åndbarhed
- God væskehåndtering
- Let at applicere også med handsker
- Former sig let efter kroppens konturer
- Bakterie- og virusbarriere, der danner en barriere mod lækage
- Blid og sikker fiksering
- Hudvenlig klæb
- Tillader brusebad
- Bredt sortiment

* mikrober større end 25 nm

Anvendelsesområder

Mepore Film & Pad kan anvendes på en række af sår, som har let til moderat væskniveau. Disse omfatter kirurgiske sår, rifter og hudafskrabninger.



Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf. 48168268, info.dk@molnlycke.com
Mölnlycke og Mepore varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0421812

Skiftfrekvens

Skiftfrekvensen afhænger af sårets tilstand.

Bemærk

Mepore Film & Pad bør ikke appliceres på patienter, der er overfølsomme overfor klæbemidler af akryl. Udvis forsigtighed ved fjernelse af produktet for at minimere risikoen for mekanisk skade på huden. Dette gøres ved at tage fat i kanterne og strække bandagen horisontalt. Ved tegn på infektion skal den fortsatte anvendelse af Mepore Film & Pad vurderes af fagpersoner.

Mepore Film & Pad, er pakket sterilt i enkeltpakninger

Varenr.	Str. cm	Sårpude cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
275100	4x5	1,5x2,5	85	340
275200	5x7,0oval	2,5x4	85	340
275300	5x7	2,5x4	85	340
275400	9x10	4,5x5	30	180
275500	9x15	4,5x10	30	240
275600	9x20	4,5x15	30	240
275700	9x25	4,5x20	30	150
275800	9x30	4,5x25	25	125
275900	9x35	4,5x30	25	100

275110	4x5	1,5x2,5	5	70
275210	5x7,0oval	2,5x4	5	70
275310	5x7	2,5x4	5	70
275410	9x10	4,5x5	5	50
275510	9x15	4,5x10	5	50
275610	9x20	4,5x15	5	40