

Mesalt®

Rensende natriumkloridbandage


**Absorberende viskose/
polyester nonwoven**

- Imprægneret med natriumklorid




Mesalt® stimulerer effektivt rensningen af meget væskende og sivende, inficerede sår.


Sådan anvendes Mesalt®

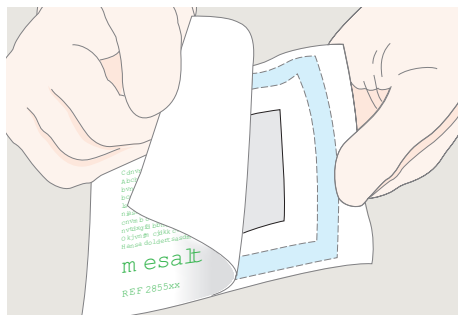

1. Rens såret, og åbn pakningen.

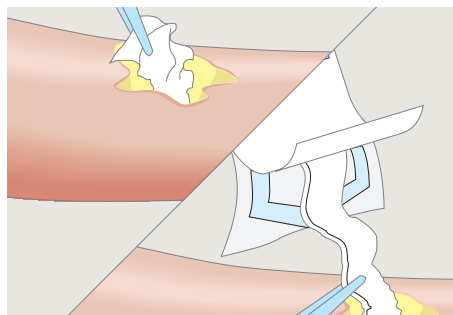

2. Applicér eller pak Mesalt (tørt) løseligt ned i såret.

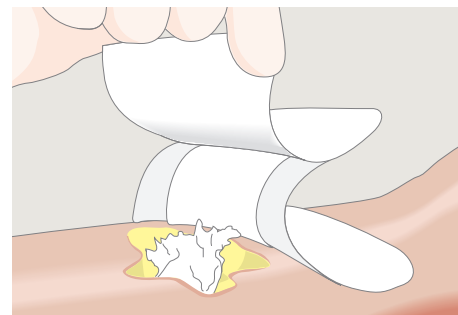

3. Applicér Mepilex® Border som sekundær bandage. Alt efter mængden af ekssudat bør Mesalt skiftes daglig eller oftere, hvis det er nødvendigt.

Sådan virker Mesalt

Sekretionen fra såret udløser natriumkloriden fra bandagen. Mesalt stimulerer effektivt rensning af sår i den inflammatoriske fase ved at absorbere ekssudat, bakterier og nekrotisk materie fra såret, hvorved den naturlige sårhelingsproces fremmes.

Anvendelsesområde

Mesalt er beregnet til håndtering af kraftigt væskende og inficerede sår i den inflammatoriske fase som:

- Tryksår
- Operationssår

Fordele ved Mesalt

- Stimulerer rensning af såret
- Mindsker bakteriebelastningen i såret
- Nem at anvende

Bemærk

Mesalt bør ikke anvendes til tørre sår.



Mesalt er pakket sterilt og i enkelte pakninger

Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
Mesalt			
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	240
Varenr.	Str. cm	Stk/inderkrt.	Stk/trp.krt.
Mesalt® (mesche)			
285280	2 x 100	10	60

Læs mere på www.molnlycke.dk

Mölnlycke Health Care ApS, Tlf + 45 48 168 268, info.dk@molnlycke.com. Mölnlycke, Mesalt og Mepilex varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC0301808