


# Mextra® Superabsorbent


Alsidiq løsning, der bidrager til vellykket behandling af kraftigt væskende sår

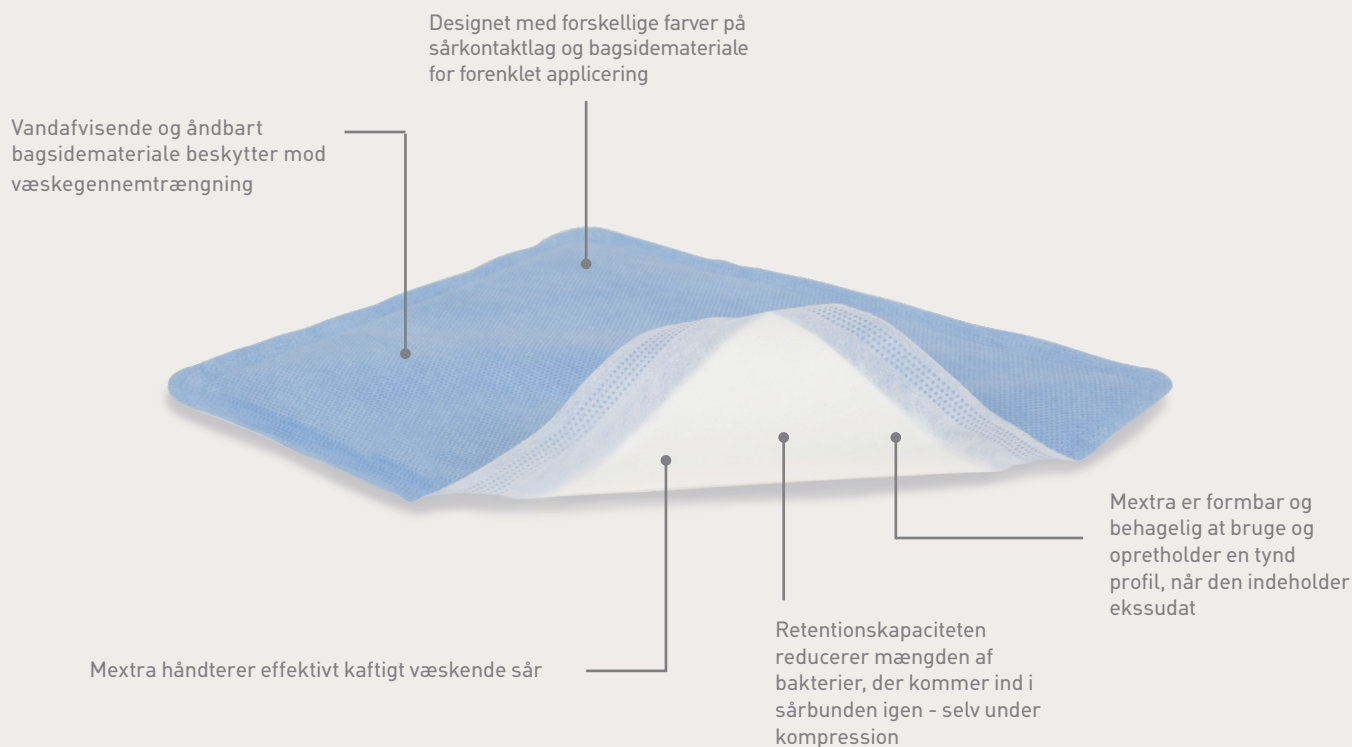


## Nøgleegenskaber ved Mextra® Superabsorbent:

- Hurtig væskeoptagelse
- Høj absorptions- og retentionskapacitet, der minimerer risikoen for maceration
- Reducerer mængden af bakterier, der kommer ind i sårbunden igen - selv under kompression
- Formbar og behagelig at bruge

## Sådan anvendes Mextra® Superabsorbent

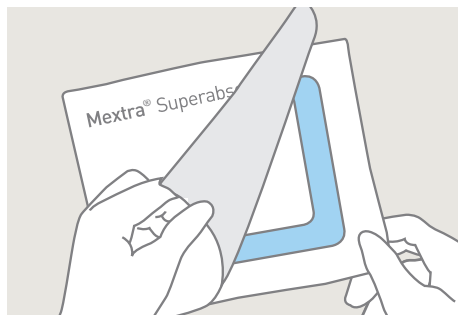


1. Rens såret og vælg en passende størrelse af Mextra® Superabsorbent.

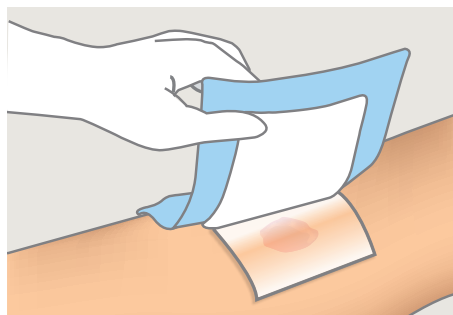

2. Applicér Mextra Superabsorbent direkte på såret med den hvide side af bandagen mod såret. For bedste resultat, bør puden overlape den tørre, omkringliggende hud med mindst 2 cm. Mextra Superabsorbent kan anvendes sammen med Mepitel® One eller Melgisorb® Plus.

Kan bruges på kroniske sår, såsom tryksår og bensår.

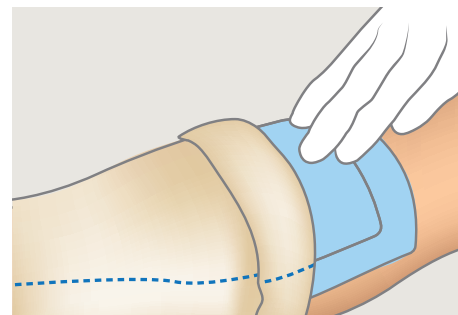

3. Fiksér Mextra Superabsorbent med en egnet bandage som Tubifast® eller fikseringstape. Kan også anvendes under kompression.

## Fordele ved Mextra Superabsorbent

- Reducerer risikoen for maceration (beskytter huden omkring såret)
- Kan bruges på venøse bensår under kompressionsbandage
- Absorberer og retinerer bakterieholdigt eksudat
- Bidrager til patientens komfort under brug
- Let at applicere

## Anvendelsesområder

Mextra® Superabsorbent er udviklet til at kunne håndtere eksudat fra moderat til kraftigt væskende sår. Mextra Superabsorbent absorberes effektivt og væsken holdes inde i kernen af superabsorbanterne, hvilket minimerer risikoen for maceration. Det vandafvisende og åndbare bagsidemateriale beskytter mod væskegennemtrængning, hvilket forhindrer lækage og hjælper med at beskytte tøj og sengelinned.

## Skiftefrekvens

Såret og Mextra Superabsorbent bør tilses regelmæssigt. Bandagen bør skiftes afhængig af sårets tilstand, eller hvis den bliver gennemblødt. Mextra Superabsorbent bør maksimalt ligge på såret i syv dage.

Reference: Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020.



## Mextra Superabsorbent sortiment (sterilt enkeltpakket)

Varenr.	Str. (cm)	Stk./inderkrt.	Stk./trp.krt.
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)

Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød. Tlf.: +45 80 88 68 10. [info.dk@molnlycke.com](mailto:info.dk@molnlycke.com)  
Mölnlycke, Mextra, Mepitel, Mepilex og Tubifast varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere af virksomhederne i Mölnlycke Health Care gruppen. © 2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC1932312

  
**Mölnlycke®**