

# BARRIER®

## Sektiolakana



- Integroitu nesteenkeräyspussi tehokkaaseen nesteiden hallintaan
- Kolmiulotteinen muotoilu takaa täyden peiton
- Nesteenkeräyspussin pehmeä vahtoreuna lisää nesteidenhallintaa
- Integroitu, kirkas ja joustava aukollinen läpileikkauskalvo turvallista kiinnitystä varten
- Läpäisemätön ehkäisemään nesteiden ja bakteerien läpipääsyä ja suojaamaan infektoilta
- Nopea ja tehokas all-in-one peittäminen, yhden henkilön on helppoa peittää

## Peittelyohjeet



1. Huomioi peitteen piktoqrammin osoittama peittelysuunta. Poista suoja-paperi.



2. Kohdista peite potilaan keskelle.



3. Taittele peite auki ensin itseäsi kohti ja sitten pois-päin itsestäsi.



4. Avaa peite kokonaan auki kohti potilaan jalkoja ja sitten kohti päätä.



5. Taittele nesteeneräyspussi auki. Poista suoja-paperi ja varmista, että kiinnittävä kalvo on kunnolla kiinnitetty potilaaseen.



6. Peittely on valmis

Tuotenumero	Steriilit koodit	Pakkaus
694135	Sektiopakkaus 1 Mayon öydän pussi 79 x 145 cm, imukykyinen alue 65 x 85 cm 4 Käsipyyhe 18 x 25 cm 1 Leikkausteippi 9 x 49 cm 1 Vauvalakana 90 x 120 cm 1 Sektiolakana 175/250 x 300 cm, läpileikkauskalvo 38 x 32 cm, reikä 18 x 16 cm 1 Instrumenttipöydän liina 150 x 190 cm, imukykyinen alue 75 x 190 cm	4/8

Tuotenumero	Mölnlycke® asiakasräätelöidyn pakkauksen komponentit
969673	Sektiolakana, 175/250 x 300 cm, läpileikkauskalvo 38 x 32 cm, reikä 18 x 16 cm, taiteltu

Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.  
 Mölnlycke ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1462009

  
**Mölnlycke®**