

# BARRIER® peruspakkaus ISCC



Parannuksia  
vastuullisuuteen



- Vahvistettu materiaali letkunpidikkeillä
- Lämpisemätön materiaali
- Imukykyinen pintakerros
- Parannuksia ympäristölliseen kestävyteen
- ISCC sertifioidut leikkauspeitteet tukevat vastuullisten materiaalien tuotantoa
- Kuljetus- ja osastolaatikot on valmistettu selluloosasta, joka on peräisin FSC™ sertifioiduista lähteistä

## Peittelyohjeet



1. Poista kiinnittyvän leikkausliinan suojapaperi.



2. Aseta kiinnittyvä leikkausliina potilaan kylkeä pitkin olkapäästä alkaen. Seuraa kehon muotoa varoen venyttämästä materiaalia.



3. Pitele kiinnittyvää leikkauslakanaa (keskikoko) ja poista suojapaperin keskiosa.



4. Aseta taiteltu leikkauslakana vatsan keskilinjan päälle.



5. Poista jäljellä olevat suojapaperi ja kiinnitä reunat paikalleen.



6. Avaa loput leikkauslakanasta potilaan jalkojen yli.



7. Aseta kiinnittyvä leikkauslakana (suuri) potilaan rinnan keskelle. Poista suojapaperi ja kiinnitä lakana paikoilleen.



8. Avaa loput leikkauslakanasta anestesiakaaren yli ja kiinnitä imu- ja diatermiapussit paikoilleen.



### 60054 Peruspakkaus: osastolaatikko 6 kpl / kuljetuslaatikko 12 kpl

Kuljetus- ja osastolaatikat on merkitty FSC™ Mix -merkinnällä. The FSC™ Mix -merkintä tarkoittaa, että pakkauksen valmistukseen käytetty puu on peräisin FSC™-sertifioiduista metsistä tai se on kierrätettyä materiaalia.

Kierrätysymboli tarkoittaa, että laatikkomme voidaan kierrättää ja niiden kuidut voidaan käyttää uudelleen.

Kuvaus	Koko (cm)	Tavoitettu selluloosapitoisuus* (imukykyinen kerros) jokaisessa pakkauksen tuotteessa	Prosenttiosuus ISCC Mass balance sertifioidusta materiaalista** (läpäisemätön kerros) jokaisessa pakkauksen tuotteessa
1 x Mayon pöydän pussi	79 x 145	7%	0%
2 x Kiinnittyvä leikkausliina	90 x 75	24%	41%
4 x Käsipyyhe	18 x 25	100%	0%
1 x Leikkausteippi	9 x 49	0%	0%
1 x Kiinnittyvä leikkauslakana	175 x 175	24%	50%
1 x Kiinnittyvä leikkauslakana	150 x 240	24%	49%
1 x Instrumenttipöydän liina	150 x 190	12%	0%

\*Tuote sisältää biopohjaisia puun selluloosakuituja

\*\*Tuote valmistetaan tavoitellulla x %lla raaka-ainetta ISCC sertifioiduista lähteistä

Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puh. 0201 622 300.  
Mölnlycke ja BARRIER tavaramerkit, nimet ja logotyypit on rekisteröity maailmanlaajuisesti yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care -yhtiölle. © 2020. Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU1702101  
FSC tavaramerkki kuuluu The Forest Stewardship Council A.C. -yhtiölle.

  
**Mölnlycke®**