


Mesorb®

Imukykyinen sidos, jossa eritteitä läpäisemätön tausta

Mesorb on pehmeä, erittäin imukykyinen sidos, joka kykenee pitämään sisällään suuria määriä haavaeritteitä. Nesteitä läpäisemätön tausta estää eritteitä pääsemästä vaatteille ja vuodevaatteille.

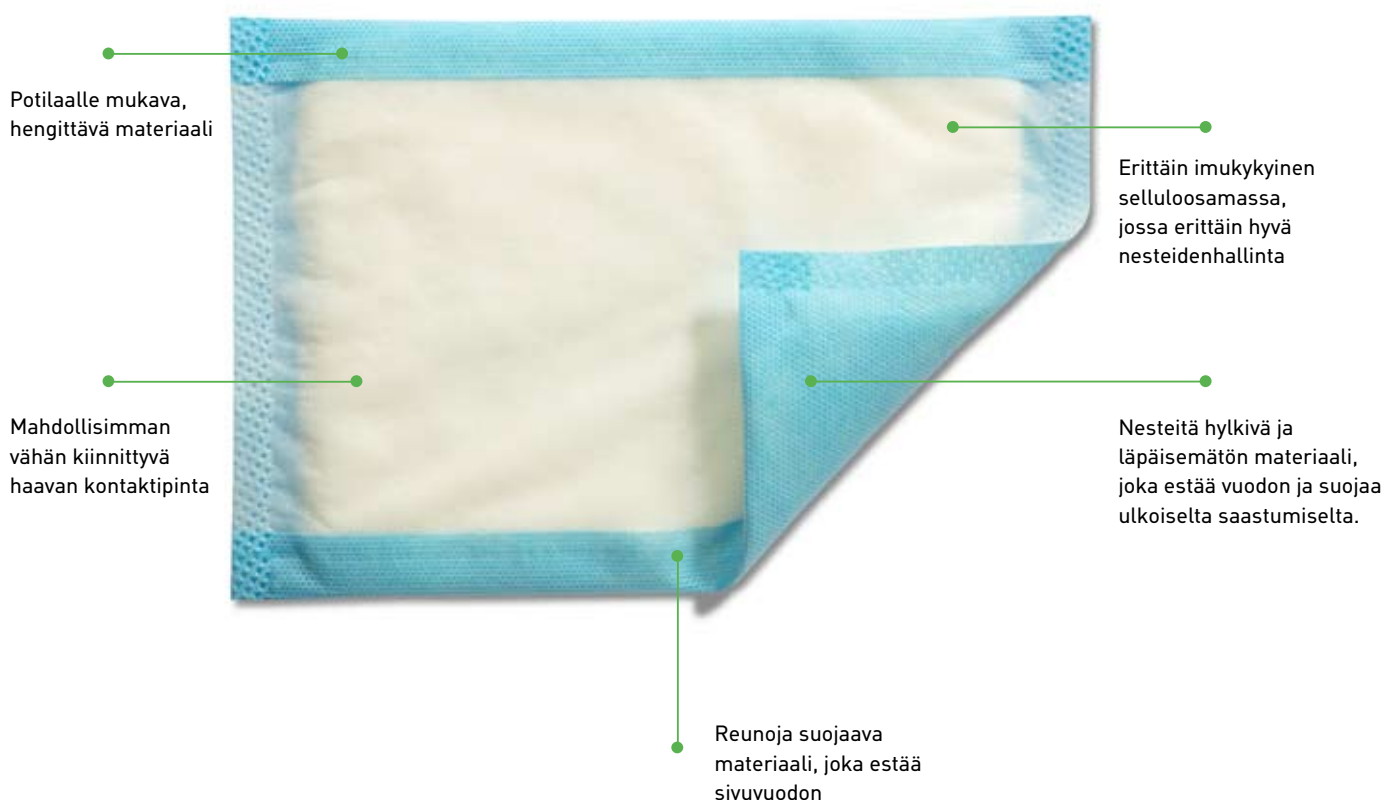


Miten Mesorb toimii

Erite imeytyy ja siirtyy Mesorbiin haavan kontaktipinnalta ja diffuusiokerroksesta. Erittäin imukykyinen sidos imee eritteitä ja samanaikaisesti tarjoaa hyvän suojaavan ja hengittävän haavatyyryn. Nesteitä läpäisemätön materiaali suojaa haavaa ulkoiselta kontaminaatiolta ja estää eritteitä pääsemästä vaatteille ja vuodevaatteille. Nesteitä läpäisemätön materiaali on myös sidoksen molemmilla reunoilla ja estää näin sivuttaisuodot. Tuote pitää asettaa siten, että vuodonestoreunat ovat poikittain haavaan nähden.

Käyttöalueet

Mesorb on suunniteltu kohtalaisesti ja runsaasti erittävälle haavoille. Mesorbia voidaan käyttää joko sellaisenaan primaarisidoksena tai päällimmäisenä sidoksena tilanteessa, jossa tarvitaan paljon imukykyä (esim. yhdessä Mepitel®in tai Mepilex® Transferin kanssa).


Miten Mesorbia käytetään

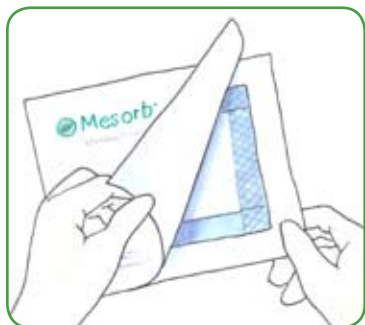

Avaa pakkaus ja poista sidos.



Aseta Mesorb haava-alueelle tai primäärisidoksen päälle. Sidoksen tulee ulottua vähintään 1 cm haavaa ympäröivälle iholle.

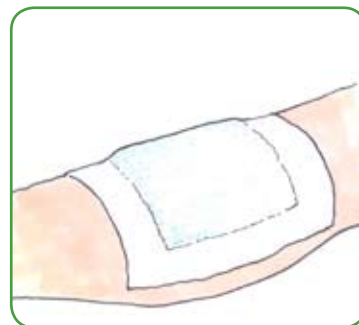

Kiinnitä sopivalla kiinnitysmateriaalilla, kuten Mefix®, Mepore® Film tai Tubifast™.

Vaihtoväli

Mesorb voidaan pitää paikoillaan useita päiviä, riippuen haavan ja haavaa ympäröivän ihon kunnosta tai mikäli terveysalan ammattilainen neuvoo muuta.

Mesorbin edut

- Erittäin imukykyinen
- Hyvä suojaava pehmuste
- Hengittävä
- Kustannustehokas
- Ainutlaatuinen nesteitä läpäisemätön tausta vähentää sidoksen vaihtoväliä ja estää eritteitä pääsemästä vaatteille ja vuodevaatteille.

Huomaa

Mikäli haavassa esiintyy merkkejä infektiosta, ota yhteyttä terveysalan ammattilaiseen.



Mesorb on steriilisti yksittäispakattu

Tuotenumero	Koko cm	Kpl/osastopakkaus	Kpl/kuljetuspakkaus
677001	10 x 13	50	400
677201	13 x 15	50	300
677401	10 x 23	50	300
677601	15 x 23	50	300
677701	23 x 25	30	120
677801	23 x 30	30	120

Mölnlycke Health Care
Pitäjänmäentie 14, 3 krs
00380 Helsinki
Puh. 0201 622 300
www.molnlycke.com

Mölnlyckeen symboli ja tekstikuvake ovat Mölnlycke Health Caren rekisteröityjä tavaramerkkejä


Mölnlycke®