

Itsehoito-opas sidosten vaihtoon


Hoitajasi on valinnut haavallesi Mextra® Superabsorbent -sidoksen

Miten Mextra® Superabsorbent -sidosta käytetään?

1. Pese kädet saippualla ja lämpimällä vedellä 20 sekunnin ajan.
2. Puhdista haava hoitajan ohjeiden mukaan.
3. Laita Mextra Superabsorbent -sidoks suoraan haava-alueelle siten, että sidoksen valkoinen puoli on haavaa kohti. Sininen puoli ylöspäin!



4. Tyynyn tulisi ylittää ympäröivän kuivan ihon puolelle.
5. Varmista Mextra Superabsorbent -sidoksen kiinnitys esim. sopivalla hoitajalta saadulla putkisidoksella tai teipillä.

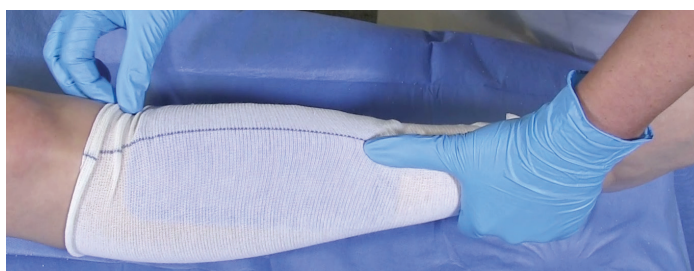

Milloin sidos tulee vaihtaa?

Hoitajan ohje sidoksen vaihtamiseen:

Pyydä lisäapua ja neuvoja hoitajaltasi:

Jos sinulla on internet-yhteys, voit katsoa ohjevideon sidoksen pukemisesta alla olevasta linkistä:

www.molnlycke.fi/ohjevideot

Muistettavaa:

- ✓ Älä leikkaa Mextra Superabsorbent -sidosta
- ✓ Mextra-sidos on tarkoitettu kertakäyttöön eikä sitä tule käyttää uudelleen.

Mextra Superabsorbent -sidos on tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden käsiteltäväksi ja käytettäväksi, mutta jos terveydenhuollon ammattihenkilöä ei ole saatavilla, sidoksen voi joutua vaihtamaan perheenjäsen tai sidoksen käyttäjä. Tällöin Mölnlycke Health Care ei kuitenkaan vastaa sidoksen käytöstä. Vastaaavasti jos Mextra Superabsorbent -sidosta käyttää kuka tahansa muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö, se tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Lue lisää: www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300.
Mölnlycke- ja Mextra-tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat yhden tai useamman Mölnlycke Health Care -yhtymän yhtiön maailmanlaajuisesti rekisteröimiä. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC1110209


Mölnlycke®