

# Mefix<sup>®</sup>

Itsekiinnittyvä kangas sidosten, letkujen ja kanyyliin varmaan kiinnittämiseen


- Hellävarainen ja pitävä kiinnitys<sup>2,3</sup>
- Vartalon muotoja myötäilevä ja käytössä miellyttävä<sup>4</sup>




- Ihoystävällinen: ei herkistä tai ärsytä<sup>1</sup>
- Hengittävä, mutta vedenkestävä

Mefix<sup>®</sup> kiinnittää sidokset, letkut ja kanyylit varmasti ja hellävaraisesti

## Mefix® – käyttöohjeet

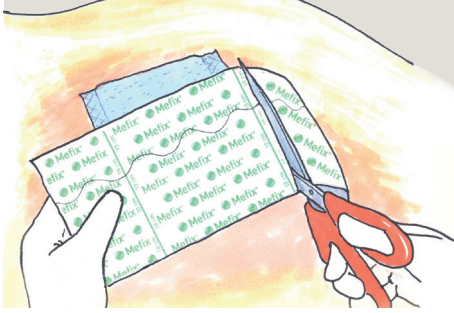

1. Leikkaa sopivan kokoinen pala.

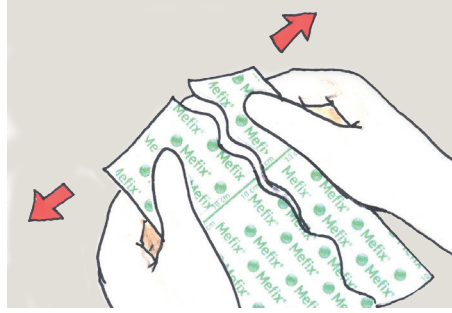

2. Erotta suojapaperin kaksi osaa toisistaan taivuttamalla ja venyttämällä Mefixiä® kevyesti. Irrota kapeampi osa.



3. Kiinnitä Mefixin paljastunut liimapinta ihoon. Irrota jäljelle jäänyt suojapaperi. Paina Mefix tiiviisti kiinni ihoon, jotta se tarttuu kunnolla. Älä venytä Mefixiä kiinnityksen aikana.

## Näin Mefix toimii

Kuitumateriaali läpäisee ilmaa ja vesihöyryä sen huokoisen rakenteen ansiosta<sup>1</sup>. Kangas myötäilee vartalon muotoja ja on käytössä miellyttävä<sup>4</sup>. Kiinnitys on suunniteltu hellävaraiseksi, mutta pitäväksi<sup>2,3</sup>.

## Käyttökohteet

Mefix soveltuu käyttöön, kun tarvitaan itsekiinnittyvää materiaalia esimerkiksi sidosten, letkujen ja kanyyliin paikallaan pitämiseen.

## Edut

- Hellävarainen iholle
- Myötäilee vartalon muotoja
- Ilmaa läpäisevä, mutta vedenkestävä

## Varotoimet

Ihoa ei saa venyttää Mefixin kiinnittämisen aikana, koska venytys voi vaurioittaa ihoa. Tämä on erityisen tärkeää nivelten alueella.

## Mefix toimitetaan ei-steriilinä 10 ja 2,5 metrin rullissa annostelupakkauksissa.

Tuotenumero	Leveys (cm)	Rullia (kpl)/ kuljetuspakk.
10 m rulla		
310250	2,5	40
310500	5	40
311000	10	20
311500	15	15
312000	20	10
313000	30	10
Tuotenumero	Leveys (cm)	Rullia (kpl)/ kuljetuspakk.
2,5 m rulla		
310570	5	30
311070	10	30
311570	15	20



Viitteet: 1. Mólnlycken oma aineisto. 2 Livesley J, Richardson S. Securing methods for peripheral cannulae. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987). 1993;7(31):31-4. 3. Kanapathy M, Mosahebi A. Comparative study on the donor site aesthetic outcome between epidermal graft and split-thickness skin graft. International Wound Journal. 2019;16(2):354-9. 4. Gupta SK, Lee S, Moseley LG. Postoperative wound blistering: is there a link with dressing usage? J Wound Care. 2002;11(7):271-3.

Lue lisää: [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mólnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Puhelin: 0201 622 300. Mólnlycke- ja Mefix-tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat maailmanlaajuisesti yhden tai useamman Mólnlycke Health Care -yhtiön rekisteröityä omaisuutta. ©2020 Mólnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC0942005

