


Mextra® Superabsorbent

Monikäyttöinen ja tehokas sidos erittäville haavoille

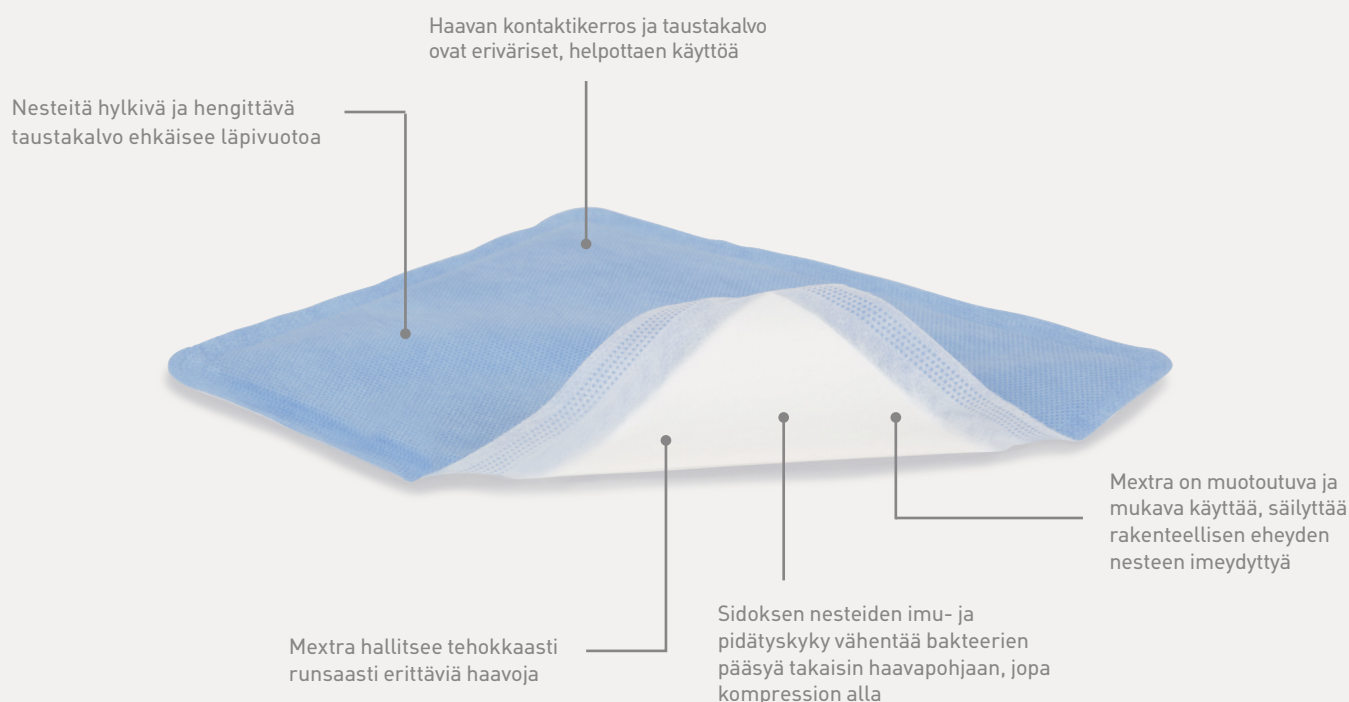


Mextra® Superabsorbentin tärkeimmät ominaisuudet

- Nopea imukyky
- Korkea imu- ja pidätyskyky, joka vähentää maseraation riskiä
- Vähentää bakteerien pääsyä takaisin haavapohjaan, jopa kompression alla
- Muotoutuva ja mukava käyttää

Kuinka Mextra® Superabsorbentia käytetään




1. Puhdista haava paikallisen hoitokäytännön mukaisesti ja valitse sopivan kokoinen sidos.

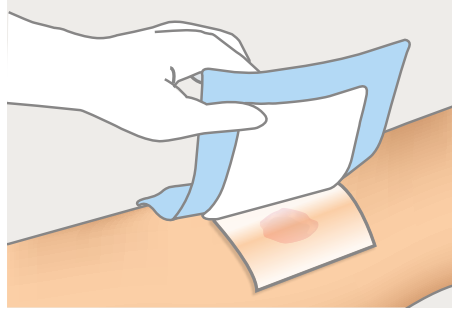

2. Aseta Mextra Superabsorbent suoraan haava-alueelle, sidoksen valkoinen puoli haavaa vasten. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi sidoksen tulisi ulottua ympäröivälle iholle vähintään 2 cm. Mextra Superabsorbentia voidaan käyttää yhdessä ensisijaisten sidosten, kuten Mepitel® tai Mepitel® One kanssa.

Voidaan käyttää kroonisilla haavoilla, kuten painehaavat ja säärihaavat.

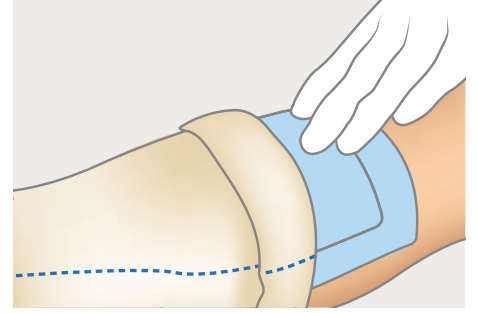

3. Kiinnitä Mextra Superabsorbent sopivalla kiinnitysmateriaalilla, kuten Tubifast® -putkisidoksella tai teipillä.

Voidaan käyttää tarvittaessa myös kompression alla.

Mextra Superabsorbentin ominaisuudet

- Minimoi maseraation riskiä (suojaa ympäröivää ihoa)
- Voidaan käyttää laskimosäärihaavoilla kompressiosidonnan alla
- Imee ja pidättää eritteen jossa bakteereja
- Edistää potilaan mukavuutta käytön aikana
- Helppo asettaa



Mextra Superabsorbent valikoima (steriilisti yksittäispakattu)

Tuotenro	Koko (cm)	Kpl/osastopakk.	Kpl/kuljetuspakk.
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50

Käyttöalueet

Mextra® Superabsorbent on tarkoitettu kohtalaisesti ja runsaasti erittävälle haavoille. Mextra Superabsorbent imee haavaeritteen haavan kontaktipinnan läpi, pidättää eritteen sisällään ja näin vähentää maseraation riskiä. Nesteitä hylkivä ja hengittävä taustamateriaali ehkäisee läpivuotoja sekä suojaa potilaan vaatteita ja lakanoita.

Sidoksen vaihtoväli

Haava ja Mextra Superabsorbent tulee tarkastaa säännöllisesti. Sidos vaihdetaan haavan kliinisen tilanteen mukaisesti tai ennen kuin sidos on aivan täynnä. Mextra Superabsorbent voidaan jättää paikoilleen jopa seitsemän päivän ajaksi.

VIITTEET: Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020.

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 3krs. 00380 Helsinki. Mölnlycke, Mextra, Mepitel, ja Tubifast tuotemerkit, nimet ja logot ovat yhdelle tai useammalle Mölnlycke Health Care Group -konsernin yritykselle globaalisti rekisteröityjä tavaramerkkejä. © 2022. Mölnlycke Health Care Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. FIWC1692205


Mölnlycke®