



Champ de laparotomie **BARRIER**[®]

- **Matériaux 100% imperméables** pour une sécurité optimale du patient
- **Plié de façon optimale**, pour une utilisation stérile, peut être apposé en toute simplicité par une seule personne
- **Couche de confort** supplémentaire afin d'assurer un confort optimal du patient
- **Absorption efficace** pour une zone de travail maintenue au sec

Instructions



1. Centrez le champ sur le thorax du patient (voir le pictogramme).



2. Retirez le papier protecteur et appliquez le champ déplié sur le patient.



3. Dépliez le champ sur le côté, d'abord vers vous puis dans la direction opposée.



4. Dépliez le champ totalement vers les pieds du patient.



5. Dépliez le champ complètement par-dessus l'arceau d'anesthésie.



6. Le drapage est terminé. Utilisez les crochets et anneaux pour fixer les tubulures.

Réf.	Description	Conditionnement
61330	Champ de laparotomie 200/270x315cm, film d'incision 23x36cm, renforcement 50x100cm, 2 passe-tubulures intégrés	10/20

Ce champ opératoire est aussi disponible pour les trousse ProcedurePak®.

Find out more at www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 boîte 2, B-2600 Berchem - Tél. 03 286 89 50, Fax. 03 286 89 52
www.molnlycke.com

Le nom et le logo de Mölnlycke Health Care, BARRIER® et ProcedurePak® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB.

Mölnlycke®