


BARRIER® Champ d'extrémité avec Drisite® Plus



- Drisite® Plus* assure une absorption et une gestion efficace des fluides
- Matériaux résistants et renforcés dans la zone critique, pour une qualité fiable et un haut degré de résistance à la déchirure
- Modèle tridimensionnel créant une vaste zone protégée pour l'anesthésie
- Passe-tubulures intégrés pour faciliter la manipulation des instruments
- Matériaux imperméables pour une sécurité optimale du patient

* Drisite® Plus est un système breveté pour la gestion des fluides se scinde en trois zones, composé d'une barrière sèche, résistante et absorbante.

Instructions d'utilisation

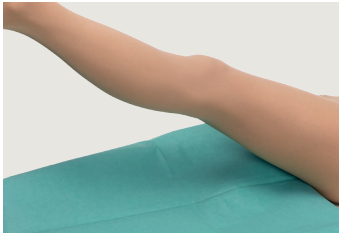

1. Dépliez la housse de table et placez-la sous la jambe du patient.



2. Option 1: couvrez la jambe avec du champ adhésif et fixez-le avec des bandes adhésives.



2. Option 2: couvrez la jambe avec une stockinette.



3. Fixez-la à l'aide de bandes adhésives.



4. Placez le champ d'extrémité déplié sur le pied du patient de manière à ce que la flèche soit orientée vers le corps du patient.



5. Dépliez l'un des côtés du champ d'extrémité et passez-le à un assistant. Soulevez la jambe du patient et tirez le champ d'extrémité de manière à couvrir le genou du patient. Dépliez les côtés du champ.



6. Par l'ouverture élastique, saisissez le pied du patient et couvrez le pied à l'aide du champ.



7. Dépliez la partie supérieure du champ sur le cadre d'anesthésie.

N° de réf.	Description	Disp/Trp
60206	Trousse d'extrémité	7/14
	1 housse de Mayo renforcée 79x145cm, 65x85cm absorbant 4 serviettes absorbantes 18x25cm 1 champ de table 150x190cm, 75x190cm absorbant 1 champ adhésif 75x75cm 2 bandes adhésives 9x49cm 1 champ d'extrémité 200/300x320cm, ouv. 7cm élastique 1 champ de table renforcé 150x190cm, 75x190cm absorbant	
60214	Champ d'extrémité 200/300x320cm, ouv. 7cm élastique, enroulé	7/14

Tous ces composants des trousse peuvent également être inclus dans les trousse composites Mölnlycke®.

N° de réf.	Composant de trousse composites Mölnlycke®
70214	Champ d'extrémité 200/300x320cm, ouv. 7cm élastique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSU00821709)

