

## Champ de table renforcé BARRIER®

- Matériaux solides et durables qui garantissent résistance et fiabilité
- Imperméabilité et absorption efficace contre toute pénétration et contamination
- Pliage et rangement précis pour une manipulation facile et efficace
- Un large choix de tailles couvrant tous les modèles de tables



### BARRIER crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. L'offre de solutions novatrices et adaptées allie qualité supérieure, produits améliorant la sécurité, options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.





1 Tenez le champ de table dans la direction indiquée sur le pictogramme. L'étiquette est adhésive et collera à la table.



2 Retirez le papier de protection.




3 Placez le champ de table sur la table à instrument.



4 Dépliez vers les côtés.



5 Dépliez le champ de table vers vous.

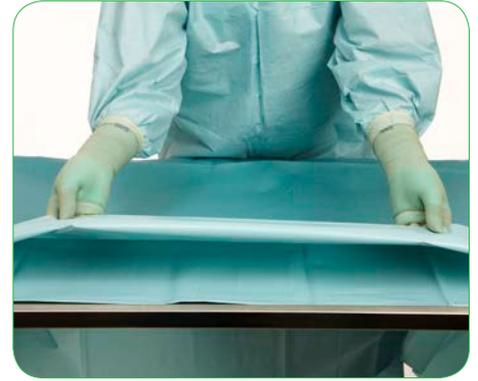

6 Dépliez le champ de table dans le sens opposé.

Code stérile	Composants du ProcedurePak®	Taille	Zone d'absorption	Emballage code stérile
85195 emballé	95190	150×190cm	75×190cm	15/30
85215 emballé	95210	150×210cm	75×210cm	14/28
85245 emballé	95240	150×240cm	75×240cm	14/28
89215 emballé	99210	190×210cm	90×210cm	11/22
89285 emballé	99280	190×280cm	90×280cm	10/20
85190	95150	150×190cm	75×190cm	15/30
89210	99210	190×210cm	90×210cm	12/24

Uniquement pour des champs emballés individuellement ou pliés entièrement dans les trousse.