



Mölnlycke®

BARRIER® Film d'incision


- 100% imperméable, empêche la migration de bactéries à travers le champ
- Haut pouvoir respirant, prévient l'apparition de buée et améliore le confort du patient
- Ne contient pas de latex, colophonium ou formaldéhyde
- Flexible et facile à apposer, bonne drapabilité même sur les zones plus délicates
- Totalement transparent
- Adhère parfaitement à la peau tout en restant confortable lors de l'opération et du retrait




BARRIER® crée l'effet ricochet à l'origine de meilleurs soins pour plus de patients

Tous les produits BARRIER de Mölnlycke Health Care combinent parfaitement protection, fonctionnalité et confort. L'offre de solutions novatrices et adaptées allie qualité supérieure, produits améliorant la sécurité, options de livraison et de logistique, ainsi qu'assistance et formation permanentes. Ces éléments combinés contribuent à créer un effet ricochet à l'origine de gains de temps, d'efforts et d'argent. Les ressources précieuses sont libérées avec, à la clé pour vous, de nouvelles efficacités et la possibilité d'offrir les meilleurs soins à plus de patients.




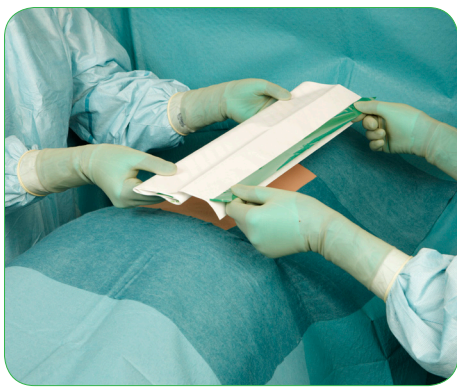

1 Retirer le papier d'emballage. Une personne tient les bords tandis qu'une seconde personne tient le papier protecteur du côté opposé.

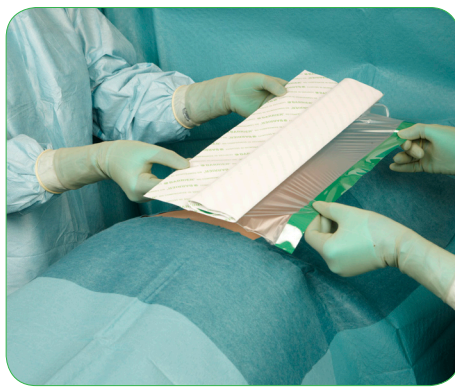

2 Tirer le papier protecteur sur quelques centimètres et apposer le film d'incision sur le patient.

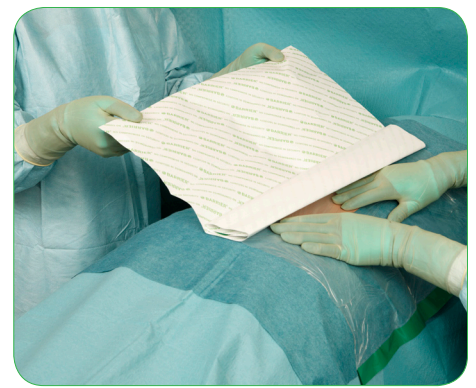

3 Continuer à retirer le papier protecteur avec précaution tandis qu'une seconde personne assure la bonne adhérence du film d'incision.



4 Frotter le film du plat de la main pour obtenir une surface lisse. Retirer les bords amovibles des deux côtés.

Référence	Dimensions
801014	10×14 cm
801526	15×26 cm
803026	30×26 cm
804040	40×40 cm
804526	45×26 cm
804555	45×55 cm
805680	56×80 cm