


Melgisorb® Plus

Pansement alginate absorbant

Melgisorb Plus est un pansement alginate hautement absorbant pour une grande diversité de plaies modérément à fortement exsudatives. Le pansement doux et stérile est composé des fibres d'alginate de sodium et de calcium qui aident à:


- Une capacité d'absorption excellente - absorbe de grandes quantités d'exsudat
- Une meilleure solidité à l'état humide - permet que le pansement soit enlevé dans un ensemble
- Une rétention élevée- minimise le risque de macération

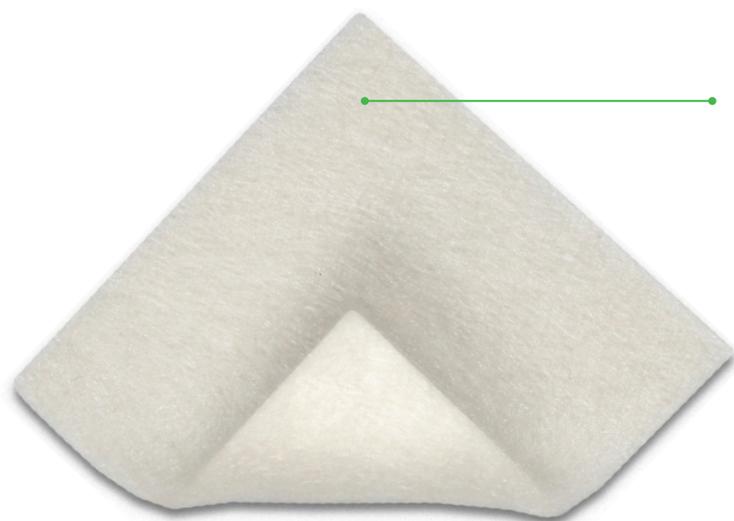


• Fibres alginate hydrophiles

- Maintiennent un milieu humide optimal
- Minimisent le risque de macération
- N'adhèrent pas à la plaie

Comment faut-il utiliser Melgisorb® Plus?

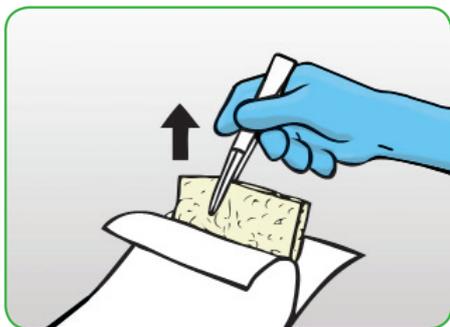


1. Choisissez une taille de Melgisorb Plus qui est un petit peu plus grande que la plaie. Ouvrez l'emballage pas tirer.

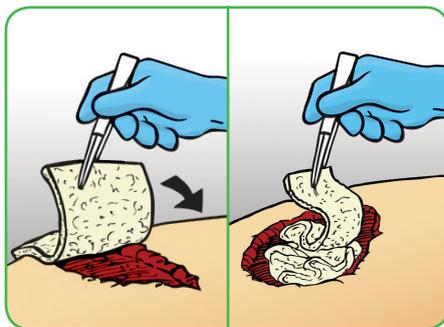

2. Appliquez un Melgisorb Plus sec sur le lit de la plaie humide.

Plaies superficielles: Choisissez une taille de Melgisorb Plus apte pour couvrir la plaie entièrement.

Plaies profondes et cavitaires: Coupez le mèche sur taille et placez-le dans la plaie faiblement.

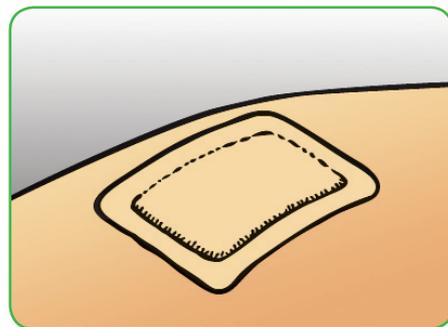

3. Couvrez et fixez Melgisorb Plus avec un pansement secondaire apte comme Mepilex® Border.

La thérapie par compression peut être appliquée en combinaison avec Melgisorb Plus.

Mode d'action

Melgisorb Plus absorbe des hautes quantités des exsudats. En absorbant des exsudats, les fibres d'alginate forment un gel doux et mouillé qui crée un milieu de plaie humide ce qui stimule la cicatrisation. Le gel est facile à enlever par irriguer avec saline solution (0,9%).

Avantages de Melgisorb Plus

- Très absorbant
- N'adhère pas au site de la plaie après la gélification
- Approprié aux cavités
- Gélification au contact des exsudats ou des ions sodium (saline)
- Doux/pliable
- Peut être coupé
- Facile à appliquer et à enlever
- Non sensibilisant

Indications

Melgisorb Plus est indiqué pour une grande diversité de plaies modérément à fortement exsudatives, pour des plaies infectées et non-infectées comme: TEscharres

- Ulcères veineux et artériels
- Ulcères diabétiques
- Sites de prélèvement
- Des plaies postopératoires
- Lésions cutanées et d'autres plaies externes causé par trauma.

Tailles disponible pour des plaies superficielles et profondes

Mesures de précaution

En cas d'infection, suivez les directives locales donnés par un médecin

Ne pas réutiliser: la prestation du produit peut se diminuer ou une infection croisée peut se manifester.

Contra-indications

Melgisorb Plus n'est pas indiqué pour les plaies sèches, les brûlures du troisième degré ou les implants chirurgicaux.

Melgisorb Plus

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
252000	5x5	3057-502	10	100
252200	10x10	3057-510	10	100
252500	10x20	3057-528	10	100
253500	3x45	3057-551	5	50



Plus d'information sur www.molnlycke.com/be-fr

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, Belgique. Tél +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52
Le nom et le logo Mölnlycke Health Care, Melgisorb® et Mepilex® sont des marques déposées de Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden.

