


Mepitel® Film

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

UN PANSEMENT TRANSPARENT QUI PROTÈGE LA PEAU

- Mepitel® Film est un film doux, transparent et perméable pour protéger la peau sensible.
- Mepitel® Film peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres produits.
- Minimise la douleur et les traumatismes de tissu lors du changement de pansement. ^{1,2,3,4,5,6}
- L'application de Mepitel® Film a été conçue pour une utilisation simple et facile.

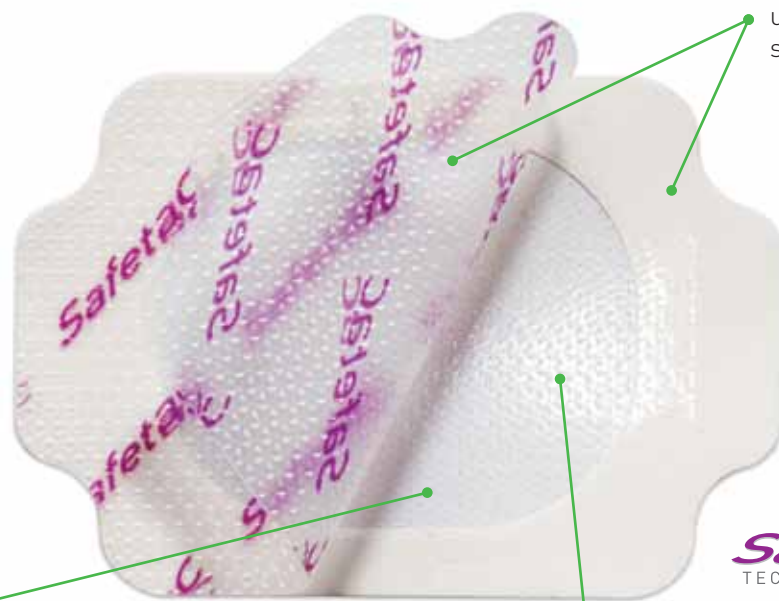

Une feuille protectrice et une feuille de garde pour la souplesse d'utilisation

Couche Safetac®

- Minimise la douleur et les traumatismes avant et après le changement de pansement
- Adhère en douceur sur les surfaces sèches comme la peau péri lésionnelle
- Se conforme bien aux pores de la plaie et prévient la macération

- Un film transparent, polyuréthane pour l'optimisation du confort du patient et du processus de guérison
- Permet la douche, une barrière antibactérienne et virale

Safetac®
TECHNOLOGY

Technologie Safetac®

Technologie Safetac®. Minimisez Traumatismes et douleur.

Safetac® est une technologie brevetée d'adhésif siliconé qui permet au pansement d'adhérer mais sans coller. Le pansement adhère en toute sécurité à la peau environnante mais n'adhère pas à la plaie humide. Le retrait devient atraumatique sur la plaie et la peau Péri-lésionnelle, donc indolore pour le patient.

Pour plus d'informations visitez www.safetac.com



Les adhésifs classiques décollent des cellules épidermiques.



L'adhésif en silicones douces Safetac® ne décolle pas de cellules épidermiques.

Comment utiliser Mepitel® Film?



Séchez la peau péri lésionnelle.
Enlevez la feuille protectrice (côté imprimé logo Safetac®).



Appliquez le pansement transparent Mepitel® Film. Il peut être repositionné pour autant que le cadre papier reste intact. Enlevez le cadre papier. N'étirez pas le Mepitel® Film pendant l'application. Pour obtenir un meilleur résultat il faut que le Mepitel® Film recouvre la peau périlésionnelle d'au moins 1-2 cm pour les dimensions 10x12 cm et au moins 5 cm pour les dimensions plus grandes.



Appliquez doucement le pansement transparent sur la peau. Mepitel® Film peut être enlevé sans douleur et sans arracher les cellules cutanées.

Le fonctionnement du Mepitel® Film

Mepitel® Film est un film flexible et transparent pour protéger la peau ou la plaie contre la contamination externe ou microbienne. Il se conforme aux surfaces et contours de la peau irréguliers. Mepitel® Film maintient un milieu humide. Mepitel® Film a une bonne couche d'adhésion grâce à laquelle une fixation supplémentaire n'est plus nécessaire. Mepitel® Film ne laisse pas de résidus.

Fréquence de changement de pansement

Dépend de la condition de la plaie / de la peau, Mepitel® Film peut rester quelques jours en place.

Avantages de Mepitel® Film

- Minimise la douleur et les traumatismes lors du changement de pansement
- Pas de risque d'endommager les tissus nouvellement formés
- Transparent pour une bonne inspection de la plaie
- S'adapte à l'anatomie du corps pour optimiser le confort du patient
- Barrière antibactérienne et virale
- Moins de risque d'allergie et d'irritation de la peau
- Ne laisse pas des résidus
- Imperméable aux liquides
- Permet la douche

Quand utiliser Mepitel® Film?

Mepitel® Film est développé pour une gamme de plaies superficielles comme des lésions cutanées et des brûlures. Mepitel® Film protège la peau sensible et fragile. Mepitel® Film peut être utilisé comme fixation de pansements primaires. En plus, Mepitel® Film peut être utilisé en combinaison avec des gels et des pommades comme 'Landing Zone' protectrice pour fixer par exemple un 'dispositif médical'.

Précautions

- Mepitel® Film n'est pas une interface à couche d'adhésion et ne laisse pas passer de l'exsudat vers le pansement secondaire.
- Quand 2 produits sont utilisés et se recouvrent, l'imperméabilité de la vapeur diminuera. Un excès d'exsudat est possible.

Avertissements

Mepitel® Film ne peut pas être utilisé comme fixation pour IV, des cannules, des portes à cath, des infusions ou d'autres dispositifs médicaux.



ASSORTIMENT MEPITEL® FILM (stériles)

N° d'article	Code CNK	Dim (cm)	Pièces /RET	Pièces /TRP
296100	2941-284	6 x 7	10	50
296200	2941-250	10 x 12	10	70
296400	2941-268	10 x 25	10	50
296600	2941-276	15 x 20	10	70

Références: 1. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008. 2. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005. 3. Meaume S et al. A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer Ostomy Wound Management 2003. 4. Wiberg AB et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster publication. WUWHS congress, Canada 2008. 5. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care 2001. 6. Waring M. et al. An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.