

●多層構造という実力

高い吸収力/保水力が、ドレッシング材の交換回数を軽減。
過剰な滲出液は、背面フィルムから蒸散させて適切な湿潤環境を維持します。


●高い吸収力

ポリウレタンフォームの吸水層が、垂直方向に創部からすばやく滲出液を吸収。浸軟を軽減します。

●安心の保水力

高保水力を持つ保水層が、滲出液をしっかり保水。創部への逆戻りをガードします。

メピレックス® ボーダーを構成する各層の作用

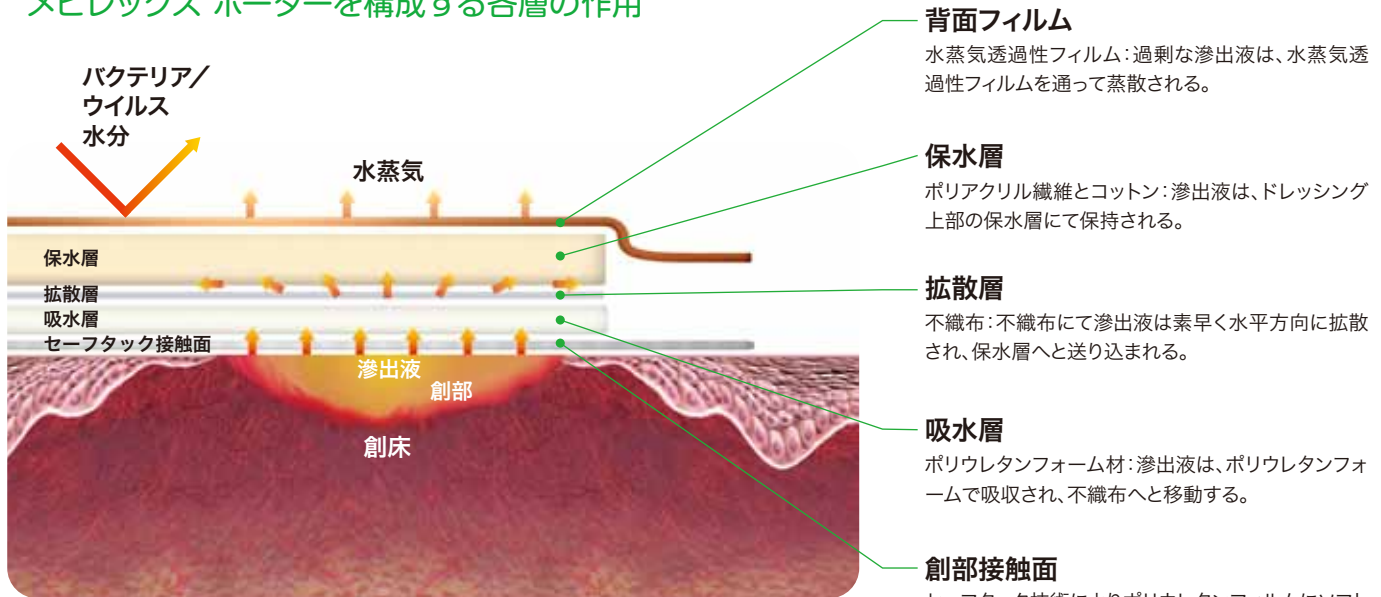

背面フィルム

水蒸気透過性フィルム：過剰な滲出液は、水蒸気透過性フィルムを通して蒸散される。

保水層

ポリアクリル繊維とコットン：滲出液は、ドレッシング上部の保水層にて保持される。

拡散層

不織布：不織布にて滲出液は素早く水平方向に拡散され、保水層へと送り込まれる。

吸水層



ポリウレタンフォーム材：滲出液は、ポリウレタンフォームで吸収され、不織布へと移動する。

創部接触面

セーフタック技術によりポリウレタンフィルムにソフトシリコンをコーティング：セーフタック創部接触面は、創縁部をしっかりとシーリングし、滲出液を創周辺部に漏らさない。滲出液は創部接触面を通して吸水層へと移動する。

3. 浸軟リスクを軽減

- セーフタックのシーリング効果により滲出液が創周囲に広がるのを防ぎます。
- 滲出液を横に漏らさず、その結果、浸軟のリスクが軽減されます。

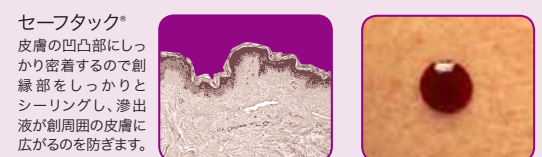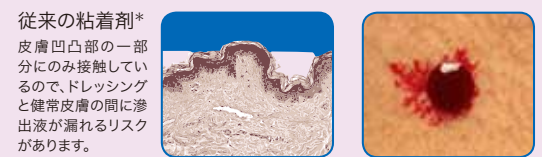

4. 柔らかくやさしい装着感

- ドレッシング全体がやわらかく、屈曲部位にもなじみやすく皮膚に密着します。
- 患者様の皮膚をやさしく保護しQOLを改善します。



メピレックス® ボーダー サイズ一覧

●標準型

製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
295200	7.5×7.5	4.5×4.5	20.25	5
295300	10.0×10.0	6.5×6.5	42.25	5
295000	12.5×12.5	8.5×8.5	72.25	5
295400	15.0×15.0	11.0×11.0	121	5
295600	15.0×20.0	11.0×16.0	176	5
295800	10.0×20.0	5.0×15.0	75	5
295900	10.0×30.0	5.0×25.0	125	5

●形状付型

製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
282000	260 (18 cm × 18 cm)	120	120	5

●ヒールタイプ

製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
283250	18.5×24.0	90	90	5

●フレックスタイプ

製品番号	ドレッシングサイズ (cm)	パッドサイズ (cm)	保険算定面積 (cm ²)	枚/箱
283300	13.0×16.0	85	85	5
283400	15.0×19.0	134	134	5

- メピレックス® ボーダーは、標準型、形状付型、フレックスタイプ、ヒールタイプなど、豊富なサイズラインナップを揃えております。



販売名：メピレックス ボーダー II

高度管理医療機器
二次治療フォーム状創傷被覆・保護材
承認番号：22500BZX00180000

【保険適用】

種 類：特定保険医療材料
保 険 請 求 名：皮膚欠損創傷被覆材 メピレックス ボーダー II
保険適用範囲：皮下組織に至る創傷用 標準型
適 用 期 間：2週間を標準として特に必要と認められた場合については3週間を限度とする。
保 険 請 求：償還価格による。

【使用目的又は効果】

皮下脂肪組織までの創傷(III度熱傷を除く)に対する「創の保護」、「湿潤環境の維持」、「治癒の促進」、「疼痛の軽減」を目的とする。

「使用方法及び使用上の注意」等については添付文書をご参照ください。

※再使用禁止

Less pain. Less trauma.

メンリッケヘルスケアは、ソフトシリコンを用いた、痛みや組織損傷の少ない創傷被覆・保護材を開発し、患者様の視点からの「アウトカム」向上を提唱しております。

製造販売業者
メンリッケヘルスケア株式会社
東京都新宿区西新宿6-20-7
コンシェルシア西新宿タワース ウェスト
TEL: 03-6914-5004

製品に関するお問い合わせ
メンリッケヘルスケア株式会社
ウンドケア事業部
TEL: 03-6279-0991



SafetaC®, Mepilex®, セーフタック®, メピレックス® は Mölnlycke Health Care の登録商標です。

Mepilex® Border
メピレックス® ボーダー



Mepilex® Border



Mölnlycke®

皮膚にやさしいソフトシリコン／ポリウレタンフォーム


Mepilex® Border

メピレックス® ボーダー

メピレックス® ボーダーは、ドレッシング材による痛みや組織損傷など、患者様の負担を軽減するために開発された創傷被覆・保護材です。

- ドレッシング交換時の痛みやストレスが少なく、また、医療従事者にとって簡便に使えます
- ドレッシング除去時の創床及び周辺皮膚の組織損傷を軽減し、創傷治癒過程を阻害しません
- 滲出液の管理に優れており、漏れや浸軟のリスクを軽減します
- 自着性なので、二次ドレッシングを使用せずに簡便に被覆できます

メピレックス® ボーダーならではの多層構造

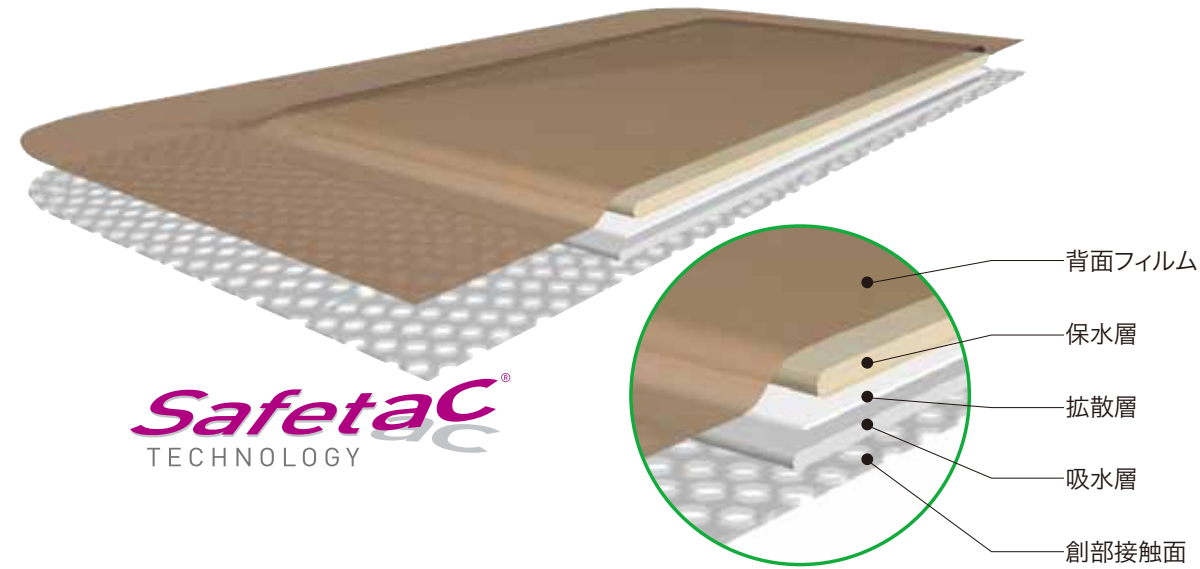

●セーフタック®テクノロジーというやさしさ

セーフタックは、メンリッケヘルスケアが開発したソフトシリコンを使用した粘着技術です。セーフタック粘着技術を使用したドレッシング材は、ドレッシング交換時の患者様の痛みや創床及び創周囲皮膚の組織損傷のリスクを軽減します。また、皮膚の凹凸部にも密着するセーフタック粘着材は、創縁をしっかりとしるするので、創周囲の浸軟リスクも軽減します。

1. 痛みと組織損傷リスクを軽減

- 創縁や創周囲皮膚の損傷リスクを軽減します。
- 創傷治癒を組織損傷によって遅延させません。
- ソフトシリコン粘着材は、低アレルギー性で、また皮膚かぶれのリスクも軽減します。



ドレッシング交換時に、粘着剤接触部に強い力がかかり、表皮剥離のリスクがあります。
ドレッシング交換時の表皮剥離のリスクを軽減します。

*当社救急絆創膏との比較(自社データによる)

2. 湿潤した創床に固着しない

- 湿潤した創床に固着せず、周辺皮膚にはやさしく密着します。
- 創床に固着しづらく、また乾燥傾向の創部でもやさしく容易にドレッシングを除去できます。

多様な形状・サイズで、様々な創傷に対応可能


●標準型



●フレックスタイプ


Mepilex® Border Flex

フレックス・テクノロジーを取り入れる事により柔軟性と追従性がさらに改善された楕円形の一体型フォームドレッシングです。

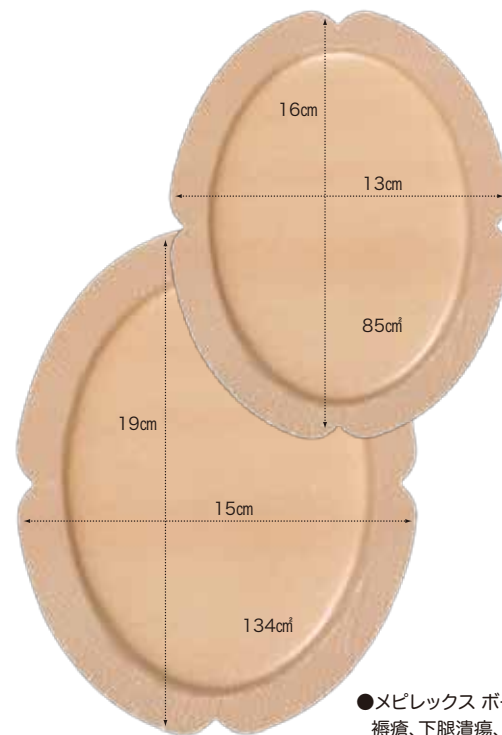

追従性に特化し剥がれにくさを追求

- 楕円形のパッドに、身体の屈曲部にも密着するように設計されたボーダーから成る一体型フォームドレッシング
- 補強のための固定材が必要なく、創部にしっかりと密着
- ユニークな多層構造に新たにフレックス・テクノロジー(フレックスカット構造)を採用、屈曲部に沿って伸びやすく、さらなる柔軟性と追従性を実現

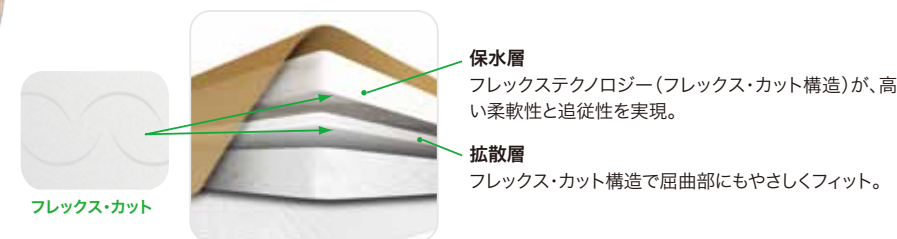

●メピレックス ボーダー フレックスタイプは、褥瘡、下腿潰瘍、外傷性潰瘍等に適しています。

●形状付型




●ヒールタイプ

Mepilex® Border Heel

踵部にフィットしながら効果的に滲出液を吸収・保持して湿潤環境を整える踵部用一体型フォームドレッシングです。

踵部にフィットするように設計された形状

- 踵部専用のドレッシングなので、カットする必要がなく、簡便に適用
- 補強のための固定材が必要ない一体型フォームドレッシング
- 踵部の屈曲部に密着するように開発されたデザインなので、患者さんにとって快適な使用感

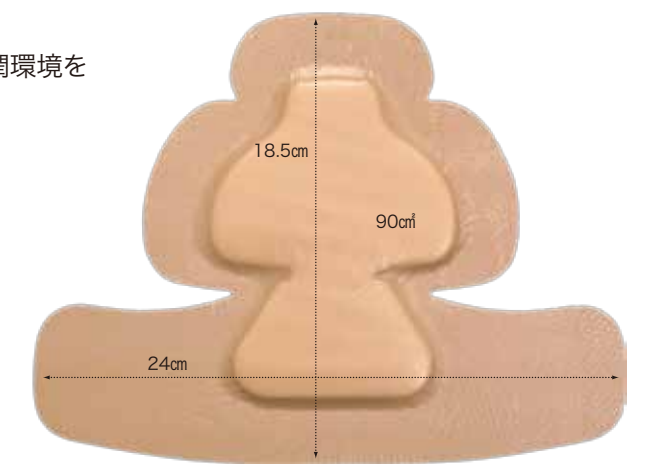

●メピレックス ボーダー ヒールタイプは、踵部の褥瘡、糖尿病性下腿潰瘍、外傷性潰瘍等に適しています。