

# メピフォーム

**【禁忌・禁止】**

創傷には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】****1. 構造**

メピフォームは、皮膚の保護を目的として使用する、粘着性のあるシリコンゼルのシートです。

**\*\* 2. 形状、寸法**

| 製品番号   | サイズ     | 入り数  |
|--------|---------|------|
| 293200 | 5×7.5cm | 5枚/箱 |
| 293400 | 10×18cm | 5枚/箱 |
| 293100 | 4×30cm  | 5枚/箱 |

**【使用目的又は効果】**

外部の汚染物質から皮膚部位を保護するために皮膚に粘着する。

**【使用方法等】****\*\* 1. 使用方法**

- パッケージを開けて、メピフォームを取り出して下さい。
- メピフォームは、傷あと（瘢痕）の大きさや形に合わせて、切って使用できます。その場合、傷あと（瘢痕）より1cmくらい大きめに切って下さい。
- メピフォームを貼る部分の水分をふき取り、十分に乾燥させて下さい。軟膏等を塗って使用する場合は、軟膏を塗った部分を覆えるようにメピフォームを貼って下さい。
- 剥離フィルムを取り除いて、メピフォームを伸ばさないように貼って下さい。

**2. 交換方法**

- メピフォームの連続使用時間は24時間です。1日1回は剥がして、皮膚の状態を見て、傷あと（瘢痕）部分をよく洗ってから再度メピフォームを貼って下さい。
- メピフォームは、再使用が可能ですが、粘着性がなくなった場合は新しいメピフォームと交換して下さい。
- メピフォームは、防水性があります。入浴やシャワー中にもご使用いただけます。

**【使用上の注意】****\*\* 1. 重要な基本的注意**

メピフォーム使用中に皮膚のふやけ、かゆみ、赤みなどの症状が現れた場合には、使用を一時中止して下さい。症状が改善したら、初めは一日の使用時間を短めにし、少しずつ長くするようにしてご使用下さい。症状が改善しない場合、繰り返し同じ症状が現れる場合には、医師にご相談下さい。

創傷部を十分に観察し、皮膚の状態に合わせて適切に交換すること。

**2. その他の注意**

メピフォームは滅菌済みです。包装に破損等がない限りは無菌性は保証されています。

再滅菌はできません。

**\*\* 【保管方法及び有効期間等】**

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。  
使用期限は包装に記載（自己認証による）。

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：メンリッケヘルスケア株式会社  
電話：03-6914-5004