

Conseils de pose

Mepilex[®] Border Flex

Pose sur le genou

Mepilex® Border Flex Carré - 17.5 x 23 cm



Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de **Mepilex® Border Flex Carré** appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central. Ne pas poser sur membre fléchi.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 4** La tenue du pansement est sécurisée.

Pose sur le coude

Mepilex® Border Flex Oval - 10 x 12.5 cm



Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de **Mepilex® Border Flex Oval** appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central. Ne pas poser sur membre fléchi.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 4** La tenue du pansement est sécurisée.

Pose sur le tendon d'Achille

Mepilex® Border Flex Carré - 10 x 10 cm



Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de **Mepilex® Border Flex Carré** appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement en ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur. Ne pas poser sur membre fléchi.
- 3** Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 4** La tenue du pansement est sécurisée.

Pose sur le côté du pied

Mepilex® Border Flex Carré - 10 x 10 cm



Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de Mepilex® Border Flex Carré appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement en ayant préalablement retiré le premier feuillet protecteur. Ne pas poser sur membre fléchi.
- 3** Retirer le feuillet protecteur restant. Poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 4** La tenue du pansement est sécurisée.

Pose sur l'épaule

Mepilex® Border Flex Oval - 13.5 x 16.5 cm




Étape par étape :

- 1** Choisir la taille de **Mepilex® Border Flex Oval** appropriée de façon à ce que la compresse du pansement couvre la plaie et dépasse sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm afin de protéger celle-ci de la macération et de permettre une fixation sécurisée du pansement.
- 2** Poser le pansement en ayant préalablement retiré le feuillet protecteur central. Ne pas poser sur membre fléchi.
- 3** Retirer les 2 feuillets protecteurs latéraux, poser et lisser les bords sur la peau. Ne pas étirer.
- 4** La tenue du pansement est sécurisée.

Mepilex® Border Flex


Carré



Dimension totale (cm)	7,5 x 8,5	10 x 10	14 x 15	17,5 x 17,5	17,5 x 23
Dimension compressée (cm)	4,5 x 4,5	6,5 x 6,5	10 x 11	11 x 11	11 x 16


Mepilex® Border Flex

Oval



Dimension totale (cm)	7,5 x 9,5	10 x 12,5	13,5 x 16,5	16 x 20
Dimension compressée (cm)	3,5 x 5,5	6,2 x 8,5	9 x 12	11 x 15,4

REMBOURSÉS
LPPR*



SafetaC

TECHNOLOGY

Mepilex® Border Flex

Carré

Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)
7323 190 196 562	7,5 x 8,5	4,5 x 4,5	16
7323 190 250 561	NOUVEAU	10 x 10	16
7323 190 196 555	14 x 15	10 x 11	16
7323 190 196 579	17,5 x 17,5	11 x 11	10
7323 190 196 586	17,5 x 23	11 x 16	10

Mepilex® Border Flex

Oval

Code ACL 13	Dimension totale (cm)	Dimension compressée (cm)	Boîte (pcs)
7323 190 220 489	7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	16
7323 190 220 496	10 x 12,5	6,2 x 8,5	16
7323 190 220 465	13,5 x 16,5	9 x 12	16
7323 190 220 472	16 x 20	11 x 15,4	10

Distributeur : Mölnlycke Health Care
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal Cedex

Fabricant : Mölnlycke Health Care, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden
Tél : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

Service clients & Renseignements produits :
Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

Réclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

www.molnlycke.fr

© Copyright 2020

Mepilex Border Flex Carré, Mepilex Border Flex Oval : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel.

Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Mölnlycke Health Care et Mepilex, sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.
Tous les produits mentionnés sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux CE 2797. L'organisme notifié pour l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).



Mölnlycke®