

NAUJAS

Mepilex[®] Border Heel Mepilex[®] Border Sacrum

Produktų naudojimo rekomendacijos



Mepilex[®] Border


Mölnlycke[®]

Mepilex® Border Heel

Produkto naudojimo rekomendacijos

ATKREIPTI
DĖMESĮ

Esant infekcijos požymiams, Mepilex® Border Heel naudojimas gali būti tęsiamas, jei skiriamas tinkamas infekcijos gydymas.


Paruoškite vietą tvarščiui uždėti:

Nuvalykite odos plotą, ant kurio klijuosite tvarstį.

Kruopščiai nusausinkite aplinkinę odą.

Užtikrinkite, kad ant odos nėra dimetikono, odos klijų ir emolientų.

Po tvarščiu odos barjero priemonių naudoti nereikia.

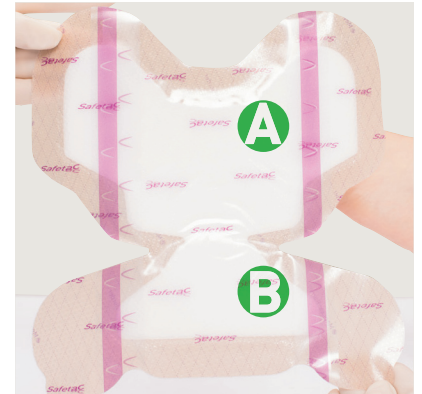

1. Kai oda/žaisda yra paruošta, nusausinkite aplinkinę odą. Nuimkite centrinę išorinę plėvelę ir pridėkite tvarstį ant norimos kulno vietos.



2. Užklijuokite tvarščio dalį, pažymėtą „A“ (žr. paveikslėlį viršuje) ant aukštesnės kulno dalies ties Achilo sausgyste. Netempkite.



3. Nuimkite išorinę plėvelę nuo „A“ atvartų. Užklijuokite ir išlyginkite. Netempkite.



4. Švelniai užklijuokite tvarščio „B“ dalį (žr. paveikslėlį viršuje) ant kulno ties pėda. Netempkite.



5. Nuimkite išorinę plėvelę nuo „B“ atvartų. Užklijuokite ir išlyginkite. Netempkite.



6. Paspauskite ir išlyginkite tvarstį, užtikrindami, kad visas tvarstis prigluo prie odos.

Odos / žaizdos patikra



1. Švelniai patraukite už specialių sparnelių ir nuimkite tvarstį nuo odos.



5. Užtikrinkite, kad tvarstis užklijuotas ties ankstesne pozicija ir rėmelis yra lygus.

Patarimai

- Susiekite **A** su „Achilu“, kad prisimintumėte, kaip teisingai uždėti tvarstį
- Tvarstį klijuokite tik ant švarios, sausos odos
- Netempkite tvarščio, jį uždėdami
- Jei pacientas gydomas ambulatoriškai, galima kartu naudoti neslystančias kojines – padės tvarščiui geriau išsilaikyti vietoje
- Judriems pacientams galima kartu naudoti Tubifast® ar kitus tubularinius tvarščius.

Mepilex® Border Sacrum

Produkto naudojimo rekomendacijos

Paruoškite vietą tvarščiui uždėti:

Nuvalykite odos plotą, ant kurio klijuosite tvarstį.


Kruopščiai nusauskite aplinkinę odą.

Užtikrinkite, kad ant odos nėra dimetikono, odos klijų ir emolientų.




Tinkama forma:

- Tvarstis turi būti uždėtas taip, kad atitiktų paciento anatomiją.
- Užtikrinkite, kad tvarstis priglunda prie odos ir nelieka plyšių ar kišenių.

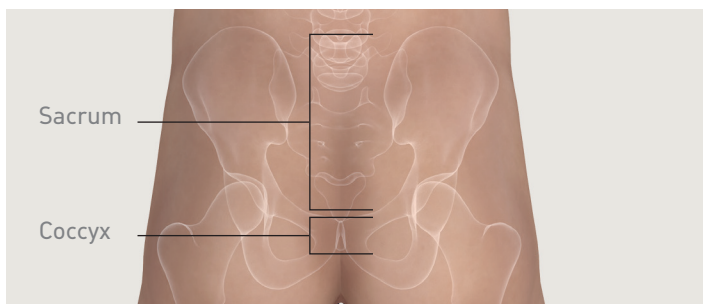

1. Saugomas plotas. Įvertinkite paciento anatomiją ir nustatykite tinkamą tvarščio vietą.

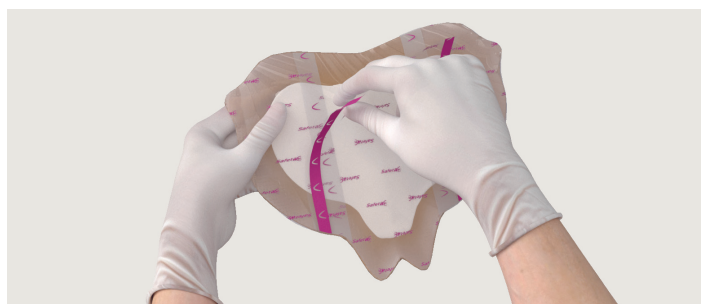


2. Kai oda paruošta, nuimkite centrinę išorinę plėvelę, švelniai traukdami už rožinio krašto.



3. Atitraukite sėdmenis vieną nuo kito. Uždėkite tvarstį ties kryžkauliu, kad tvarščio pagrindas uždengtų stuburgalį.



4. Nuimkite šonines išorines plėveles ir švelniai užklijuokite tvarščio šonus.

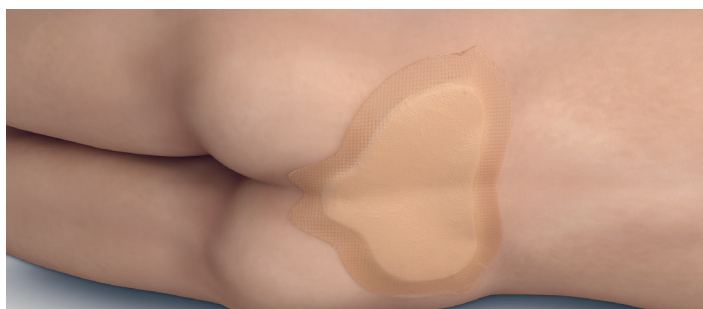

5. Tvarščio vieta.




6. Paspauskite ir išlyginkite tvarstį, užtikrindami, kad jis pilnai liečiasi su oda.

Odos / žaizdos patikra



4. Odos patikrą atlikite, pakėlę tvarstį už specialių sparnelių, patį tvarstį išlaikydami ties sėdmenų tarpu.

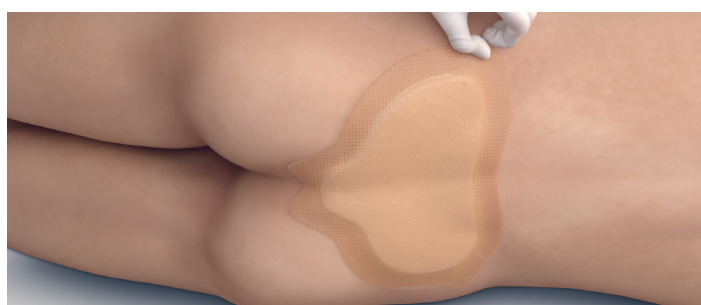

6. Užtikrinkite, kad tvarstis užklijuotas ties ankstesne pozicija ir rėmelis yra lygus.

Patobulinti moksliskai pagrįsti Mepilex® Border Sacrum ir Mepilex® Border Heel tvarsčiai

Geresnis prigludimas tarp sėdmenų, geresnė kryžkaulio apsauga¹


Mepilex®
Border
Sacrum




Specialūs sparneliai parodo vietą, už kurios reikia laikyti, norint pakelti ar nuimti tvarstį

Patobulinta tvarsčio forma geresniam rizikingų vietų uždengimui¹

TOKIA PATI unikali ir sauganti 5-sluoksnių konstrukcija

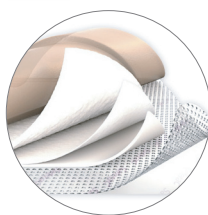

Storesni tvarsčio kraštai patogesniau naudojimui¹

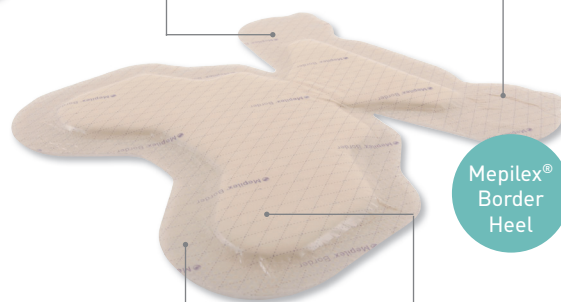

Mepilex®
Border
Heel

Geresnis kulknies uždengimas suteikia didesnę apsaugą¹

Prevencija

Įrodyta, kad naudojant profilaktiskai, Mepilex® Border Sacrum ir Mepilex® Border Heel apsaugo odą nuo pažeidimo, kurį sukelia spaudimas, šlytis, trintis ir mikroklimatas². Safetac technologijos sluoksnis apsaugo odą, išlaikant optimalią poziciją ir sumažinant trintį ir šlytį ties tvarsčio vieta². Dėl Safetac technologijos tvarsčio poziciją galima keisti.

Privalumai

- Lipnus – nereikia papildomos fiksacijos
- Nesukelia skausmo ir traumos keitimo metu^{5,6,7}
- Galima naudoti keletą dienų
- Galima keisti tvarsčio poziciją, neprarandant lipnumo savybių

Mepilex Border Sacrum sterilių pakuočių pasirinkimas

Art. Nr.	Dydis, cm	Vnt. pakuotėje	Vnt. transp. dėžėje
282450	22 x 25	5	30

Mepilex Border Heel sterilių pakuočių pasirinkimas

Art. Nr.	Dydis, cm	Vnt. pakuotėje	Vnt. transp. dėžėje
282710	22 x 23	10	30

Nuorodos: 1. Davies P. User evaluation of interface dressings for pressure ulcer prevention. *Mölnlycke Health Care (GMCS-2017-058)* 2017 2. Black J. et al. Consensus statement: Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to augment pressure ulcer prevention protocols - August 2012 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. *Wounds UK*, 2005 4. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHs, Toronto, Canada, 2008 5. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. *Wounds UK*, 2005 6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. *Wounds UK* 2008, Vol 4, No 1. 7. Dykes et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. *Journal of Wound Care* February, Vol 10, No 2. 2001

Daugiau informacijos: www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care UAB, J. Galvydžio g. 5, 08236 Vilnius.

Žaizdų priežiūros produktų specialistai:

Vilniuje: mob. tel. +370 655 55866

Kaune: mob. tel. +370 656 49744

Klaipėdoje: mob. tel. +370 659 76791

Mölnlycke, Mepilex ir Safetac prekiniai ženklai, pavadinimai ir logotipai yra registruoti globaliai vienos arba daugiau Mölnlycke Health Care grupės kompanijų. ©2017 Mölnlycke Health Care AB. Visos teisės saugomos.