

Biogel® Tech-hansker

Biogel® Tech-hanskene er utviklet til bruk i kontrollerte miljøer. Den dobbeltpakkede og varmforsseglede emballasjen er i samsvar med hygieneprotokollene og sikrer enkel bruk.

Slik pakker du ut Biogel Tech-hanskene samtidig som du sikrer god hygiene

1



Bruk et plastforkle for å beskytte klærne dine mot smuss fra pappkartongen. Dette smusset kan ellers havne på plastposene i esken når kartongen åpnes og pakkes ut.



Hver transportkartong inneholder 200 par hansker. Hvert av de fire rommene i kartongen rommer 2x25 par hansker pakket i varmforsseglede, doble plastposer*.

2



Før du tar ut plastposene, må du desinfisere hendene. Pass på at du ikke berører plastposene med kontaminerte hender.



Legg posene på en ren og desinfisert overflate.

*160 par i størrelse 9.

3




Vi anbefales at du bruker en saks når du åpner den ytre plastposen. Begynn med kantene for å minimere risikoen for kontaminering. Pass på å brette plasten utover uten å berøre den innvendige plastposen.

4



Desinfiser hendene før du plasserer de 25 parene (som fortsatt er i plastposen) på en annen ren og desinfisert overflate.

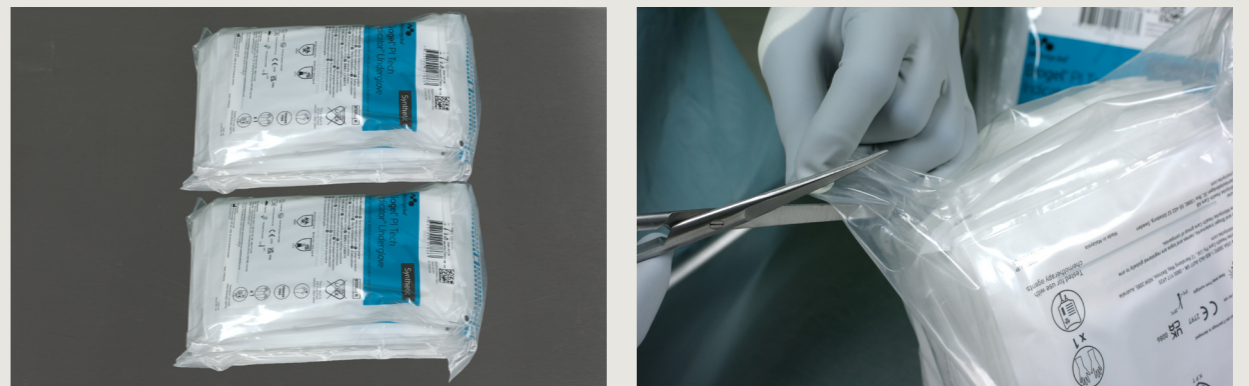

Hanskene kan oppbevares i den indre plastposen eller pakkes opp og legges i en oppbevaringsboks. Ta på egnede verneklær og sterile hansker før de sterile barrierene brytes på den innvendige plastposen. Bruk saksen til å klippe av bunnen av plastposen, slik at det blir enkelt å overføre innholdet til oppbevaringsboksen.



Hanskene kan nå lagres nærmere stedet der de skal brukes.

Biogel Tech-serien – Pakk ut neste sikkerhetsnivå

Hvert par med Biogel Tech-hansker er pakket i et omslag av polyetylen av høy kvalitet for å holde partikkelantallet på et minimum. Innpakningen er konstruert for å være åpen når den brettes ut for å sikre aseptisk bruk av hanskene. Paret pakkes deretter inn i en steril barriere av laminatpolyester og polyetylen med lav tetthet.

Les mer på www.molnlycke.com

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf. 22 70 63 70
Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke og Biogel er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2022 Mölnlycke Health Care AB. Med enerett.



Biogel® Tech

Presisjon ved hver berøring



Mölnlycke®