

Avkledningsveiledning for operasjonsfrakker og hansker

Avkledning av kontaminert frakk og hansker



1. For å beskytte arbeidsklærne (avdelingsbekledning/clean air suit), armer og hender fra mikrober som er tilstede på utsiden av skitten frakk og hansker, må hanskene og frakken tas av på en spesifikk måte.



2. Start med å ta av den ene skitne ytterhansken og kast den.



3. Fortsett og ta av den andre ytterhansken og kast den.



4. Ta tak i frakken i skulder eller midjeområdet (som vist på bildet). Ved bruk av flergangsfrakk - knyt opp frakken; den assisterende person må knyte opp i ryggen.



5. Trekk ryggen og ermene på frakken fremover, over og av hendene med hansker ved å vende frakken med innsiden ut samtidig som hanskens mansjett følger med.



6. Hold armer og frakken bort fra kroppen mens du krøller sammen frakken med innsiden ut og kaster frakken.



7. Bruk fingrene på den ene hånden med hanske til å holde på mansjetten mens hansken fjernes med innsiden ut. Bruk deretter hånden uten hanske til å ta tak i den vregnte mansjetten på den andre hansken. Denne hansken fjernes også med innsiden ut. Kast hanskene og desinfiser hendene.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Norge. Tlf 22 70 63 70. info.no@molnlycke.com
Mölnlycke Health Care og Biogel navn og logo er registrerte varemerker globalt til Mölnlycke Health CareGruppen. ©2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU0571905