



## Påkledningsveiledning: Operasjonsmunnbind med ørestrikker

- A. Hold ørestrikkene med fingrene. Nesebøylen skal være øverst. Plasser munnbindet over nese og munn.
- B. Plasser ørestrikkene bak ørene. Dra så i munnbindet fra øverst til nederst for å folde den riktig ut. Dette vil føre til optimal dekking av ansiktet og vil minimere lagene man puster gjennom.
- C. Klem nesebøylen over neseryggen for å minimere luftlekkasje.
- D. Ører og hår bør tildekkes med riktig hodeplagg for å hindre spredning av hår og andre hudpartikler. Dersom det er risiko for væskesprut, må du bruke et 4-lags sprutsikkert operasjonsmunnbind. Bytt munnbind hvis det er kontaminert og mellom operasjoner.
- E. Kast operasjonsmunnbindet etter bruk.