

# Veiledning for bandasjeskift

Din behandler har valgt Exufiber® bandasje til såret ditt.

## Slik legger du på Exufiber® bandasje:

### Fjern de gamle bandasjene

1. Vask hendene med såpe og varmt vann i 20 sekunder.
2. Fjern den ytterste bandasjen og deretter Exufiber. Kast brukte bandasjer i en pose.
3. Vask hendene grundig på nytt, og ta eventuelt på hansker før du legger på de nye bandasjene.

### Legg på de nye bandasjene

1. Rens såret slik din behandler har vist deg, og tørk den omkringliggende huden grundig.
2. Ta ut Exufiber fra pakningen, og legg den på såret. Bandasjen skal overlappe den omkringliggende huden.
3. Legg en ytterbandasje over Exufiber.



## Når skal bandasjen skiftes:

Din behandler vil fortelle deg når du skal skifte bandasjen (fylles ut av helsepersonell):

### Viktig å huske på:

- ✓ Exufiber er kun til engangsbruk og skal ikke brukes flere ganger.

Exufiber skal håndteres og legges på av helsepersonell. Dersom helsepersonell ikke er tilgjengelig, kan du eller en omsorgsperson måtte foreta bandasjeskiftet. Produsenten tar ikke noe ansvar når appliseringen av bandasjen foretas av slike personer. Hvis Exufiber legges på av en person som ikke er helsepersonell, så skjer dette helt og holdent på brukerens egen risiko.

## Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene Mölnlycke og Exufiber er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Med enerett. NOWC1602007

Kontakt helsepersonell hvis du trenger hjelp eller veiledning.