


# Veiledning for bandasjeskift

Din behandler har valgt Mepilex® Lite bandasje til såret ditt.

## Slik legger du på Mepilex® Lite:


1. Vask hendene med såpe og varmt vann i 20 sekunder.
2. Rens såret slik din behandler har vist deg, og tørk den omkringliggende huden grundig.
3. Bandasjen skal overlappe den tørre omkringliggende huden. Hvis din behandler anbefaler det kan du klippe i bandasjen for å tilpasse den til sårets form og plassering.
4. Fjern det første beskyttelsespapiret.

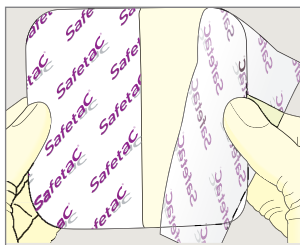

5. Legg den heftende siden mot såret. Fjern resten av beskyttelsespapiret, og glatt ut bandasjen på huden. Bandasjen må ikke strekkes.



6. Fikser Mepilex Lite med en egnet bandasje eller tape slik din behandler har fortalt deg.

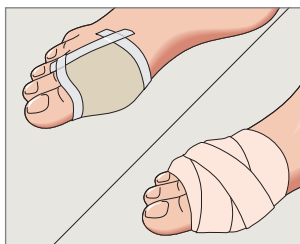

## Når skal bandasjen skiftes:

Din behandler anbefaler at du skifter bandasjen (fylles ut av helsepersonell):

Viktig å huske på:

- ✓ Mepilex Lite er kun til engangsbruk og skal ikke brukes flere ganger.

Kontakt helsepersonell hvis du trenger hjelp eller veiledning.

Mepilex Lite skal håndteres og legges på av helsepersonell. Dersom helsepersonell ikke er tilgjengelig, kan du eller en omsorgsperson måtte foreta bandasjeskiftet. Produsenten tar ikke noe ansvar når appliseringen av bandasjen foretas av slike personer. Hvis Mepilex Lite legges på av en person som ikke er helsepersonell, så skjer dette helt og holdent på brukerens egen risiko.

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Molnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene Molnlycke og Mepilex er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Molnlycke Health Care. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Med enerett. NOWC1642007

  
Molnlycke®