


Mepitac®

Appliseringsguide


Kateter og sonde

Mepitac er utviklet for fiksering av medisinsk utstyr som katetere, sonder og slanger. Dessuten beskytter Mepitac huden under for eksempel O₂-maske¹.

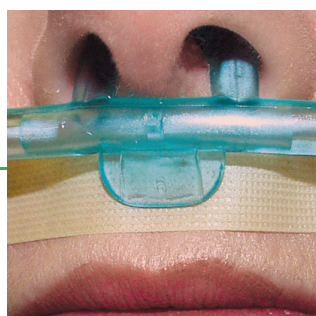


Drenslange

Oppnå sikker fiksering av slanger ved å sette tapen rundt slangen. Slik minsker du risikoen for trykk eller friksjon mot huden.

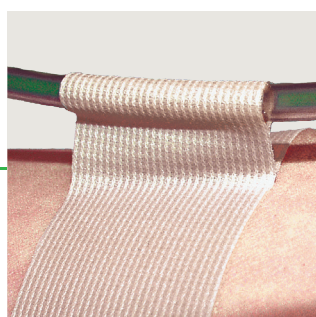

Kanyle

Bruk Mepitac for fiksering av ulike typer kanyler. Vi anbefaler å bruke noe større størrelse enn ved bruk av vanlig tape.

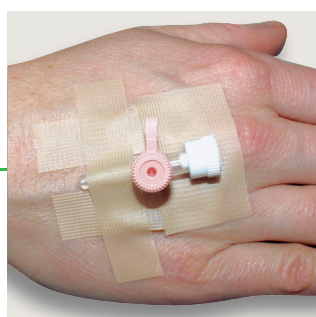


Infusjonsslange og bandasje

Oppnå sikker fiksering av slanger ved å plassere tapebiter langs slangen. Kontroller at slangen ikke utgjør trykk mot huden. Ved fiksering av bandasje, legg Mepitac som en ramme rundt bandasjen.



Barn


Mepitac er egnet for pasienter med følsom hud, for eksempel barn. Obs! Mepitac hefter dårligere i et fuktig miljø, for eksempel i kuvøse og på pasienter som svetter mye.

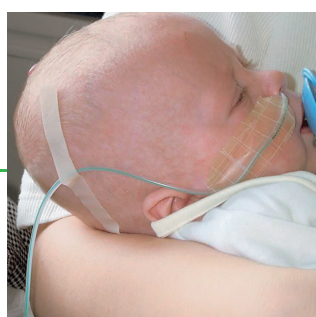

Det finnes en rekke problemer i forbindelse med fiksering, som for eksempel hudirritasjoner, allergier og vevskade ved bandasjeskift. Mepitac er en hudvennlig medisinsk tape med Safetac®-teknologi. Den myke silikonflaten gir en skånsom, men sikker fiksering uten å forårsake skade og smerte. Mepitac er behagelig å ha på, samt enkel å sette på og ta av.


Fiksering med mindre skade

Mepitac minimerer skade på huden, og er derfor godt egnet for pasienter som krever varsom applisering og gjentatt fjerning fra samme hudområde, for eksempel neonatal, stomi- og dialysepasienter.

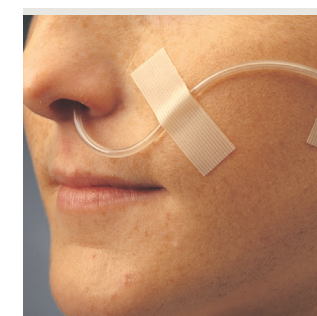

Fiksering med mindre smerte

Mepitac er den ideelle fiksering for pasienter med skjør og ømfintlig hud eller hudsykdommer som allergi eller dermatitt. Den myke silikonflaten (Safetac® teknologi) minimerer skade og smerte ved fjerning¹⁻².

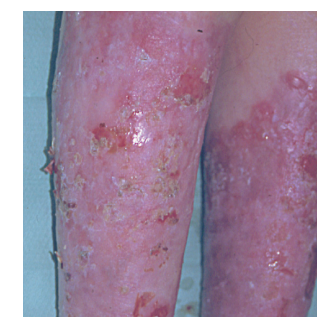

Fiksering uten rester

Mepitac etterlater ingen rester på huden eller på katetere/slanger. Mepitac er vannrett.

Bruksområder

Mepitac er utviklet for fiksering av bandasjer og medisinsk utstyr som katetere, slanger, sonder og IV-kanyler. Dessuten gir Mepitac en skånsom beskyttelse for huden under for eksempel slanger¹.



NB!

Hefteegenskapen til Mepitac kan avta ved bruk i et fuktig miljø, som for eksempel i kuvøse, eller på pasienter med feber eller som svetter mye. Mepitac egner seg ikke til fiksering av arteriekran eller -kanyler.

Referanse:

1. Mölnlycke Health Care. Data on file.
2. Dykes P et al. Journal of Wound Care, 2001;10:2:7-10

Mepitac leveres usterile på rull

Art. nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
298300	2 x 300	1	12
298400	4 x 150	1	12
Apotekspakning med oppheng			
298370	2 x 300	1	12