



Riktig anbefaling til forskjellige typer sår



Safetac[®]-teknologi gjør mindre vondt

Safetac er en hefteteknologi med myk medisinsk silikon som minimerer smerte for pasienten og skade på såret. Safetac-teknologi er kun tilgjengelig i Mölnlycke Health Care sine bandasjer, inkludert Mepilex[®]-bandasjene, Mepitel[®], Mepiform[®] og Mepitac[®].

Safetac-teknologi betyr

- 1) det fester seg skånsomt til tørre overflater, slik som hud, men ikke til fuktige såroverflater
- 2) det former seg etter hudens porer, og danner en stor og effektiv kontaktflate som jevnt fordeler avrivningskreftene ved bandasjeskift
- 3) det forsegler sårkantene, og forhindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed minimeres risikoen for oppbløtning av sårkantene

TRADISJONELLE HEFTEMIDLER

Selvheftende skum I

Selvheftende skum II


Hydrokolloid I

Selvheftende skum III


SAFETAC[®]-TEKNOLOGI

Mepilex[®] Border*

Før bandasjeskift

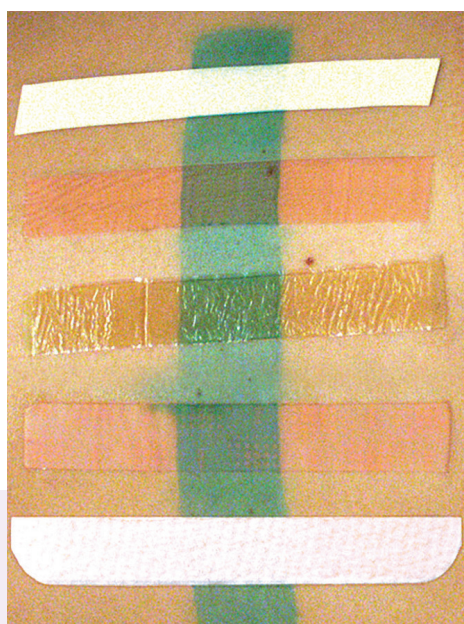

Etter bandasjeskift

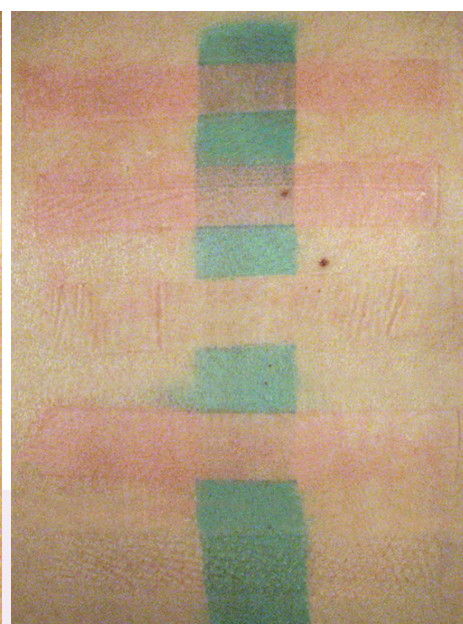

En studie sammenlignet hvor mye stripping av epidermale hudceller som oppsto ved bruk av bandasjer med Safetac-teknologi, i forhold til fire bandasjer med tradisjonell hefting. Hudene ble farget på forhånd for å gi en indikasjon på hvor mye av stratum corneum som ble fjernet av bandasjene.

Mengden gjenværende farge på huden etter 72 timer ble vurdert. For bandasjer med Safetac-teknologi var de fargede områdene intakte. Studien viser at bandasjer med Safetac er atraumatiske og forårsaker ikke stripping av hud⁷.

MINDRE STRIPPING AV HUD⁷
MINDRE HEFTING I SÅRET⁶
MINDRE MASERASJON^{8,9}

* Mepilex Border er nå oppgradert og heter Mepilex Border Flex.

Valg av riktig bandasje

For å kunne gi profesjonell hjelp og forsikre deg om at du anbefaler riktig bandasje, må du stille kunden noen spørsmål.

Eksempler på hvilke spørsmål du kan stille kunden:

- ✓ Hvilke type sår har du? Er det mulig å få se på såret?
- ✓ Hvor lenge har du hatt såret?
- ✓ Væsker såret ditt (blod eller sårveske)?
- ✓ Har du besøkt lege? Hvis ja, hva anbefalte legen?
- ✓ Eventuelle hudreaksjoner eller limallergi?
- ✓ Smerte ved bandasjeskift?
(Ved tegn på infeksjon bør kunden oppsøke lege)

Når kunden har svart på disse spørsmålene er det opp til deg å foreslå riktig bandasje. Kunder med følgende sår har særlig nytte av Safetacs positive egenskaper:

- ✓ Smertefulle sår
- ✓ Sensitiv hud/limallergi
- ✓ Sår som væsker mye (blod eller sårveske)



Faglige råd og anbefalinger

Sårtype	Anbefalt produkt	Faglig begrunnelse og veiledning
SKRUBBSÅR/ HUDAVSKRAPNINGER 	<p>Mepilex® Border Flex Lite</p> <p>Mepitel® One</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skumbandasjen Mepilex Border Flex Lite har klebekant og velges hvis såret er enkelt å fiksere. • Skånsom mot huden og bandasjen klarer å ta imot mer sårveske enn et vanlig plaster eller en selvheftende, enkel bandasje. • Kan løftes opp daglig for å kikke på såret og lukkes igjen, uten å skifte selve bandasjen. • Kan ligge på i opptil 7 dager, avhengig av sårets tilstand, noe som er kostnadsbesparende. • Kan brukes under dusjing. • Gir såret optimale forhold for å gro. • Bedre beskyttelse mot infeksjon. <ul style="list-style-type: none"> • Sårkontaktlaget Mepitel One kan benyttes alene uten absorberende bandasje over hvis såret ikke væsker. • Kan ligge på i opptil 14 dager, avhengig av sårets tilstand, som er kostnadsbesparende. • Gir såret optimale forhold for å gro.
BRANNSÅR 	<p>Mepitel® One</p> <p>Mesorb®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sårkontaktlaget Mepitel One kan ligge på i opptil 14 dager, avhengig av sårets tilstand, noe som er kostnadsbesparende. • Gir såret optimale forhold for å gro. • Hvis såret væsker og du har en absorberende kompress eller bandasje over Mepitel One, kan du bytte kun denne og la Mepitel One ligge på såret. <ul style="list-style-type: none"> • Mesorb kan absorbere mye sårveske og kan derfor benyttes som en ytterbandasje ved væskende sår. <p>Små og overfladiske delhudsbrannsåre kan man behandle selv, mens ved større eller dypere brannsåre må lege oppsøkes.</p>
SÅR SOM VÆSKER 	<p>Mepilex® Border Flex</p> <p>Mepilex®</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skumbandasjen Mepilex Border Flex har klebekant og velges hvis såret er enkelt å fiksere. • Skånsom mot huden og bandasjen klarer å ta imot mer sårveske enn et vanlig plaster eller selvheftende, enkel bandasje. • Kan løftes opp daglig for å kikke på såret og lukkes igjen, uten å skifte selve bandasjen. • Sitter ikke fast i såret. • Kan ligge på i opptil 7 dager, avhengig av sårets tilstand, som er kostnadsbesparende. • Kan brukes under dusjing. • Gir såret optimale forhold for å gro. • Bedre beskyttelse mot infeksjon. <ul style="list-style-type: none"> • Mepilex uten klebekant velges hvis det er behov for å klippe og tilpasse bandasjen. Krever fiksering med f.eks. Mepitac tape eller Tubifast tubulær bandasje.



Sårtype	Anbefalt produkt	Faglig begrunnelse og veiledning
OPERASJONSSÅR 	Mepilex® Border Flex Mepore® Mepore® Pro	<ul style="list-style-type: none"> • Skumbandasjen Mepilex Border Flex har klebekant og velges hvis såret er enkelt å fiksere. • Skånsom mot huden din og bandasjen klarer å ta imot mer sårveske enn et vanlig plaster eller en selvheftende, enkel bandasje. • Kan løftes opp daglig for å kikke på såret og lukkes igjen, uten å skifte selve bandasjen. • Kan ligge på i opptil 7 dager, avhengig av sårets tilstand, som er kostnadsbesparende. • Sitter ikke fast i såret. • Kan brukes under dusjing. • Gir såret optimale forhold for å gro. • Bedre beskyttelse mot infeksjon. <ul style="list-style-type: none"> • Mepore og Mepore Pro kan brukes til operasjonssår som ikke væsker særlig, og hvor brukeren ikke har smerter, limallergi eller ømfintlig hud.
ARR 	Mepiform®	<ul style="list-style-type: none"> • Mepiform hindrer utviklingen av stygge arr. • Effekt på både gamle og nye arr. • Tar ikke med hudceller når den fjernes, slik som papir- og silketape. Sårkantene i arret vil dermed få mer ro og heles. • Anbefalt behandlingsperiode: 2-6 måneder på nye arr, 3-24 måneder på gamle arr. • Kan brukes under dusjing, men det kan være gunstig å fjerne den under dusjing og sette på samme bit igjen etter å ha tørket huden godt.

Bandasjer med SafetaC®-teknologi

* Produktet er på refusjon

Produkt	Mölnlycke varenr.	Størrelse	Antall pr. eske	Beskrivelse
 <p>Mepitel® One SafetaC TECHNOLOGY</p> 	289160	5 × 7,5 cm	2 (PIGG)	Mykt transparent sårkontaktlag. Kan brukes alene på sår som ikke væsker eller i kombinasjon med en absorberende ytterbandasje dersom såret væsker.
	289100	5 × 7,5 cm *	10	
	289300	7,5 × 10 cm *	10	
	289500	10 × 18 cm *	10	
	289700	17 × 25 cm *	5	
	289750	27,5 × 50 cm *	2	
 <p>Mepitel Film® SafetaC TECHNOLOGY</p> 	296170	6 × 7 cm *	10	Dusjsikker, pustende filmbandasje til beskyttelse eller fiksering.
	296270	10 × 12 cm *	10	
	296470	10 × 25 cm *	10	
	296670	15 × 20 cm *	10	
 <p>Mepilex® SafetaC TECHNOLOGY</p> 	294015	5 × 15 cm	5 (PIGG)	Pustende skumbandasje til væskende sår. Krever fiksering med f.eks. Tubifast eller Mepitac. Kan klippes og tilpasses.
	294170	10 × 10 cm	2	
	294100	10 × 10 cm *	5	
	294200	10 × 20 cm *	5	
	294300	15 × 15 cm *	5	
	294400	20 × 20 cm *	5	
	294500	20 × 50 cm *	2	
	288100	13 × 20 cm * Heel	5	
	288300	15 × 22 cm * Heel	5	
 <p>Mepilex® Lite SafetaC TECHNOLOGY</p> 	284000	6 × 8,5 cm *	5	Tynn, pustende skumbandasje til mindre væskende sår. Krever fiksering med f.eks. Tubifast eller Mepitac. Kan klippes og tilpasses.
	284100	10 × 10 cm *	5	
	284300	15 × 15 cm *	5	
	284500	20 × 50 cm *	4	
 <p>Mepilex® Border Flex SafetaC TECHNOLOGY</p> 	595200	7,5 × 7,5 cm *	5 (PIGG)	Dusjsikker, fleksibel skumbandasje som kan håndtere store mengder sårvæske. Flex-teknologien gjør at bandasjen er mer fleksibel og dermed spesielt godt egnet til bruk over ledd og at den kan sitte på lenger.
	595270	7,5 × 7,5 cm	3	
	595300	10 × 10 cm *	5	
	595370	10 × 10 cm	2 (PIGG)	
	595000	12,5 × 12,5 cm *	5	
	595400	15 × 15 cm *	5	
	595600	15 × 20 cm *	5	
	595800	10 × 20 cm	10	
	595850	10 × 25 cm *	10	
	595900	10 × 30 cm	10	
	583500	7,8 × 10 cm * Oval	5	
	583300	13 × 16 cm * Oval	5	
	583400	15 × 19 cm * Oval	5	
	 <p>Mepilex® Border Flex Lite SafetaC TECHNOLOGY</p> 	581011	4 × 5 cm *	
581070		4 × 5 cm	2	
581100		5 × 12,5 cm *	5 (PIGG)	
581170		5 × 12,5 cm	3	
581200		7,5 × 7,5 cm *	5 (PIGG)	
581270		7,5 × 7,5 cm	3	
581300		10 × 10 cm *	5	
581500		15 × 15 cm *	5	
 <p>Mepilex® Transfer SafetaC TECHNOLOGY</p> 	294600	7,5 × 8,5 cm *	5	Lindrende skumkontaktlag til beskyttelse eller til transport av væske. Kan brukes i kombinasjon med ammeinnlegg eller en absorberende bandasje og fiksering.
	294700	10 × 12 cm *	5	
	294800	15 × 20 cm *	5	
	294502	20 × 50 cm *	5	
 <p>Mepilex® Ag SafetaC TECHNOLOGY</p> 	287110	10 × 10 cm	5	Antimikrobiell, pustende skumbandasje til væskende sår. Krever fiksering med f.eks. Tubifast eller Mepitac.
	287210	10 × 20 cm	5	
	287310	15 × 15 cm *	5	
	287410	20 × 20 cm *	5	
	287510	20 × 50 cm *	2	
 <p>Mepilex® Border Ag SafetaC TECHNOLOGY</p> 	395200	7,5 × 7,5 cm *	5	Antimikrobiell, pustende alt-i-ett skumbandasje til væskende sår.
	395300	10 × 10 cm *	5	
	395400	15 × 15 cm	5	
	395600	15 × 20 cm	5	

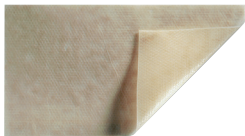


* Produktet er på refusjon

Produkt	Mölnlycke varenr.	Størrelse	Antall pr. eske	Beskrivelse
 Mepiform® <small>SafetaC TECHNOLOGY</small>	293770	5 × 7,5 cm	2 (PIGG)	Diskré bandasje til arrbehandling. Solbeskyttelse klasse 5.
	293200	5 × 7,5 cm	5	
	293400	10 × 18 cm	5	
	293100	4 × 30 cm	5	
 Mepitac® <small>SafetaC TECHNOLOGY</small>	298370	2 cm × 3 m *	1 (PIGG)	Dusjsikker, pustende fikseringstape til å feste bandasjer, slanger med mer.
	298400	4 cm × 1,5 m *	1	
 Mestopore® S <small>SafetaC TECHNOLOGY</small> 	665100	9 × 10 cm *	20	Dusjsikker, pustende og absorberende stomibandasje.



Mepilex Border Flex Oval

Tradisjonelle bandasjer

Produkt	Mölnlycke varenr.	Størrelse	Antall pr. eske	Beskrivelse	
	Mepore®	672000	5 × 7 cm	60	Selvheftende, pustende og absorberende bandasje.
		670860	6 × 7 cm	5 (PIGG)	
		670800	6 × 7 cm *	60	
		672100	8 × 10 cm *	50	
		672200	8 × 15 cm *	50	
		670960	9 × 10 cm	5 (PIGG)	
		671066	9 × 15 cm	5 (PIGG)	
		671170	9 × 20 cm	5 (PIGG)	
		671100	9 × 20 cm	30	
		671200	9 × 25 cm	30	
		671300	9 × 30 cm	30	
		671400	9 × 35 cm	30	
		331980	4 cm × 2 m rull	1	
		332080	7 cm × 2 m rull *	1	
	Mepore® Pro	680860	6 × 7 cm	5 (PIGG)	Dusjsikker, selvheftende, pustende og absorberende bandasje.
		670820	6 × 7 cm	60	
		670920	9 × 10 cm	40	
		680960	9 × 10 cm	5 (PIGG)	
		671020	9 × 15 cm	40	
		681060	9 × 15 cm	5 (PIGG)	
		671120	9 × 20 cm	30	
		681140	9 × 20 cm	10	
		671220	9 × 25 cm	30	
		671320	9 × 30 cm	30	
	Mesorb®	677001	10 × 10 cm	50	Absorberende ikke-heftende bandasje med væskeavvisende barriere. Krever fiksering med f.eks. Tubifast eller Mepitac.
		677080	10 × 10 cm	10	
		677201	15 × 10 cm	50	
		677401	10 × 20 cm	50	
		677601	15 × 20 cm	50	
		677701	20 × 25 cm	30	
		677801	20 × 30 cm	30	
	Mestopore®	665000	9 × 10 cm *	20	Dusjsikker, absorberende stomibandasje.
	Mefix®	310570	5 cm × 2,5 m *	1	Selvheftende fiksering i mykt non-woven-materiale. Forhåndsoppmålt beskyttelsespapir for praktisk måling og klipping.
		311070	10 cm × 2,5 m *	1	
		311570	15 cm × 2,5 m *	1	
		310250	2,5 cm × 10 m *	1	
		310500	5 cm × 10 m *	1	
		311500	15 cm × 10 m *	1	
		312000	20 cm × 10 m *	1	
	Exufiber®	709900	5 × 5 cm *	10	Geldannende fiberbandasje for væskene sår og hulrom.
		709901	10 × 10 cm *	10	
		709903	15 × 15 cm *	10	
		709905	4,5 × 10 cm *	10	
		709906	4,5 × 20 cm	10	
		709907	4,5 × 30 cm	10	
		709904	20 × 30 cm	5	
		709908	1 × 45 cm *	5	
		709909	2 × 45 cm *	5	
		Exufiber® Ag+	603401	5 × 5 cm *	
		603402	10 × 10 cm *	10	
		603403	15 × 15 cm *	10	
		603404	4,5 × 10 cm *	10	
		603405	4,5 × 20 cm	10	
		603406	4,5 × 30 cm	10	
		603407	20 × 30 cm	5	
		603400	2 × 45 cm *	5	
	Tubifast®	2480	3,5 cm × 1 m rød	1	Tubulær bandasje med toveisstrek til fiksering av bandasjer eller brukes som beskyttelse eller omslag. Kan vaskes på 60 grader og gjenbrukes.
		2434	3,5 cm × 10 m rød *	1	
		2481	5 cm × 1 m grønn	1	
		2436	5 cm × 10 m grønn *	1	
		2482	7,5 cm × 1 m blå	1	
		2438	7,5 cm × 10 m blå *	1	
		2483	10,75 cm × 1 m gul	1	
		2440	10,75 cm × 10 m gul *	1	
		2479	20 cm × 1 m lilla	1	
		2444	20 cm × 10 m lilla *	1	













Tubifast® 2-Way Stretch® størrelsesguide



Kroppsdeler	Omkrets	Produkt	Bredde x lengde
Små kroppsdeler	9 – 18 cm	RØD - LITEN	1 m – 10 m
Små- og mellomstore kroppsdeler	14 – 24 cm	GRØNN - MELLOM	1 m – 3 m – 5 m – 10 m
Store kroppsdeler	24 – 40 cm	BLÅ - STOR	1 m – 3 m – 5 m – 10 m
Ekstra store kroppsdeler, hoder og barnekropper	35 – 64 cm	GUL - EKSTRA STOR	1 m – 3 m – 5 m – 10 m
Ekstra store kropper	64 – 130 cm	LILLA - EKSTRA STORE KROPPER	1 m – 5 m – 10 m



Velg riktig bandasje

Produkt		Skrubbsår/ hudavskrapning	Brannsåar	Væskende sår	Operasjonssår	Arr	Beskyttelse/ fiksering
 <p>Mepilex® Border Flex Lite</p>		✓			✓		
 <p>Mepilex® Border Flex</p>				✓	✓		
 <p>Mepilex®</p>				✓			
 <p>Mepitel® One</p>		✓	✓				
 <p>Mepiform®</p>						✓	
 <p>Mepitac®</p>							✓

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70
The Mölnlycke name and logo are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0042304

