

Myk silikontape


- Atraumatisk mot huden ved fjerning
- Ideell fiksering for pasienter med skjør hud
- Former seg etter kroppen

Safetac® teknologi

- Atraumatisk mot huden ved fjerning

Tekstil materiale


- Følgelig
- Lett å klippe til

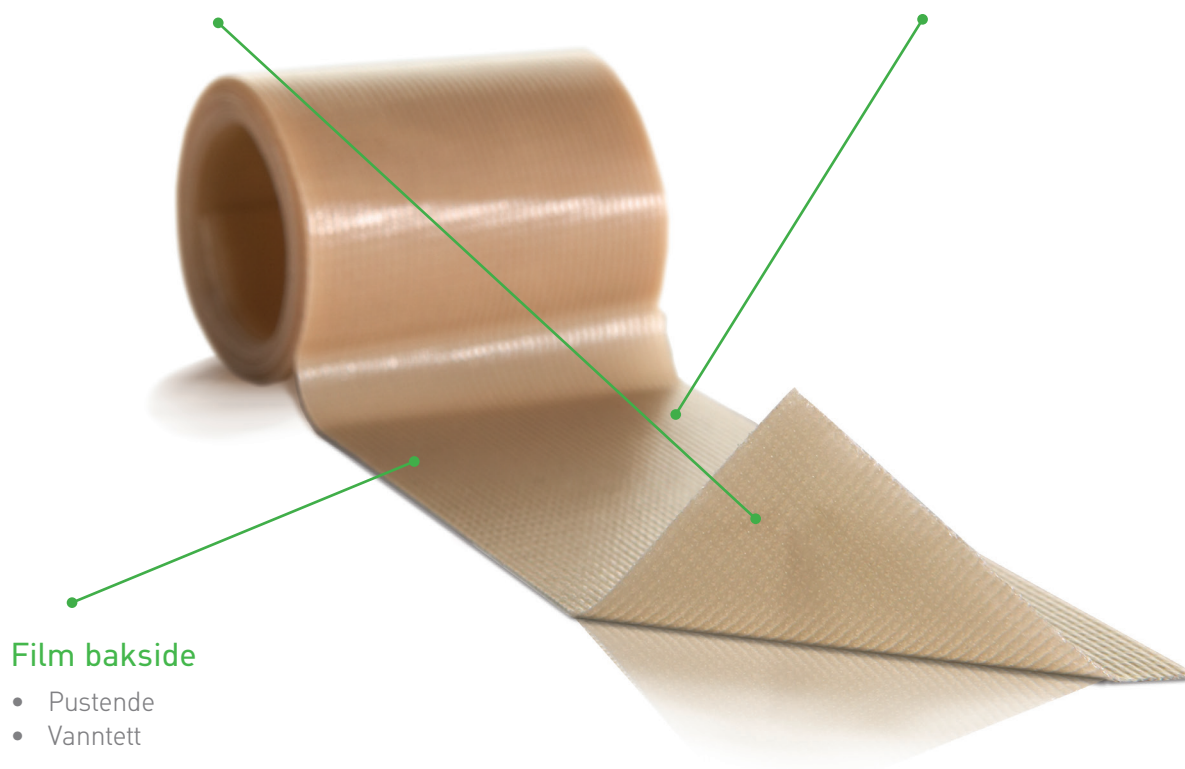


Safetac® teknologi. Mindre smerte og mindre traume.

Safetac er en unik proprietær klæbeteknologi, der minimerer smerte hos patienten og traume mod såret. Safetac teknologi findes udelukkende på Mölnlycke Health Care bandager, herunder Mepilex® sortimentet, Mepitel® One, Mepiform® og Mepitac®.

Læs mere på www.safetac.com

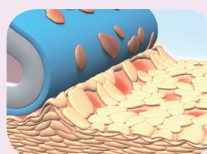


Stripping af hudceller med traditionel klæb

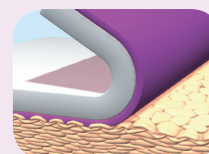


Ingen stripping af hudceller med Safetac teknologi


Hvordan bruke Mepitac

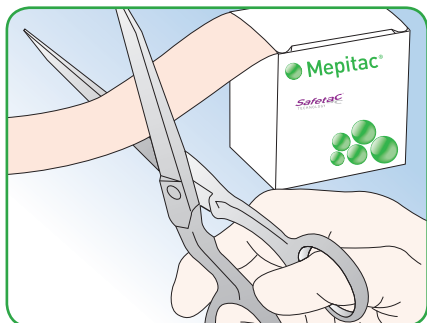

Sørg for at huden er ren og tørr og uten salverester etc. Klipp til ønsket størrelse.

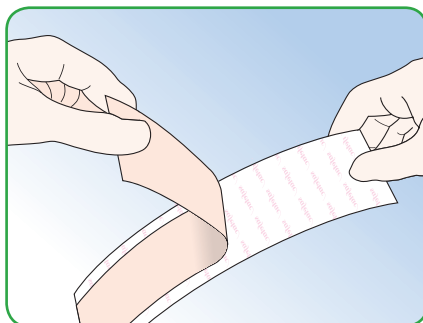

Fjern den beskyttende releasefilmen.

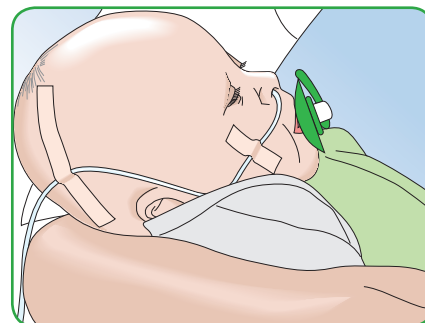

Appliser Mepitac uten å strekke den. Mepitac kan justeres og reappliseres hvis det er nødvendig å inspisere området.

Slik fungerer Mepitac

Mepitac er veldig føyelig og enkel å applisere og fjerne. Safetac laget gir en sikker fiksering og er atraumatisk ved fjerning fra hud og kroppshår. Mepitac kan justeres og reappliseres hvis det er nødvendig å inspisere området. Mepitac er en ideell fiksering for pasienter med skjør og sensitiv hud, allergier og hudsykdommer som eksem eller dermatitt. Mepitac egner seg for pasienter som opplever gjentatt applisering og fjerning av tape på samme hudområde, for eksempel neonatal- og dialysepasienter.

Fordeler med Mepitac

- Atraumatisk mot huden ved fjerning
- Former seg etter kroppen
- Etterlater ingen rester på huden
- Vanntett
- Pustende

Bruksområder


Mepitac egner seg til fiksering av bandasjer og utstyr som katetere, tuber, slanger, sonder, elektroder, dren og IV kanyler. Mepitac skåner huden ved bruk under slanger, kanyler med mer.

NB!

Hefteegenskapen til Mepitac kan avta ved bruk i et fuktig miljø som for eksempel kuvøse eller på pasienter med feber eller som svetter mye. Mepitac egner seg ikke til fiksering av arteriekran eller -kanyler.

Mepitac sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
298300	2 cm x 3 m	1	12
298400	4 cm x 1,5 m	1	12
Apotekspakning (usteril)			
298370	2 cm x 3 m	1	12

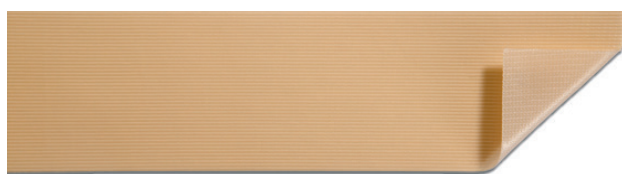

Besøg www.molnlycke.dk for mere information

Mölnlycke Health Care
Postboks 6229, Etterstad
0603 Oslo
Telefon: 22 70 63 70
www.molnlycke.com

The Mölnlycke Health Care name and logo and Mepitac® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care.

