

BARRIER® Extremitetenset - bilateraal knie, met Drisite® Plus



- Drisite® Plus* biedt een uitstekende absorptie en vochtafvoer
- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Optimale vouwwijze voor steriele afdekking en drapeerbaarheid door één persoon
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid

* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.


Afdekinstructie



1. Vouw de tafelsloop open en leg hem onder de benen van de patiënt.



2. Leg het opgevouwen extremitetenlaken over de voeten van de patiënt met de gebruiksaanwijzing naar boven gericht, dus naar het lichaam van de patiënt.

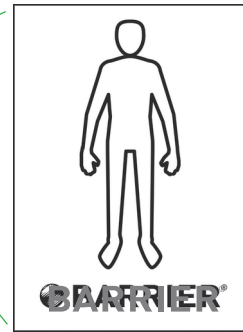

3. Steek de hand door de elastische opening en grijp de voet van de patiënt. Doe dit aan de twee zijden. Vouw het laken open over het voeteneinde van de operatietafel en dan naar boven.



4. Vouw het bovenste deel van het laken open over het anesthesieframe.

Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60301	Extremitetenstet, bilateraal been	7/14
	4 cellulose doeken 18x25cm	
	2 OP-tapes 9x49cm	
	1 bilateraal beenlaken 200x300cm, openingen 7cm elastisch	
	1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® procedure trays

Ref. nr.	Componenten Mölnlycke® procedure trays
70313	Bilateraal beenlaken 200x300cm, openingen 7cm elastisch

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82
 Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52
 De Mölnlycke en BARRIER naam, logo en merknamen zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep.
 © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00851709)

