



## BARRIER® Schouderlaken met Drisite® Plus\*

- Geïntegreerde vochttopvangzak voor een doeltreffende vochtafvoer
- Versterkte materialen in de kritieke zone zorgen voor een betrouwbare kwaliteit met een hoge scheurweerstand
- Zachte, plastic randen rond het wondgebied zorgen voor een optimale hechting op de huid
- Ondoordringbare materialen voor een optimale patiëntveiligheid
- Optimale vouwwijze voor aseptische afdekking en drapeerbaarheid door één persoon




**Gebruik de klittenband om andere slangen en kabels te bevestigen.**

\* Drisite® Plus is een gepatenteerd vochtafvoersysteem met drie zones, samengesteld uit een droge, sterke en absorberende barrière.

# Instructies



1. Plaats eerst de stockinette over de hand zonder ze open te vouwen.

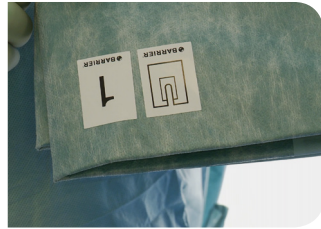

2. Neem nota van de richting van het pictogram op het eerste splitlaken.



3. Plaats de split onder de arm. Vouw het laken open naar de zijkanten en vervolgens naar de voeten van de patiënt. Vouw het splitgedeelte open naar de voeten.




4. Vouw de stockinette open. Vouw de absorberende comfortlaag van de stockinette naar binnen om overdracht van microben te voorkomen. Maak vast met de OP-tape.



5. Verwijder de beschermfolie van het splitlaken. Breng de split dan zo laag mogelijk rond de schouder van de patiënt aan.



6. Neem nota van de richting van het pictogram op het tweede splitlaken. Vouw het laken open naar de zijkanten en vervolgens naar het hoofd van de patiënt. Verwijder de beschermfolies.

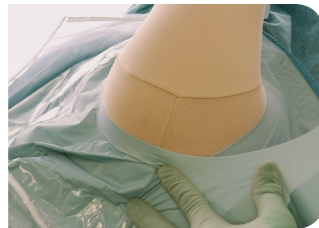

7. Breng de tweede split zo aan dat ze zich niet rechtstreeks boven de eerste bevindt, maar die overlapt, zodat een veilige barrière wordt gevormd.



8. Breng de zak in de juiste vorm met de geïntegreerde flexi draden. U bent klaar met het draperen (indien nodig).

Scan de QR code voor meer informatie over Mölnlycke of om de instructievideo te bekijken.



Ref. nr.	Beschrijving	Disp/Trp
60001	<b>Schouderzet</b> 1 versterkte Mayo overzettafelloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 1 stockinette 22x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken boven schouder 240x170cm, split 15x45cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60002	<b>Schouderzet met zak</b> 1 versterkte Mayo overzettafelloop 79x145cm, 65x85cm absorberend 4 cellulose doeken 18x25cm 1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 1 stockinette 22x75cm 2 OP-tapes 9x49cm 1 splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm 1 versterkt instrumentenveld 150x190cm, 75x190cm absorberend	4/8
60005	<b>Splitlakens schouder met zak</b> 1 splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm 1 splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm 1 inpakveld 112x112cm	4/8

Alle vermelde set componenten zijn ook beschikbaar als onderdeel van Mölnlycke® trays.

Ref. nr.	Tray componenten
70005	Splitlaken boven schouder 240x170cm, split 15x45cm
70006	Splitlaken boven schouder met zak 240x170cm, split 15x45cm
70007	Splitlaken onder schouder 230x295cm, split 10x70cm

Meer informatie vindt u op [www.molnlycke.nl](http://www.molnlycke.nl) en [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care BV, Postbus 3196, NL - 4800 DD Breda, Nederland. Tel. 076 521 96 63, Fax 076 522 17 82  
Mölnlycke Health Care NV, Berchemstadionstraat 72 bus 2, BE - 2600 Berchem, België. Tel. 03 286 89 50, Fax 03 286 89 52.  
De Mölnlycke®, Drisite® Plus en BARRIER® merknamen, namen en logo's zijn wereldwijd geregistreerde handelsmerken van de Mölnlycke Health Care groep. © 2017 Mölnlycke Health Care. Alle rechten voorbehouden. (NLSU00891702)

