

BARRIER® Incisiefolie

- 100% ondoordringbaar, voorkomt microbenmigratie door het laken
- Ademend, voorkomt opstapeling van vocht en verbetert het comfort van de patiënt
- Bevat geen latex, colophonium of formaldehyde
- Flexibel en gemakkelijk aan te brengen, zelfs op delicate plaatsen
- Volledig transparant
- Plakt goed aan de huid maar blijft comfortabel tijdens de ingreep en na verwijdering




BARRIER® creëert een cumulatief effect dat resulteert in behandeling van meer patiënten door efficiëntere zorg

Alle BARRIER producten van Mölnlycke Health Care zijn ontworpen om de ideale combinatie van bescherming, functionaliteit en comfort te verschaffen. Het aanbod van innovatieve, doelgerichte oplossingen biedt kwaliteitsproducten die de veiligheid verhogen, voordelen op het gebied van levering en logistiek en permanente ondersteuning en training. Samen brengen die elementen een cumulatief effect teweeg, met besparingen van tijd, inspanning en kosten. Hierdoor komen waardevolle middelen vrij en kan efficiënter worden gewerkt, zodat u meer patiënten kunt behandelen door efficiëntere zorg.






1 Verwijder het crêpe papier. Eén persoon houdt de rand vast en een tweede persoon het release papier aan de andere kant.

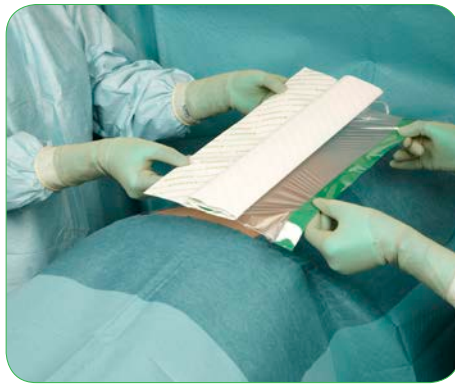

2 Vouw het release papier enkele centimeters open en breng de incisie folie op de patiënt aan.

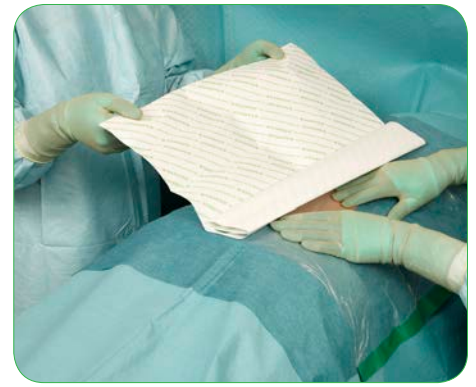

3 Vouw langzaam het release papier verder open, terwijl een tweede persoon de incisie folie bevestigt.



4 Wrijf met de vlakke hand over de incisie folie om een glad oppervlak te verkrijgen. Verwijder de randen aan beide kanten.

Artikelnummer	Afmetingen
801014	10×14 cm
801526	15×26 cm
803026	30×26 cm
804040	40×40 cm
804526	45×26 cm
804555	45×55 cm
805680	56×80 cm