

Een zelfzorggids voor verbandwissels

Uw verpleegkundige koos Mepilex® Border Heel voor uw wond

Hoe brengt u Mepilex® Border Heel aan?


1. Was uw handen 20 seconden met zeep en warm water.

2. Reinig de wond volgens het advies van uw verpleegkundige en droog grondig de omliggende huid.

3. Verwijder het middelste schutblad en schuif het verband onder de hiel op de gewenste plaats.



4. Breng de met 'A' gemarkeerde kleeflaag van het verband aan op de achterhiel/aan weerszijden van de Achillespees, waarbij het smalste deel van het verband zich onderaan de hiel bevindt. Niet uittrekken.

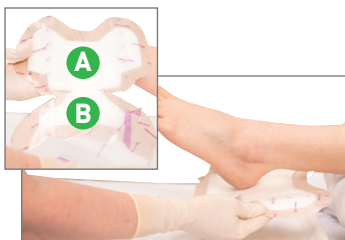

5. Verwijder het schutblad van een van de flappen in zone 'A' (enkeflappen). Breng het verband aan en strijk glad. Herhaal aan de andere zijde. Niet uittrekken.



6. Breng kleeflaag 'B' van het verband voorzichtig aan onder de voet. Niet uittrekken.



7. Verwijder het schutblad van een van de flappen in zone 'B' (flappen met tabs). Breng het verband aan en strijk het glad op de huid. Herhaal aan de andere zijde. Niet uittrekken.



8. Eindpositie van het verband.



Wanneer moet u uw verband verwisselen?

Uw verpleegkundige raadt aan om het verband te verwisselen:

Neem voor verdere hulp en advies contact op met uw verpleegkundige:

Waarop moet u letten?

- Mepilex Border Heel is voor eenmalig gebruik en mag dus niet opnieuw gebruikt worden.
- Als u met het Mepilex Border Heel verband rondstapt, moet u schoenen of pantoffels dragen.

Als u toegang tot internet heeft, kan u het filmpje over het aanbrengen van uw verband bekijken via de volgende link (of scan de code met uw telefoon):



www.molnlycke.com/Mepilex-border-heel-application

Mepilex Border Heel verband moet door professionele zorgverleners worden gebruikt en aangebracht. Indien echter geen professionele zorgverlener beschikbaar is, zal misschien een gezinslid of uzelf de verbandwissel moeten doen. De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het aanbrengen van het verband door deze personen. Als Mepilex Border Heel dus wordt aangebracht door iemand die geen professionele zorgverlener is, neemt de gebruiker alle risico's op zich.

Meer informatie op www.molnlycke.be of www.molnlycke.nl

Molnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen), België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.

Molnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. +31 (0)76 521 96 63.

De handelsmerken, namen en logo's van Molnlycke en Mepilex zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Molnlycke Health Care Group. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00022007 - NLWC00022007


Molnlycke®