

# Een zelfzorggids voor verbandwissels

Uw verpleegkundige koos Mepilex® Border voor uw wond

## Hoe brengt u Mepilex® Border aan?

1. Was uw handen 20 seconden met zeep en warm water.
2. Reinig de wond volgens het advies van uw verpleegkundige en droog grondig de omliggende huid.
3. Zorg dat het wondkussen de droge huid rond uw wond zeker 1-2 cm overlapt.
4. Verwijder het schutblad van het verband en breng de kleefzijde op de wond aan. Zorg dat u het verband niet uitrekt.



5. Strijk alle randen glad.



## Wanneer moet u uw verband verwisselen?

Uw verpleegkundige raadt aan om het verband te verwisselen:

.....

Neem voor verdere hulp en advies contact op met uw verpleegkundige:

.....

### Waarop moet u letten?

- Het is volkomen normaal dat de achterzijde van uw verband verkleurt
- U kan uw verband verschillende dagen op de wond laten
- U kan uw verband in de douche dragen
- Mepilex Border is voor eenmalig gebruik en mag dus niet opnieuw gebruikt worden

Mepilex Border verband moet door professionele zorgverleners worden gebruikt en aangebracht. Indien echter geen professionele zorgverlener beschikbaar is, zal misschien een gezinslid of uzelf de verbandwissel moeten doen. De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het aanbrengen van het verband door deze personen. Als Mepilex Border dus wordt aangebracht door iemand die geen professionele zorgverlener is, neemt de gebruiker alle risico's op zich.

## Meer informatie op [www.molnlycke.be](http://www.molnlycke.be)

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen), België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.

De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke en Mepilex zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00042007