


Een zelfzorggids voor verbandwissels

Uw verpleegkundige koos Mepitel® voor uw wond

Hoe brengt u Mepitel® aan?

1. Was uw handen 20 seconden met zeep en warm water.
2. Reinig de wond volgens het advies van uw verpleegkundige en droog grondig de omliggende huid.
3. Neem het verband uit de verpakking.
4. Als u handschoenen draagt, maak dan uw vingertoppen nat terwijl u ze aanheeft. Het verband zal dan niet meer aan uw handschoenen plakken. Verwijder het kleine schutblad terwijl u het grote vasthoudt.

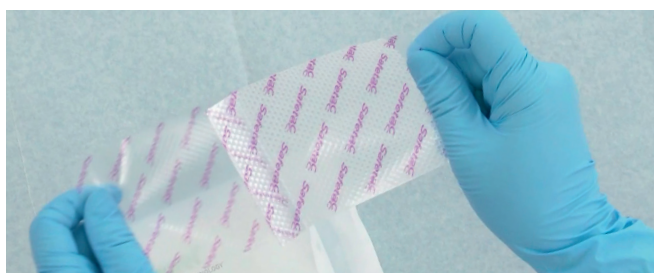

5. Breng Mepitel op de wond aan en verwijder het andere schutblad.



Waarop moet u letten?

- Mepitel is voor eenmalig gebruik en mag dus niet opnieuw gebruikt worden.

Mepitel verband moet door professionele zorgverleners worden gebruikt en aangebracht. Indien echter geen professionele zorgverlener beschikbaar is, zal misschien een gezinslid of uzelf de verbandwissel moeten doen. De fabrikant draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het aanbrengen van het verband door deze personen. Als Mepitel dus wordt aangebracht door iemand die geen professionele zorgverlener is, neemt de gebruiker alle risico's op zich.

6. Strijk het verband glad op de omliggende huid, zodat het de wond goed afsluit.



7. Bedek het Mepitel verband met het secundair verband dat uw verpleegkundige adviseert.




8. Breng een zwachtel aan om het verband op zijn plaats te houden.

Wanneer moet u uw verband verwisselen?

Uw verpleegkundige raadt aan om het verband te verwisselen:

Neem voor verdere hulp en advies contact op met uw verpleegkundige:

Als u toegang tot internet heeft, kan u het filmpje over het aanbrengen van uw verband bekijken via de volgende link (of scan de code met uw telefoon):

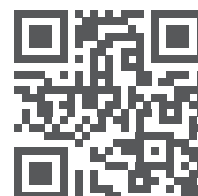

www.molnycke.com/Mepitel-application

Meer informatie op www.molnycke.be of www.molnycke.nl

Mölnlycke Health Care NV, Berchemstationstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (Antwerpen), België. Tel. +32 (0)3 286 89 50.
Mölnlycke Health Care B.V., Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG Utrecht, Nederland. Tel. +31 (0)176 521 96 63.

De handelsmerken, namen en logo's van Mölnlycke en Mepitel zijn wereldwijd geregistreerd door een of meer bedrijven van de Mölnlycke Health Care Group.
©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle rechten voorbehouden. BNWC00072007 - NLWC00072007