


# Mepore® Film & Pad

## Douchebestendig, transparant, zelfklevend, absorberend filmverband

Mepore® Film & Pad is een douchebestendig, transparant, zelfklevend, absorberend filmverband.

Het aanbrengsysteem is ontwikkeld voor een gemakkelijk gebruik.

Het discreet design trekt minder de aandacht, wat uw patiënt als comfortabel ervaart.

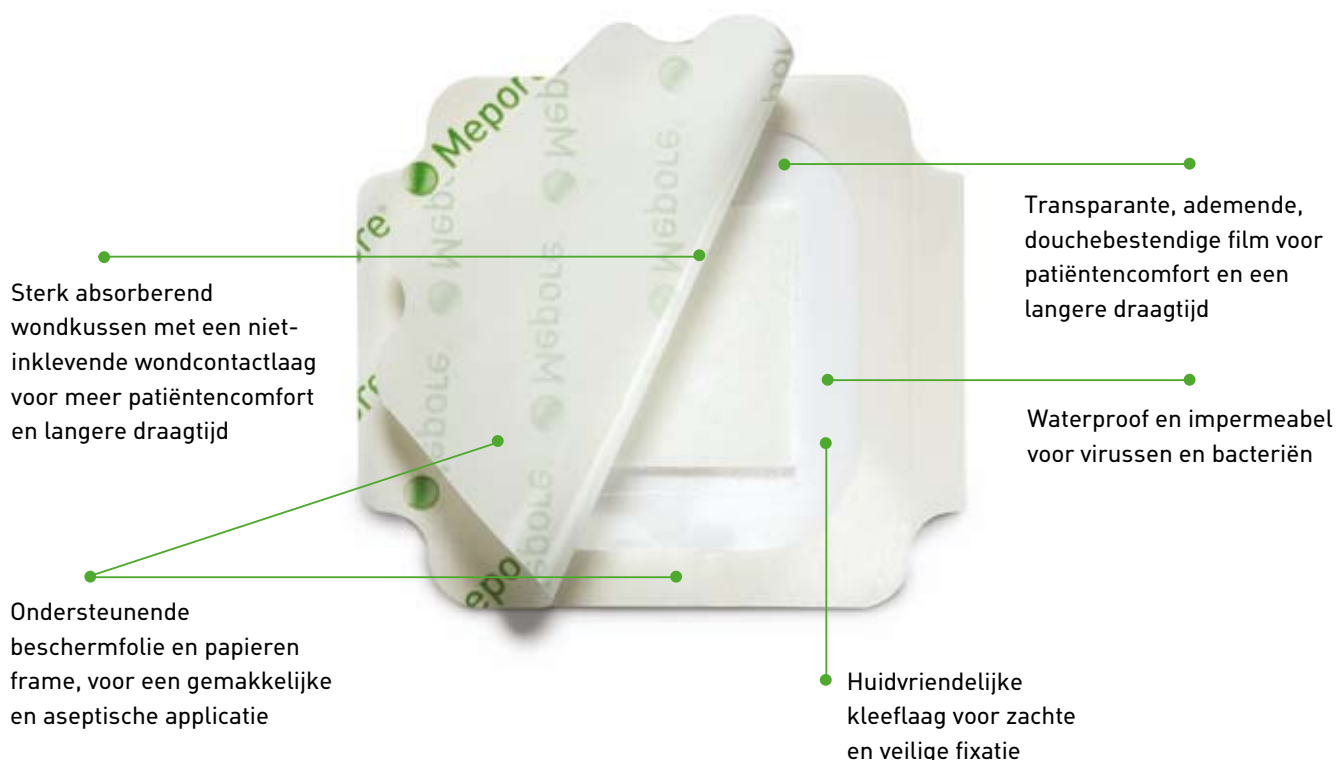

## Gebruiksaanwijzing



Verwijder de beschermfolie. Positioneer het verband. Het verband niet uitrekken bij het aanbrengen.



Bij het aanbrengen van het verband de papieren frames en de twee witte papieren zijflapjes verwijderen.



Leg uw hand een aantal seconden over het verband zodat het verband goed blijft kleven.

## Hoe werkt Mepore® Film en Pad?

Dankzij het hoog absorberend wondkussen en de hoge verdamping met de film op de rugzijde, biedt het verband een goed wondvochtbeheer. Mepore® Film & Pad biedt een flexibele, transparante bescherm laag. Het past zich perfect aan aan lichaamscontouren en oneffen oppervlaktes. De huidvriendelijke polyacrylaat kleefstof zorgt voor een veilige fixatie en is tegelijk zacht voor de huid. Mepore® Film & Pad verbanden zijn gemakkelijk in gebruik, laten een steriel gebruik toe, ook bij het dragen van handschoenen.

## Voordelen van Mepore® Film & Pad

- meer comfort dankzij de elastische, ademende film
- beter patiëntencomfort dankzij zeer goed ademende, zachte, elastische non-woven
- makkelijke applicatie dankzij eenvoudig te verwijderen schutblad
- beter patiëntencomfort en langere draagtijd dankzij absorberend wondkussen met nauwelijks verklevende wondcontactlaag
- goede en huidvriendelijke fixatie dankzij kleeflaag op waterbasis en zonder oplosmiddelen
- douchebestendig
- transparant



## Toepassingen

- droge tot vochtige wonden  
Zoals: postoperatieve wonden, snijwonden, schaafwonden

## Voorzorgsmaatregelen

Mepore® Film & Pad niet gebruiken bij patiënten gevoelig aan acrylaat kleefstof. Breng het verband aan zonder tractie uit te oefenen om beschadigingen aan de huid te voorkomen. Bij klinische tekenen van infectie een adequate behandeling instellen.

## Assortiment Mepore® Film & Pad (steriel)

Afmetingen (in cm)	Wondkussen (in cm)	CNK-code	Art.nr.	Stuks/ doos	Stuks/ transportverp.
4x5	1,5x2,5	2539-120	275100	85	340
5x7, Ovaal	2,5x4	2539-138	275200	85	340
5x7	2,5x4	2539-146	275300	85	340
9x10	4,5x5	2539-153	275400	30	180
9x15	4,5x10	2539-161	275500	30	240
9x20	4,5x15	2539-187	275600	30	240
9x25	4,5x20	2539-195	275700	30	150
9x30	4,5x25	2539-211	275800	25	125
9x35	4,5x30	2539-229	275900	25	100
4x5	1,5x2,5	2509-537	275110	5	70
5x7, Ovaal	2,5x4	2509-545	275210	5	70
5x7	2,5x4	2509-552	275310	5	70
9x10	4,5x5	2509-560	275410	5	50
9x15	4,5x10	2509-578	275510	5	50
9x20	4,5x15	2509-586	275610	5	40